


フロスレッダー・フィラメント・フロスと 3つの役割を1本にまとめた画期的なフロス

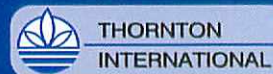

ブリッジ・インプラントタイプのみフロスレッダーとフィラメントの2つの役割です。



SUPER FLOSS フィラメントの特長



拡大写真

フィラメント部分は特殊処理されたナイロン繊維でスポンジ状になっており、プラークをからめて除去します。また伸縮性があり引っ張れば歯間へ自由自在に挿入できます。

*フロスの長さの数値は伸縮性があるため、平均値で表示

ブリッジ・インプラントタイプ

フロスレッダー 10cm フィラメント 12cm フロスレッダー 10cm

ペリオタイプ

フロスレッダー 10cm フィラメント 12cm フロス 40cm

3in1 レギュラータイプ

フロスレッダー 10cm フィラメント 12cm フロス 45cm



スーパーフロス 3in1 レギュラータイプ

どなたにもお使いいただけるフロスで、3役を1本にまとめた3in1レギュラータイプ
入数 100本
患者参考価格 ¥1,300/個(税別) 販売単位12個



スーパーフロス ペリオタイプ


レギュラータイプより太く、広い歯間空隙にも対応できるペリオタイプ
入数 50本
患者参考価格 ¥1,200/個(税別) 販売単位12個
50 スムーズに取り出せる50本入に変更しました



スーパーフロス ブリッジ・インプラントタイプ


両端がスレッダーになり、ポンティック底部やインプラント部に使用するB&Iタイプ
入数 30本
患者参考価格 ¥1,000/個(税別) 販売単位12個

フロスレッダーの部分では

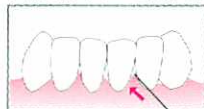


歯間にフロスレッダーを通します
ブリッジのポンティック底部や、歯列矯正中の歯などに通しやすくなっています。

フィラメントの部分では

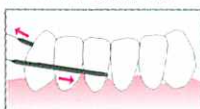

歯間とポケット内のプラークをフィラメントの部分で除去します
太い編み目のスポンジはプラークが絡みつき除去しやすくなっています。

フロスの部分では

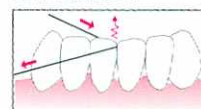

歯ブラシでは除去できない隣接面のプラークを除去します
通常のフロスの働きをします。

made in U.S.A.