


Just put hot water between outer and inner cases,
and then fog away from mirrors!

Simple Mirror Warmer “Yuki Chan Deluxe”

湯器ちゃんデラックス

熱いお湯を外ケースに入れるだけで、内ケース内のミラーは濡れない！曇らない！

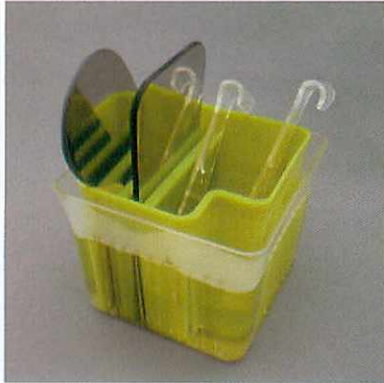

ご使用者の声

1. 撮影中に曇らなかった！
2. 拭く手間が省けて便利
3. 撮影用具が1つの容器に
まとまって使いやすい
4. 透明なので、お湯の量が
わかりやすい



使用前に濡れたミラーを拭く必要はありません。

口腔内ミラーや口角鉤を収納する口腔内ミラー用保温容器です。
口腔内ミラーを濡らすことなく温めることにより、患者の口腔内に入れた際、
口腔内ミラーが曇りません。口角鉤用スペースには、水を入れ口角鉤を濡らす
ことが可能です。

使用方法

- ① 外ケースに内ケースを入れる。その際に、内ケースの溝が外ケースの溝に合
うように差し込む。
- ② 約70℃のお湯を外ケースと内ケースの間のスペースに入れる。
- ③ 口腔内ミラーや口角鉤を本器にセットし、口腔内ミラーを温める。
温められた口腔内ミラーは、そのまま口腔内に入れても曇りません。

洗浄方法

● 水または中性洗剤で洗浄し、各種消毒剤で消毒してください。
(推奨消毒剤：アグサール・ディスオーバ・リストゲン・ヒビテン、アルコール)

○ オートクレーブ滅菌も可能です(耐熱温度約135℃)。

注意 ※ 次亜塩素酸系などの消毒剤は使用しないでください。

製品が変形する恐れがあります。

※ オートクレーブ滅菌を行う際は、必ず乾燥工程まで行ってください。
外ケースの色が白濁する恐れがあります。

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ 色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※ 価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



寸法：106 x 106 x 85(mm)
素材：外ケース・TPX
内ケース・PP

湯器ちゃんデラックス
価格：¥7,500(税抜)