

義歯洗浄剤

ラバラックムース 家庭用

歯科医院専売品



200mL



150mL

どこでも
だれでも
カンタン!
入れ歯洗浄!!

パワーアップした
ムース洗浄で
**作業時間
を短縮!**

次亜塩素酸
ナトリウム
3%(30,000ppm)
を安定維持させ
特殊界面活性剤
を配合

高齢者に多い誤嚥性肺炎予防は口腔ケアから

食後、毎回洗浄をおこなっていただくのが基本です。
それが難しい場合でも、1日1回は洗浄をおこなきましょう。

義歯などについての傷は、カビ(カンジダ菌)や細菌の温床となる!!

義歯を長い間不衛生にしておくとニオイだけでなく、義歯性口内炎や歯肉炎になる可能性があります。
又、口腔内のカビ(カンジダ菌)や細菌が原因で、誤嚥性肺炎を引き起こす場合もあります。
義歯を清潔に保ち健康で快適な生活を送るには正しい義歯ケアが必要です。

ブラッシングを必要としないため、義歯などを傷つける心配がありません。



SD サンデンタル株式会社

次亜塩素酸ナトリウムによる化学的洗浄でデンチャーケア

目に見えない汚れを洗浄

多孔性レジン床は雑菌の温床

目に見える汚れを洗浄

ステインや酸化した金属床の黒ずみ

- ◎抗菌効果が高い次亜塩素酸ナトリウム3%配合
- ◎コストパフォーマンス ⇒ フルデンチャー約15円/回
- ◎防錆剤配合で金属も安心
- ◎危険性の回避 ⇒ 飛散や誤飲防止
- ◎ムースをかけるだけでカンタン除菌・脱臭・洗浄
- ◎洗浄時間の短縮 ⇒ 約5分の作業で、つけ置き不要

カンタン3ステップで、デンチャーケア

食後、毎回洗浄をおこなっていただくのが基本です。



200mL

Step 1



- ・容器に洗浄物を入れた後、ムースで洗浄物を覆います。
- ※お手持ちの洗浄用容器をご使用ください。

Step 2



- ・容器を数回振り、洗浄物とムースをなじませ3~5分置きます。

Step 3



- ・流水下で20秒すぎます。洗浄物とケースのW洗浄完了。



150mL

Step 1



- ・容器に洗浄物を入れた後、ムースで洗浄物を覆います。
- ※お手持ちの洗浄用容器をご使用ください。



横に倒して使用しないで下さい。

Step 2




- ・容器を数回振り、洗浄物とムースをなじませ3~5分置きます。

Step 3



- ・流水下で20秒すぎます。洗浄物とケースのW洗浄完了。

ご注意

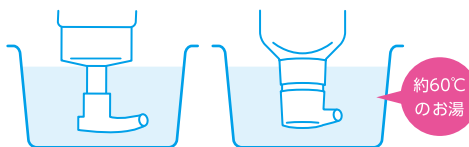

長期間使用しないと界面活性剤が固まりムースの出が悪くなる
ことがあります。ムースが出にくい場合は約60°Cのお湯に3分間
ほどつけてからご使用ください。

義歯洗浄剤

ラバラックムース 家庭用

主な使用用途

- レジン床義歯
- ナイトガード
- 金属床義歯
- スプリント
- 脱離ブリッジ
- マウスガード
- 矯正用リテーナー
- デンポラリークラウン・ブリッジ

200mL

【成分】
次亜塩素酸ナトリウム 3%
界面活性剤 5%
防錆安定剤

【患者価格】
1,500円(税別)

150mL

【成分】
次亜塩素酸ナトリウム 3%
界面活性剤 7%
防錆安定剤

【患者価格】
1,300円(税別)

SD サンデンタル株式会社

〈本社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
 〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
 〈福岡営業所〉〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は