

## 純チタン・チタン用鏡面研磨



ハトー ポリスター  
ポリッシングペースト  
レッド レギュラー

### 歯面研磨用



ハトー TOROブラシ  
TORO #11



ハトーブラシ(HP用)  
174-21HP(F6)



ハトーブラシ(HP用)  
100-10PP(R22)

### 裂孔・咬合面研磨用

#### 使用方法

形態修正した後の光沢研磨用 [深い切削痕等は先に均してください]

- ① 研磨する箇所に合わせてブラシを選択
- ② 選択したブラシをマイクロモーターに取り付け、回転させたブラシにポリッシングペーストを押し当て付着させ、10,000回転で研磨  
鏡面研磨の準備が完了!

#### セット内容

- ハトー ポリスター ポリッシングペースト レッド レギュラー\*1×1
  - ハトー TOROブラシ TORO #11\*2×1
  - ハトーブラシ(HP用) 174-21HP(F6)\*2×1
  - ハトーブラシ(HP用) 100-10PP(R22)\*2×1
- 単品販売 [レギュラーまたはラージサイズ] \*1、 [12本] \*2 もございます

## MiniPol 34 ハトー ミニボル 34 ￥2,100

販売名: ハトー ミニボル 34 届出番号: 27B2X00041000228 一般医療機器

## 3D プリント レジンの最終光沢研磨

アクリルデンチャー (PMMA) ・軟性レジン・チタン・貴金属・非貴金属の鏡面研磨



ハトーポリスター  
エマルジョン  
50ml

### 歯面・裂孔・咬合面研磨用



ハトーブラシ (HP用)  
150-22HP(W1)



#### 使用方法

重要: キズがないスムーズ (梨地のような) 研磨面かを確認する

- ① 研磨対象面にポリスター エマルジョンを少量塗布し、指で伸ばす
- ② 150-22HPをマイクロモーターに取り付け、  
10,000回転で研磨を行う  
キズのない艶やかな研磨面が完成!

#### セット内容

- ハトーポリスター エマルジョン\*1×1
- ハトーブラシ (HP用) 150-22HP(W1)\*2×2

単品販売 [50・125ml] \*1、 [12本] \*2もございます

## MiniPol 12 ハトー ミニボル 12 ￥1,800

販売名: ハトー ミニボル 12 届出番号: 27B2X00041000227 一般医療機器

●掲載商品の価格は小売価格で、2022年3月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様及び外観は、製品改良の為に予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
●製造元: HATHO GmbH ●製造国: ドイツ連邦共和国 ●製造販売元: サンデンタル株式会社

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ  
大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318 月~金 9:00~17:00



サンデンタルホームページ  
http://www.sundental.jp

## ハーツフィックス #80

チタン合金・純チタンの形態修正

- ✓ 弾性結合コランダムを使用した研削部
- ✓ 高切削力&高耐久性
- ✓ 研削後の研削痕が少なく研磨がラク
- ✓ 粒度 #80



80



ストレート (ø2.35)



1入  
4入



15,000RPM



15,000RPM



12,000RPM

アイテムNo.	204-20HP	202-8HP	206-8HP
寸法 (径×厚mm)	20×3	8×16	8 (先端6) x16
価格 (1本)	¥900	¥1,600	¥1,600
価格 (4本)	¥2,900	¥5,000	¥5,000

医療機器届出番号：27B2X00041000158 製造販売元：サンデンタル株式会社 製造社：HATHO GmbH

## ハーツフィックス #240

チタン合金・純チタンのキズ取り

- ✓ 形態修正後のキズの平坦化
- ✓ 研磨後のキズが少ない
- ✓ 高耐久性
- ✓ 粒度 #240



240



ストレート (ø2.35)



1入  
4入



ハーツフィックス #80 より  
細かい酸化アルミニウムをよ  
り多く配合しており、研磨物  
にキズが残りづらい！



15,000RPM



15,000RPM



12,000RPM

アイテムNo.	224-20HP	222-8HP	226-8HP
寸法 (径×厚mm)	20×3	8×16	8 (先端6) x16
価格 (1本)	¥1,100	¥1,900	¥1,900
価格 (4本)	¥3,300	¥6,000	¥6,000

医療機器届出番号：27B2X00041000158 製造販売元：サンデンタル株式会社 製造社：HATHO GmbH

## EVE クロムプラス

コバルトクロム合金、ステンレススチール、チタン合金の研削・研磨用2ステップポリッシングシステム

- ✓ 発熱の発生を抑える
- ✓ 2ステップで形態修正&研磨
- ✓ 高耐久性
- ✓ 粒度：中目・細目



- 鋳造後の研削から  
マット・サテン仕上げまで
- 炭化ケイ素砥粒配合



ストレート (ø2.35)



10入

形態修正



中目



8,000~15,000rpm  
最大 20,000rpm



仕上研磨



細目



8,000~15,000rpm  
最大 20,000rpm



品番	CRP-R22m <sup>*1</sup>	CRP-C6m <sup>*2</sup>	CRP-C6f <sup>*2</sup>
サイズ[mm]	22×3	6×22	6×22
価格 (10本)	¥990	¥990	¥990

医療機器届出番号：27B2X00041000100 製造販売元：サンデンタル株式会社 製造社：EVE Ernst Vetter GmbH

注意 ご使用の際は、過度な速度での作業と過度な押し付けはお避けください。

●掲載商品の価格は小売価格で、2022年3月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の為に予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

\*EVE マンドレル 78HP [別売] に装着してからご使用ください。 \*\*EVE マンドレル 61HP [別売] に装着してからご使用ください。