




ISOモーター用ハンドピース

T1ライン、T2ライン(New)、T3ライン(New)
3つのクラスで治療を厚くサポート

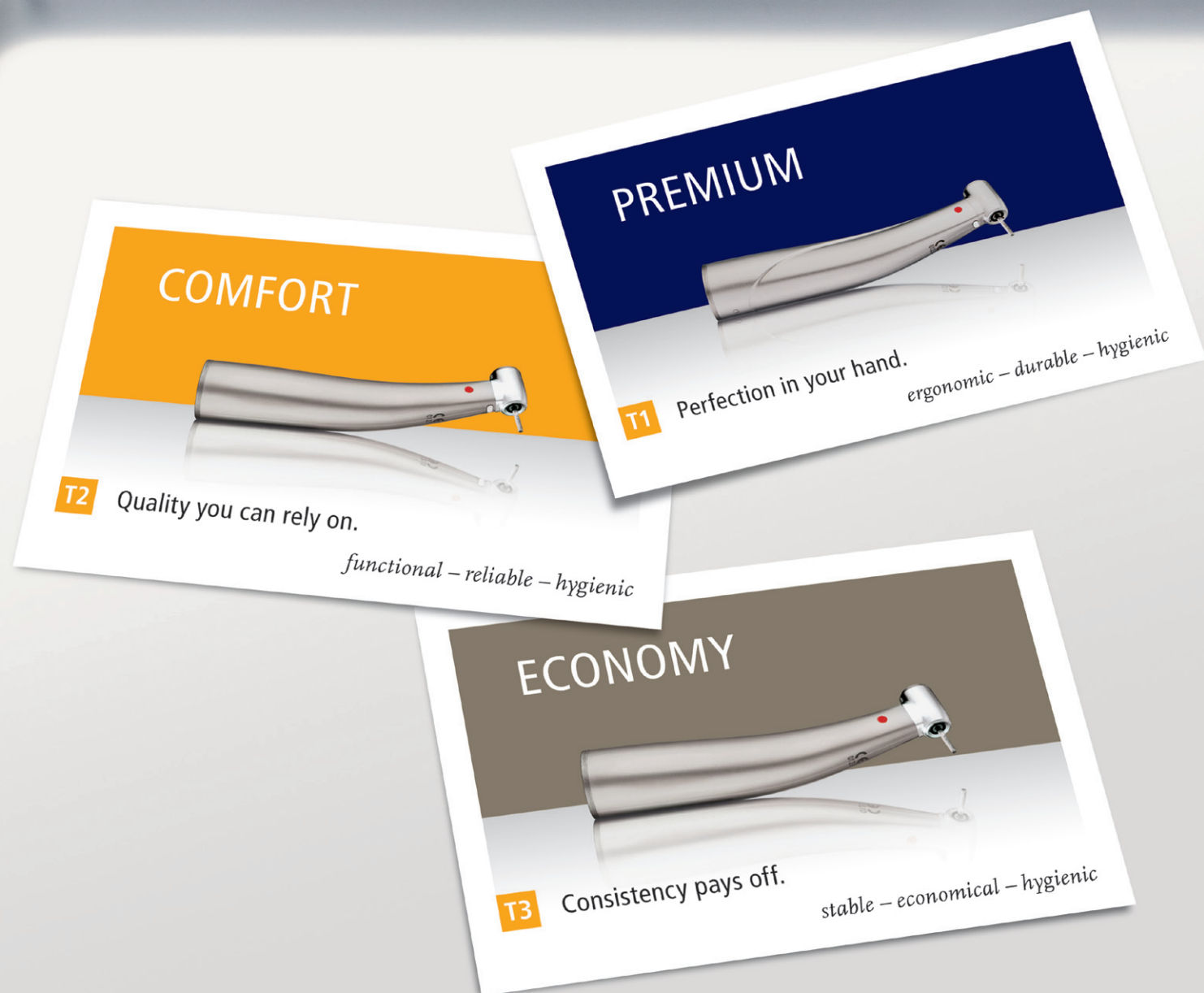

ストレート&コントラアングル — 個性を放つワイドなラインナップ

治療の結果は知識と熟練した技能に大きく左右されることは言うまでもありません。しかしながら、優れたハンドピースの使用は、理想的な治療結果をより確実なものにします。使い勝手に定評のある「T1ライン」に「T2ライン」と「T3ライン」2つの

レンジが新たに加わり、ストレート&コントラアングル ハンドピースのラインアップが3つのクラスに拡大。どのクラスを選択されてもそのパフォーマンスにご納得いただけるものと確信しています。

高品質の証 — チタン製ボディ

航空宇宙産業において、強度、安定性、重量の普遍性が厳しく要求されるジェットエンジンのパーツにはチタンが用いられています。歯科医療機器のリーディングカンパニーとして、

シロナは長年に渡り独自のチタン可塑性成形テクノロジーを製造過程に導入し、軽量かつ生体親和性の高いハンドピースをワールドワイドに提供しています。



Made in Germany



エルゴノミクス（人間工学）デザインを 形にしました

エルゴノミクス（人間工学）と耐久性：


シロナが誇るプレミアムクラスのストレート&コントラアングル ハンドピース「T1ライン」は、優れたグリップ感と耐久性を実現します。

エルゴノミクス（人間工学）

手に馴染む流麗なデザインと軽量なチタン製スリーブは、治療中の疲労感を緩和しリラックスした操作を可能とします。

耐久性

プレミアムクラスの「T1ライン」は、DLC（Diamond-Like-Carbon）にてセラミック ボールベアリングをコーティング。耐久性能がさらに向上しました。

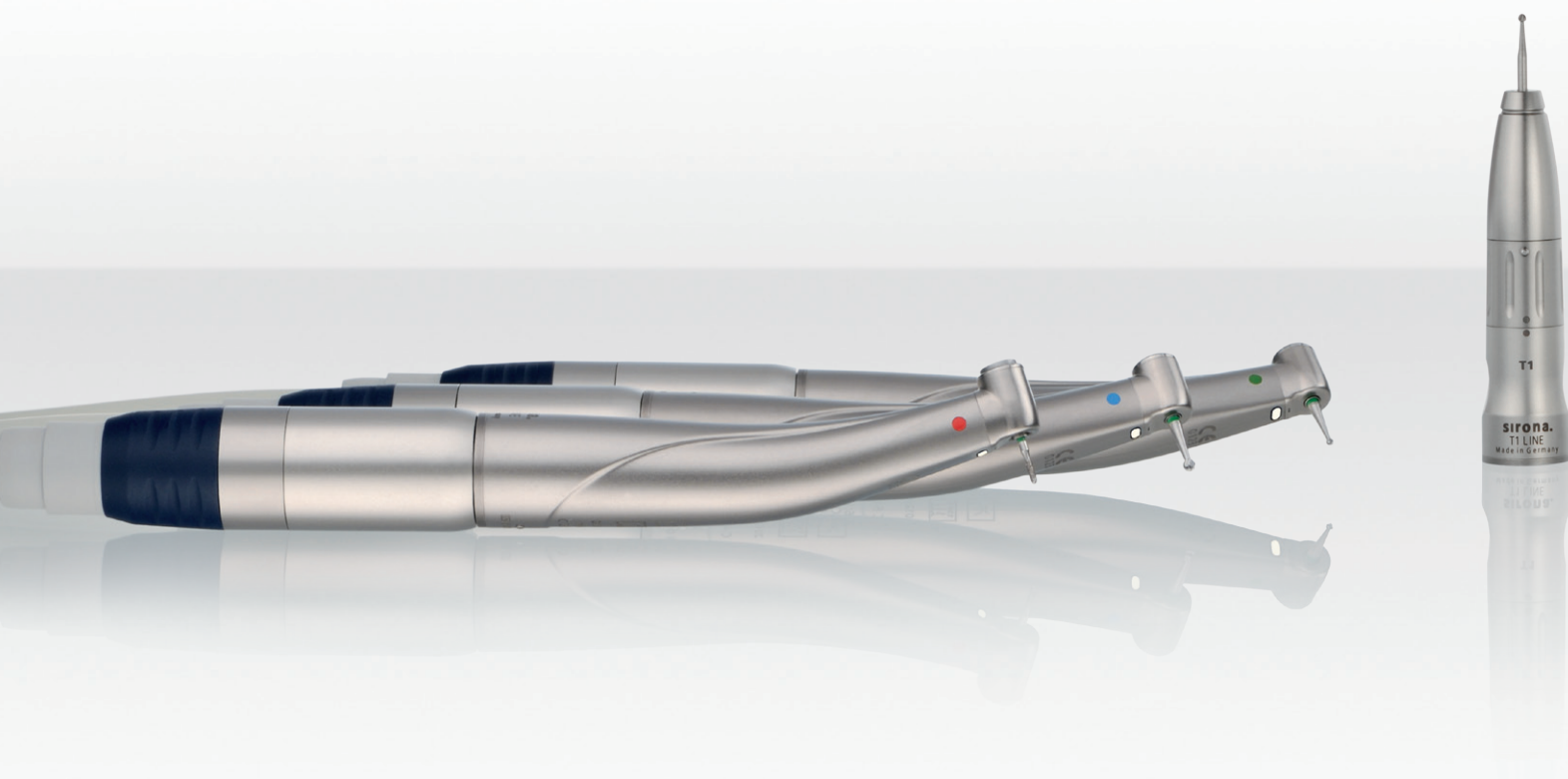

T1ライン – 高品質を追求したプレミアムクラス



ISO INTERFACE

ライト付/無、どちらのISOマイクロモーターにも接続可能


高品質を誇るストレート&コントラアングル ハンドピース「T1ライン」シリーズは、人間工学デザインと軽量のチタン素材により、使いやすさと疲労の低減を徹底的に追及しました。また、ライトガイドが格納するISOスライダーは、ライトの有無を問わず幅広いマイクロモーターへの接続を可能とします。

- ISO規格のマイクロモーターに接続
- 人間工学に基づくチタン製スリーブ
- 優れた耐久性を実現するDLCボールベアリング
- ライト付/無、どちらもモーターにも接続可能なISOスライダー採用
- **3年保証**
- 施術野を鮮明にするファイバーオプティックライト
- 優れた耐滅菌性能




T1ライン テクニカルデータ

製品名		ギア比	最高回転数 (分)	ヘッド直径 (mm)	ヘッド高 (mm)	使用バー	REF.
T1ライン C 200 L	☀	1 : 5 (5倍速)	約200,000	9.7	15.2	直径1.6mmFG/バー	33 28 452
T1ライン C 200 L ミニ	☀	1 : 5 (5倍速)	約200,000	8.7	13.4	直径1.6mmFG/バー	60 06 303
T1ライン C 40 L	☀	1 : 1 (等速)	約40,000	8.7	12.4	直径2.35mmCA/バー	33 28 437
T1ライン C 6 L	☀	6 : 1 (1/6減速)	約6,000	8.7	12.4	直径2.35mmCA/バー	33 28 429
T1ライン C 1,6 L	☀	24 : 1 (1/24減速)	約1,600			直径2.35mmCA/バー	33 28 411
T1ライン H 40 L	☀	1 : 1 (等速)	約40,000	–	–	直径2.35HP/CA/バー	60 31 277

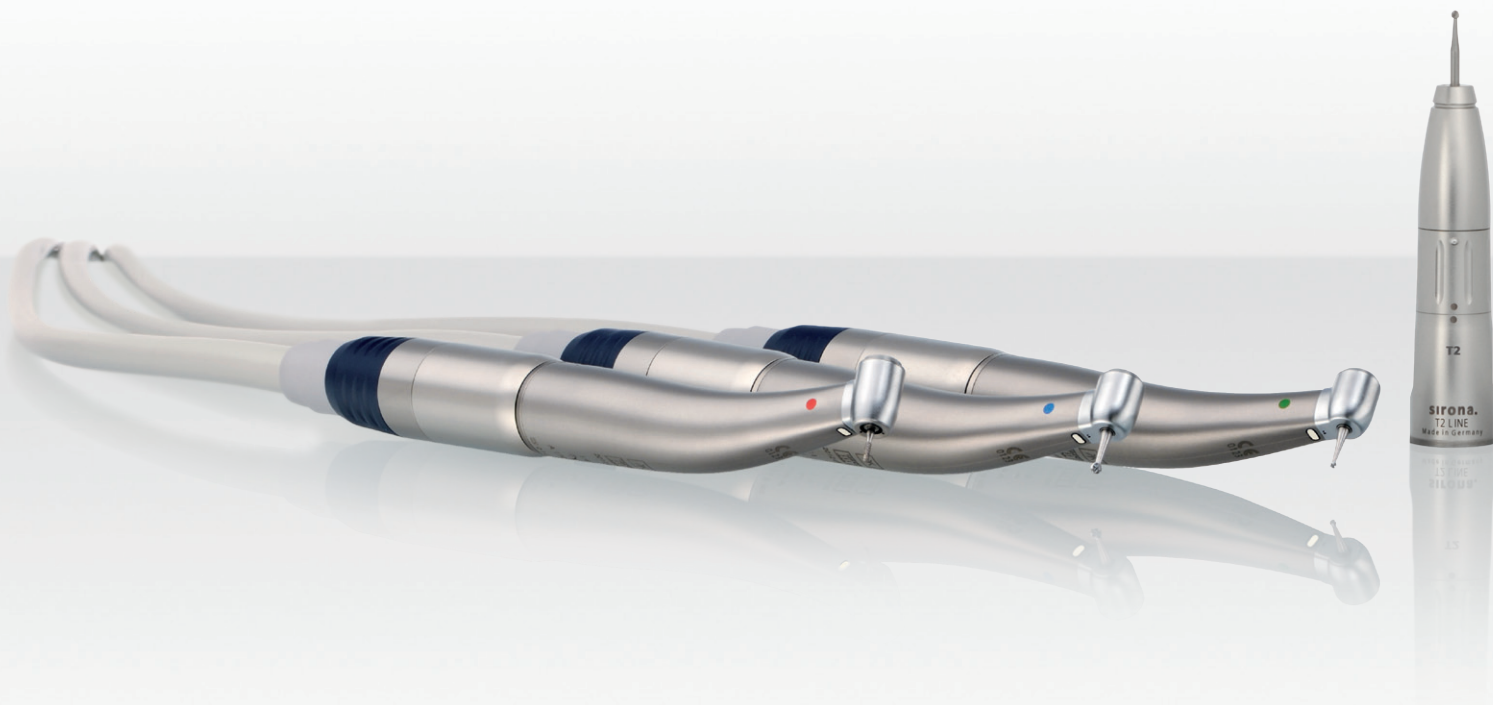

T2ラインー 快適性を追及したコンフォートクラス

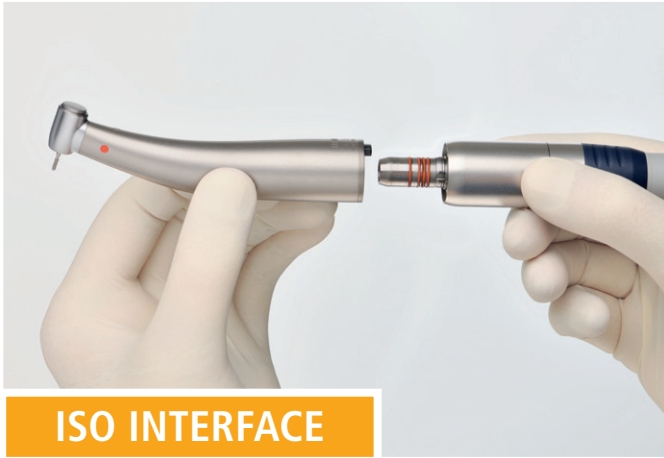

ISO INTERFACE

ライト付/無、どちらのISOマイクロモーターにも接続可能


快適性と耐久性のバランスに優れるコンフォートクラスのストレート&コントラアングル ハンドピース「T2ライン」。シロナならではの品質とノウハウを高次元で融合させた製品レンジです。その機能性と信頼性は、治療への集中を確実にサポートします。

- ISO規格のマイクロモーターに接続
- チタン製スリーブがもたらす快適なグリップ感
- ライト付/無、どちらもモーターにも接続可能なISOスライダー採用
- **2年保証**
- 施術野を鮮明に照らすファイバーオプティックライト
- 優れた耐滅菌性能



T2ライン テクニカルデータ

製品名	ギア比	最高回転数 (分)	ヘッド直径 (mm)	ヘッド高 (mm)	使用バー	REF.
T2ライン A 200 L	☀️ ● 1 : 5 (5倍速)	約200,000	9.7	15.2	直径1.6mmFG/バー	63 76 177
T2ライン A 40 L	☀️ ● 1 : 1 (等速)	約40,000	9.7	13.2	直径2.35mmCA/バー	63 76 185
T2ライン A 6 L	☀️ ● 6 : 1 (1/6減速)	約6,000	9.7	13.2	直径2.35mmCA/バー	63 76 193
T2ライン AH 40 L	☀️ ● 1 : 1 (等速)	約40,000	—	—	直径2.35HP/CA/バー	63 76 201

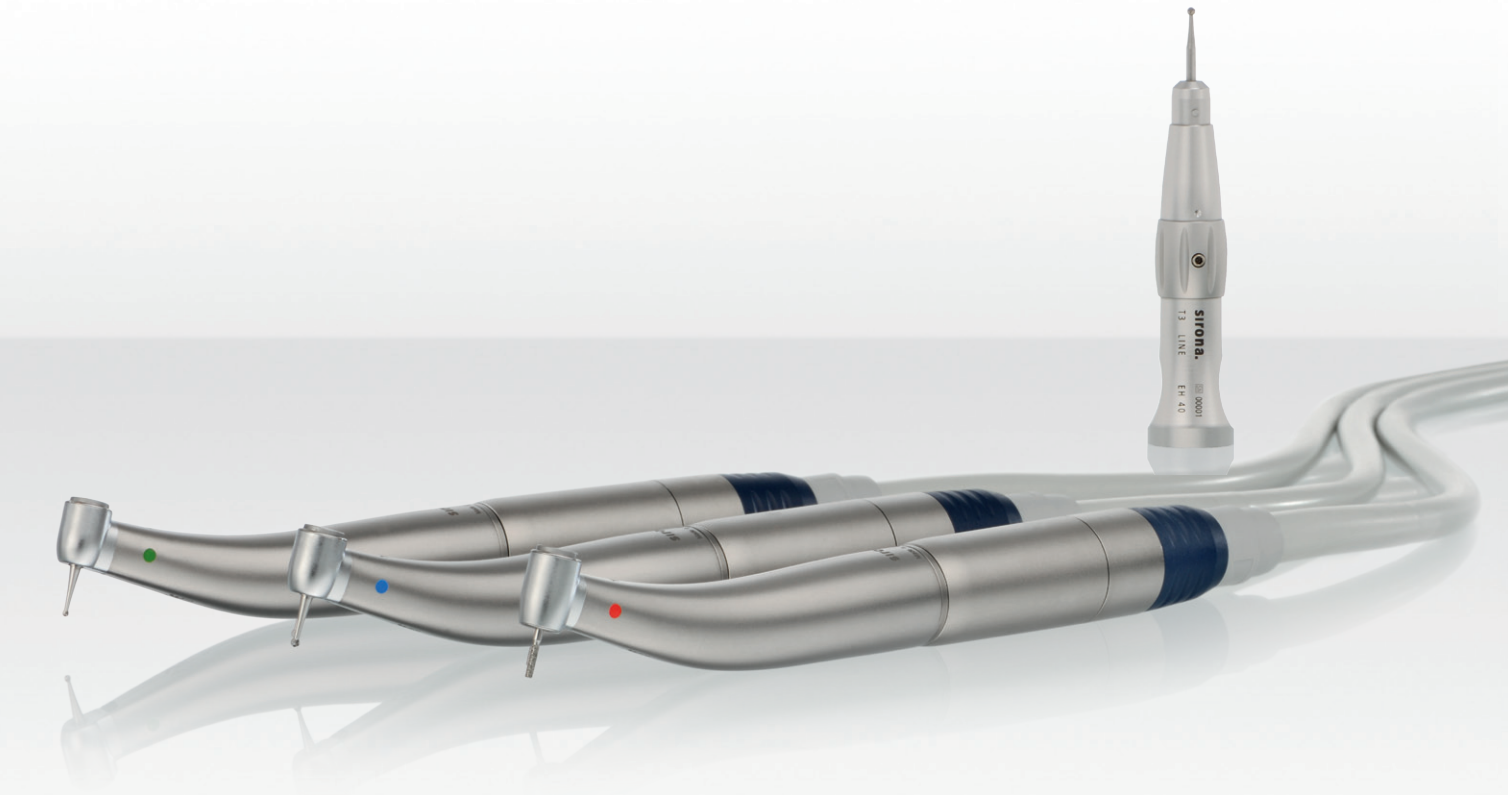

T3ライン – コストパフォーマンスを追求したエコノミークラス



ISO INTERFACE

ライト無ISOマイクロモーターに接続

高いコストパフォーマンスを提供するエコノミークラスのストレート&コントラアングル ハンドピース「T3ライン」。他のクラスと同様に耐久性に優れたチタン製スリーブを採用するT3ラインは長期に渡る満足を提供します。

- ISO規格の「ライト無」マイクロモーターに接続
- チタン製スリーブがもたらす高度な耐久性性能
- 優れた耐滅菌性能
- **1年保証**

*T3ラインシリーズは全て「ライト無し」です。
ライト付ISOマイクロモーターでもお使いいただけますが、ライトはつきません。

T3ライン テクニカルデータ

製品名	ギア比	最高回転数 (分)	ヘッド直高 (mm)	ヘッド高 (mm)	使用バー	REF.
T3ライン E 200	● 1 : 5 (5倍速)	約200,000	9.7	15.2	直径1.6mmFGバー	63 92 679
T3ライン E 40	● 1 : 1 (等速)	約40,000	9.7	13.2	直径2.35mmCA/バー	63 92 687
T3ライン E 6	● 6 : 1 (1/6減速)	約6,000	9.7	13.2	直径2.35mmCA/バー	63 92 695
T3ライン EH 40	● 1 : 1 (等速)	約40,000	–	–	直径2.35HP/CA/バー	63 92 711

特殊用途用 コントラアングル ハンドピース

プレミアムクラスの「T1ライン」シリーズには、歯間研磨用及び
根管治療用のハンドピースをご用意しています。



EVA 04L/11L
マイクロブレバレーション、歯間研磨用
専用チップの前後運動（ストローク：EVA 04Lは0.4mm、
EVA11Lは1.1mm）により、ポリッシングや余剰CRの除去に
有用。
また、回転式ハンドピースと異なり、切削溝や粗面を作ること
なく、平滑な研磨仕上げが可能のため、フィニッシングライン
の形成や隅角部の仕上げに大変便利。セレクトユーザー様には
特にお勧めです。



エンドL
根管治療用
ダブルチャックシステム採用により手用ファイル（手持部分直
径3.6～4.0mm）もエンジン用ファイル（ヘッド部直径
2.35mm）も使用可能な2-in-1タイプのハンドピース。
減速比 9.5：1、左右に30° ずつ計60° のツイスト運動。
ステンレスファイル専用。

T1ライン 特殊コントラ テクニカルデータ

製品名	ギア比	動作	使用インスツルメント	REF.
T1ライン EVA 04 L	☀ 2.5：1（減速1 / 2.5）	0.4mmの前後運動	デンタータス社EVAチップ	33 29 260
T1ライン EVA 11 L	☀	1.1mmの前後運動		41 77 015
T1ライン エンドL	☀ 9.5：1（1 / 9.5減速）	左右30° のツイスト	手用ファイル（直径3.6-4.0mm）、 エンジン用ファイル（直径2.35mm）	58 69 552



手にした瞬間に伝わるシロナ・クオリティ

機能性と信頼性:

ドイツのワークマンシップに裏打ちされた堅牢度と手に馴染む使い心地を実現するコンフォートクラス「T2ライン」。

機能性:

チタンが生み出すグリップ感とデザインのコンビネーションは、治療時の理想的な操作性を提供します。

耐久性:

セラミックボールベアリングが可能とするスムーズな回転と耐久性

長期に渡る優れたコストパフォーマンス

安定性と経済性:

経済性と品位を高次元で融合させたエコノミークラス「T3ライン」は、長期に渡り高い満足感を提供します。

安定性:

耐経年劣化に優れるチタン製スリーブ

経済性:

長期使用でのトータルなハイコストパフォーマンスを提供



シロナ タービン:

その高品質と機能性をワールドワイドな歯科医療シーンから支持されているシロナのタービン。歯牙に優しい回転スピードコントロール機能付きのT1/T2コントロールタービン、視認性と高回転が定評のT1/T2ミニタービン、知覚を刺激するパワーが自慢のシロブーストなど、治療形態に応じてお選び下さい。

- 快適なグリップ感と軽量なチタン製ボディー
- トルクフルな自動スピードコントロール機能 (T1/T2コントロール)
- 軽快な回転と視認性 (T1/T2ミニ)
- 高パワーと優れた軸ブレ精度 (シロブースト)
- サックバック防止機能

T1タービン

- 軽量なチタンボディー
- 人間工学デザイン
- セラミックボールベアリング

T2タービン

- チタンコーティングボディー
- 人間工学デザイン
- セラミックボールベアリング

シロブースト

- チタンコーティングボディー
- 22Wのハイパワー&優れた芯ブレ精度
- セラミックボールベアリング

タービン テクニカルデータ

テクニカルデータ	T1コントロール	T1ミニ	T2コントロール	T2ミニ	シロブースト
最高回転数 (分)	250.000 + 20 %	420.000 ± 10 %	250.000 + 20 %	400.000 ± 10 %	420.000 ± 10 %
ヘッド直径 (mm)	12.4	10.6	12.4	10.2	11.4
ヘッド高 (mm)	15.7	13.2	15.5	13.9	14.8
ライト有無	☀	☀	☀	☀	☀
量 (g)	約54	約53	約57	約55	約57
パワー (W)	約17	約14	約17	約14	約22
REF.					
シロナ クイックカップリング用	41 74 103	41 77 908	58 27 840	58 28 202	63 28 525
カボ マルチフレックスラックス用	54 56 202	54 56 210	58 27 857	58 28 210	63 34 390
ナカニシ バテラス用	-	-			63 34 416



コンビネーション・オートクレーブ

DACユニバーサル:

ハンドピース6本の洗浄（内外部）、注油、滅菌（内外部）がわずか12分で完了。短時間でのメンテナンス+確実な交叉感染防止は、患者毎の清潔なハンドピースの使用を可能とします。院内業務の効率化は勿論のこと、安心して日常業務に邁進できるとスタッフからも厚い信頼が寄せられています。

安全性:

- 洗浄・注油・滅菌がボタン一つの全自動
- オプションの専用プリンターで滅菌結果の記録が可能
- Lloyd's Resister Quality Assuranceの基準による ISO9001:2000及びISO13485:2003の認定済み

トータルクリーン:

- 温水と冷水による徹底した洗浄
- パルス洗浄により外部の頑固な汚れを除去

わずか12分で完了

- コストパフォーマンスに優れた短時間でのメンテナンス
- ミラーやカンシ等の固形インスツルメントを専用バスケットに入れば、洗浄・滅菌が10分で完了

DACユニバーサル テクニカルデータ:

テクニカルデータ	DACユニバーサル	REF.
リッド	ハンドピース用アダプター6個付	62 58 342
消費電力	1,100W	
水質	3 μ S以下の脱塩水又は精製水	
奥・幅・高(cm)	37/36/60（リッド上昇時）	
エア圧	5~8バール	
定期メンテナンス	3,000回または設置後2年（有償）	

クラスB滅菌器

DACプロフェッショナル:

小型高圧蒸気滅菌器のヨーロッパ基準EN13060のクラスB規格をクリアする歯科用オートクレーブ。チャンバー内の残留空気を抜き真空状態とすることにより、飽和蒸気が被滅菌物の隅々にまで浸透。従来では不十分であった中空製品（インプラント用インスツルメント、チューブ類）や繊維製品（ドレープ、ガーゼ類）など、あらゆる被滅菌物に対して、安全・確実にトップレベルの滅菌をします。

安全性:

- 電動ロック機構内蔵のスライドドア
- 堅牢なステンレスチャンバー
- EN13060、クラスBに準拠。ベルリン、ロベルト・コッホ研究所のRKIガイドラインに準拠

適応性:

- あらゆる被滅菌物の滅菌が可能
- 5種類の多彩なプログラム。クイックプログラムを選択すれば高度な滅菌が短時間で完了

利便性:

- ボタン4つのシンプル操作
- 給水5ℓで7回の滅菌が可能

DACプロフェッショナル テクニカルデータ

テクニカルデータ	DACプロフェッショナル	REF.
テクニカルデータ	DACプロフェッショナル	62 50 190
消費電力	1,960W、AC200V 50-60Hz	
水質	15 μ S以下の脱円錐又は精製水	
チャンバー	17ℓ	
奥・幅・高 (cm)	59.5/42.5/48.5	
定期メンテナンス	1,000回または設置後2年（有償）	



CAD/CAMシステム | ハンドピース | ハイジーンシステム | トリートメントセンター | X線システム

私たちシロナは、世界をリードする歯科医療機器専門メーカーをめざします。

シロナは、歯科診療用（CEREC）およびラボ用（inLab）CAD/CAMシステムから、ハンドピース、ハイジーンシステム、トリートメントセンター、X線システムまで、幅広い歯科医療機器の開発・製造を手がけています。シロナがめざすものは、よりよい診療と患者さんの満足のために、使いやすさと高い費用対効果を備えた高性能機器をお届けすることです。これにより、シロナはさまざまな場面での対応を実現し、より良い歯科診療の実現に向けてお手伝いいたします。

製造

Sirona Dental Systems GmbH
Bensheim, Germany

製造販売

シロナデンタルシステムズ株式会社

本社／〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

■ 支店・営業所

■ 札幌支店	Tel: 011-709-5800
■ 仙台支店	Tel: 022-266-4020
■ 東京支店	Tel: 03-5148-7895
■ 名古屋支店	Tel: 052-251-8467
■ 大阪支店	Tel: 06-6243-6636
■ 福岡支店	Tel: 092-518-1800
■ 盛岡営業所	Tel: 019-604-2340
■ 庄内営業所	Tel: 0235-29-1217
■ 静岡営業所	Tel: 054-653-2711
■ 広島営業所	Tel: 082-546-2301

www.sirona.co.jp

一般の名称: ストレートギアードアングルハンドピース
販売名称: シロナ モーターハンドピース
医療機器認証番号: 222AABZ100218000
分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般の名称: ストレートギアードアングルハンドピース
販売名称: T1ライン
医療機器承認番号: 22000BZX00818000
分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般の名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
販売名称: シロナタービンハンドピース
医療機器認証番号: 221AABZ100186000
分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般の名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
販売名称: シロブースト
医療機器認証番号: 224AABZ100009000
分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般の名称: 除染・滅菌用洗浄器
販売名称: DACユニバーサル
医療機器承認番号: 22000BZ100012000
分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器(設置)
一般の名称: 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
販売名称: DACプロフェッショナル
医療機器認証番号: 223AABZ100003000
分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器
* 改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。



BI 2001PD

The Dental Company

sirona