

新発売

特定保険医療
材料適用品

有床義歯保険点数(材料使用料)は
スルフォン樹脂と同じ。

未来への道しるべ——技術の

KDF

人体に優しく、しなやかさを追求した義歯床用熱可塑性レジンに

更なる「強さ」をプラスした

アクリショット®
ACRYSHOT New

発売元 株式会社 デンケン

製造販売元 株式会社 ビーエムジー



保険適用

▶ 義歯床用熱可塑性レジン（スルフォン）の保険点数が適用

割れにくい

▶ 耐衝撃性は従来品アクリショットの2倍以上

適合性向上

▶ 重合収縮が無いので、適合が良い

人に優しい


▶ 残留モノマーは従来の加熱重合レジン義歯床の約1/6と少なく、又、スルフォン樹脂の様に原料モノマーにビスフェノールAを含まないため、生体安全性が高い

優れた操作性

▶ チェアーサイドでの修理・リベース・調整が簡単に出来る

▶ 割れにくい

- ・口腔内模擬圧縮疲労試験より、
アクリルレジン義歯床と比べて
耐久性が高く、咬合圧による変
形も少なく、義歯の寿命が長い。
- ・耐衝撃性は従来品アクリショッ
トの2倍以上

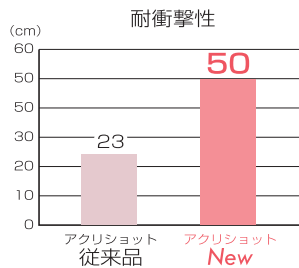

▶ 適合性向上

- ・重合収縮が無いので、適合が良い。
また、吸水性が少なく経年変化も少ない。



▶ 人に優しい

- ・残留モノマーは従来の加熱重合レジン義歯床の約1/6と少なく、
又、スルフォン樹脂の様に原料モノマーにビスフェノールAを
含まないため、生体安全性が高い。

	残留モノマー濃度 (%)
アクリショット	0.06
加熱重合レジン	0.36

・試料 (10×10×2mm) ・抽出溶媒としてメタノール・抽出温度50℃

▶ 仕様


形状	ペレット状	成分	ポリメチルメタクリレート、その他
包装	1kg		
販売名	アクリショット		
一般的名称	義歯床用熱可塑性レジン		
医療機器分類番号	管理医療機器		
医療機器届出番号	21600BZZ00025000		

色調	#0:クリアー	#2:ライトピンク	#7:ライブライトピンク	#8:ライブピンク

▶ 優れた操作性


優れた研磨性・滑沢性

熱可塑性レジンのため、切削が短時間で行える。また、艶だしも容易にできるので、研磨作業の効率がアップ。

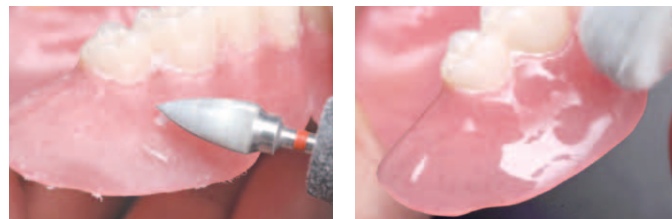

簡単な修理

即時重合レジンで修理ができ、リライニング材によるリベースが可能。

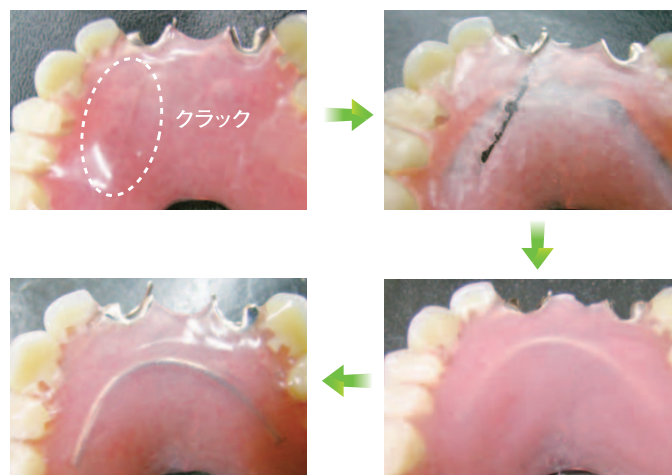

アクリショットの射出成型には、弊社製射出成型システム「レジナートシステム」が最適です。

万能射出成型システム

Resinart System

レジナートシステム



特許出願中/PAT.Pending

販売名	レジナート P108
一般的名称	歯科技工用成型器
医療機器届出番号	26B3X00010000027

販売名	レジナート m108four	レジナート m108two
一般的名称	歯科材料加温器	歯科材料加温器
医療機器届出番号	26B3X00010000028	26B3X00010000029



※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

●代理店

●販売元 ●製造販売業 許可番号 26B3X00010

株式会社 **デンケン** <http://www.kdf.co.jp/> Email denken@kdf.co.jp
denken CO.,LTD. 130 ISHIGOHRI-CHO OHYAKE YAMASHINA-KU KYOTO 607-8187 JAPAN
 Phone: 075-571-1000 Fax: 075-572-9000

■お問合せは

本社営業部 TEL.075-571-1000 FAX.075-572-9000
 東京営業所 TEL.03-3969-8000 FAX.03-3969-4567

福岡営業所 TEL.092-937-6907 FAX.092-937-6212
 西関東出張所 TEL.046-252-2244 FAX.046-252-2244

仙台営業所 TEL.022-234-4090 FAX.022-234-4094
 東京ショールーム (東日本支店 東京営業所内) TEL.03-3969-8000 FAX.03-3969-4567

ショールーム見学ご希望の方は、本社営業所へご連絡下さい。

※ お求めは、リース又はクレジットをご利用下さい。

当社取引リース会社/住信・松下フィナンシャルサービス株式会社



ISO 9001 Certified JQA-QM3873
 ISO 13485 Certified JQA-MC0024

【本社取得】

TEL.022-234-4090 FAX.022-234-4094

TEL.03-3969-8000 FAX.03-3969-4567

Vol.6.11.05 5,000