

歯科技工用 成形器&脱ろう/重合器 ドリーム・ツイン・システム

DREAM TWIN SYSTEM

NEW
PRODUCTS 2014

新しい「スタイル」のご提案! デンチャーワークの新領域へ

組み合わせ自由自在

現場のスタイルに最適な
ベストプランが選択可能!

歯科技工用 脱ろう/重合器「ツイン・キュア」、射出成形器「シングル・ジェット」、「ツイン・ジェット」を組み合わせ、現場のスタイルに合ったベストプランが選択できます。

専用に開発したマイクロプロセッサを
6基搭載。

簡単、確実に自動処理し、省力化・安心
をサポート。



SINGLE JET

シングル・ジェット

一般名称
歯科技工用成形装置
医療機器届出番号
26B2X10018000029



TWIN JET

ツイン・ジェット

一般名称
歯科技工用成形装置
医療機器届出番号
26B2X10018000030



TWIN CURE


ツイン・キュア

一般名称
歯科技工用重合装置
医療機器届出番号
26B2X10018000028



DREAM TWIN SYSTEM

組み合わせ自由自在！ 現場のスタイルに合ったベストプランが選択できます。

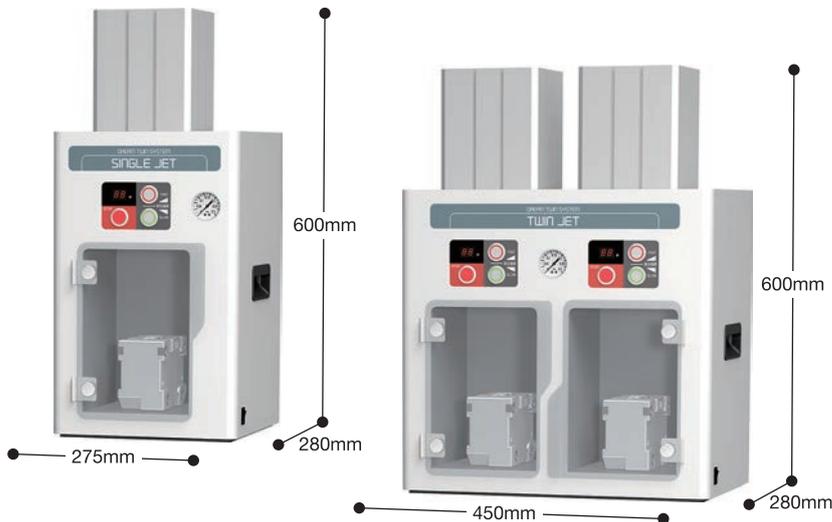

射出成形器「シングル・ジェット」「ツイン・ジェット」

- 熱可塑性樹脂、熱重合樹脂の射出に対応。
- ワンプッシュで動作を選択、自動処理の簡単操作。
- オプションの増圧器で安定した射出が可能。
- ドアを閉めないで動作しない安全設計。
- 射出圧力はレギュレーターで任意に設定可能。

仕 様		
電 源	シングル・ジェット	AC100V 20VA
	ツイン・ジェット	AC100V 30VA
※電源は脱ろう/重合器「ツイン・キュア」からも供給可能		
外形寸法	シングル・ジェット	W275×H600×D280 (mm)
	ツイン・ジェット	W450×H600×D280 (mm)
質 量	シングル・ジェット	27 kg (推定)
	ツイン・ジェット	35 kg (推定)
射出スピード	FAST	熱可塑性樹脂の成形用
	SLOW	熱重合樹脂の成形用

脱ろう/重合器「ツイン・キュア」

- フラスコ4個の脱ろうは、わずか15分で完了。
1時間で最大16個のフラスコを脱ろう出来ます。
- フラスコは分割法、無分割法に対応。
- ドリームフラスコを始め、他社の主要フラスコに対応。(出荷時オプション)
- 軽量&省スペースで、技工室を有効に使うことが出来ます。
- 分離剤塗布装置、自動乾燥モードを内蔵。
- 全てのモードはワンプッシュ動作。
- 電源投入後、約20分で準備が出来ます。
- 2槽を使用して、脱ろうと熱重合を同時処理可能。
- 本体左右にサイドテーブルを取付け可能。
- 熱可塑樹脂の溶解器をサイドテーブルに搭載可能。

仕 様		
電 源	AC200V単相 max 5kVA	
圧縮空気圧力	0.5~0.8MPa	
外形寸法	W760×H1090×D650 (mm) ※サイドテーブル含まず	
	W1090×H1090×D650 (mm) ※サイドテーブル含む	
質 量	85 kg (推定)	
処理槽数	2槽(1つの槽に2個のフラスコ処理可能)を使用して、1~4個のフラスコを同時処理	
タンク容量	蒸気タンク、温水タンク 各3.3リットル	
水の使用量	脱ろう1個の場合 約150mL	
動作モード	自動脱ろうモード	高温蒸気とホットプレートによるフラスコ加熱でワックスを短時間に溶解 高温蒸気、熱水の交互流るうによる完全自動脱ろう
	自動標準熱重合モード	高温蒸気、ホットプレートによる短時間熱重合が可能
	自動低温長時間重合モード	70°C程度の温度での低温長時間重合モードを搭載 蒸気、ホットプレートで適正な温度を保持 適合を左右する重合時の熱収縮を極限まで低減
	自動分離材乾燥モード	レジン分離材の自動乾燥モード/圧縮空気による自動乾燥
対応フラスコ	ジェットフラスコおよび他社主要フラスコに対応	
水の供給	専用の20リットル自動供給タンクまたは水道水から自動給水	
分離剤塗布	分離材タンク内蔵 専用ガンで分離材を簡単塗布、タンクへの分離材注入も簡単	



※外観・仕様につきましては予告なしに変更する場合があります。

●代理店

●販売元

●製造販売業 許可番号 26B2X10018

AVX エアウォーターグループ



デンケン・ハイデンタル株式会社 KDF事業部

http://www.kdf.co.jp

Email denken@kdf.co.jp

■お問合せは

西日本営業所 TEL 075-571-1000

FAX 075-572-9000

東日本営業所 TEL 03-3969-8000

FAX 03-3969-4567

福岡出張所 TEL 092-937-6907

FAX 092-937-6212

仙台出張所 TEL 022-234-4090

FAX 022-234-4094