

For better dentistry

DENTSPLY

歯科用シリコン印象材

**アクアジル
ウルトラ**

優れた親水性-細部の印象まで確実にキャッチ

MDM




デンツプライ三金株式会社

<http://www.dentsply-sankin.com>

Preparation

1. 印象採得

- コンタクト・アングルが小さいため、気泡の混入を最小限に抑え、支台歯や周囲の組織の精密な印象が取れます。
- 作業時間内はコンスタントなロー・フローなので、余裕をもってトレーを圧接することができます。
- 高い引裂強度で、薄いマージンも引き裂かれることなく撤去可能です。
- ミント・フレーバーで患者さんのストレスを和らげます。

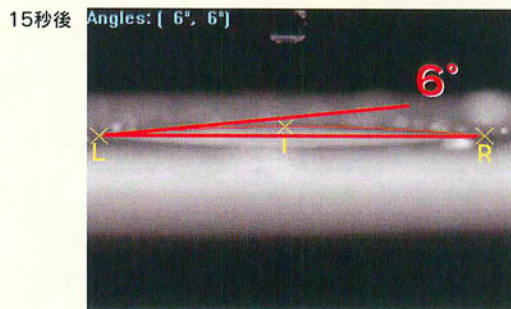

アクアジル ウルトラのコンタクト・アングル
(水の滴下より15秒後)

*コンタクト・アングル:硬化した印象材の上に、水滴を落とした場合に、印象材と水がなす角度。コンタクト・アングルが低いほど、親水性が高い。

Impression

2. 石膏注入

- 優れた親水性のため、石膏注入が容易です。
- 引裂強度が高いため、複数回の石膏注入が可能です。


Ultra Re
V
Ultra Im





種類・色調	トレー用				ウォッシュ用		
	パテ●	リジッド●	ヘビー●	モノフェーズ●	LV●	XLV●	
硬さ	パテ	ヘビー・ポティ	ミテラム・ヘビー・ポティ	ミテラム・ヘビー・ポティ	ライト・ポティ	エクストラライト・ポティ	
流動性	—	低い	やや低い	普通	高い	非常に高い	
症例	クラウン・インレー等	○	○	◎	○	◎	
	ブリッジ	○	○	◎	○	◎	
	デンチャー	○	○	○	◎(無歯顎印象等)	◎(有歯顎印象等)	◎(咬座印象等)
	インプラント	○	○	◎	○	◎	◎
操作余裕時間	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	
口腔内保持時間	約30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	

Restoration
a
impression

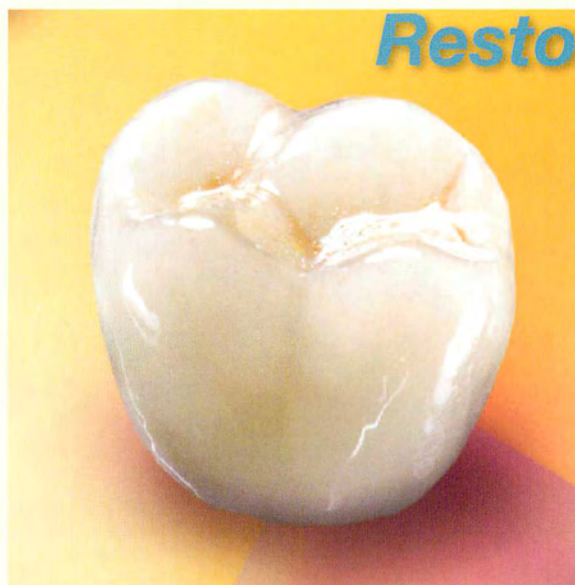

Restoration

4. 試適と最終補綴物

- 精密な修復物が完成します。

Laboratory



3. 技工作業

- 寸法安定性に優れているので、適合のよい補綴物ができます。
- 優れた親水性の印象材により、模型に精密なディテールが再現されます。




用途 歯科用精密印象採得

(社内資料)

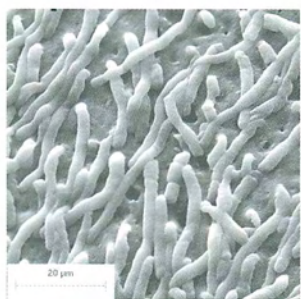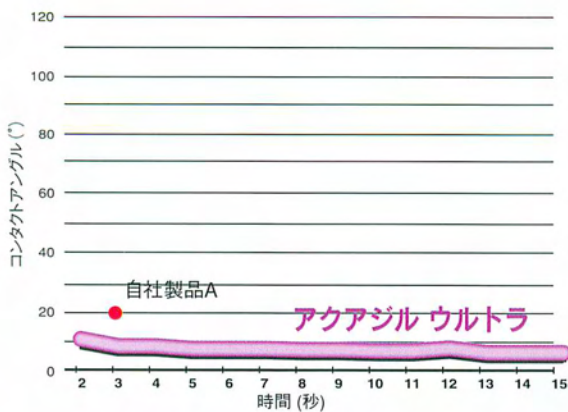

牛歯の象牙質の印象面。優れた親水性で象牙細管まで入り込み、撤去しても印象は引き裂かれていないことが確認された。

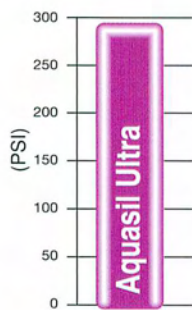

高い引裂強度

医療機器許可番号09BY0008

優れた親水性

1 親水性に優れているため、濡れている状態でも、気泡や空隙の混入を抑え、支台歯や歯肉溝の細部まで精密な印象採得が可能です。また、この性質は石膏を印象に注水する際にも有効です。

高い引裂強度

2 引裂強度が強いため、印象撤去の際もマージン部がちぎれることはありません。

操作性

3 作業時間中は低粘度を保つように設定されています。トレー用印象材とウォッシュ印象材がなじみ、再印象のリスクが少なくなります。

5種類の粘度

4 リジッド、ヘビー、モノフェーズ、LVおよびXLVの5種類をご用意いたしました。テクニックおよび症例に合わせて適切な粘度のものが選択可能です。また、パテもご利用頂けます。

さわやかな香り

5 ミントフレーバーを付与しています。患者さんに快適な治療をしていただけます。

仕様

名称 **アクアジル ウルトラ**
用途 歯科用精密印象採得

品番	名称	包装単位	価格
678120	アクアジル イージーミックス パテ	ベース(320ml)・キャタリスト(320ml)・計量用スプーン X2	¥7,500
678768J	アクアジル ウルトラ XLVRS 単品	カートリッジ X4本・(ベース、キャタリスト50ml)・サンキンミキシングチップ X12本	¥9,600
678771J	アクアジル ウルトラ LV RS 単品	カートリッジ X4本・(ベース、キャタリスト50ml)・サンキンミキシングチップ X12本	¥9,600
678773J	アクアジル ウルトラ モノフェーズRS 単品	カートリッジ X4本・(ベース、キャタリスト50ml)・サンキンミキシングチップ X12本	¥9,600
678775J	アクアジル ウルトラ ヘビーRS 単品	カートリッジ X4本・(ベース、キャタリスト50ml)・サンキンミキシングチップ X12本	¥9,600
678777J	アクアジル ウルトラ リジッドRS 単品	カートリッジ X4本・(ベース、キャタリスト50ml)・サンキンミキシングチップ X12本	¥9,600
678351	カートリッジディスペンサーN	1個	¥13,200
626155	トレー アドヒーズ(14mL)	1本	¥1,270
N15120080783	サンキンミキシングチップN	48個	¥5,000

表示価格は、2009年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場/〒324-0036 栃木県大田原市下石上1382番11

東京本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10

札幌/TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋/TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155
 仙台/TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪/TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374
 東京/TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡/TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880
 関東/TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 発注センター/TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

0120-789-123

FAX: 0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>