

For better dentistry

**DENTSPLY**

歯科用シリコン印象材  
**アクアジル ウルトラ**  
**B4**

MDM

  
**Aquasil Ultra**  
SMART WETTING IMPRESSION MATERIAL

  
**digit**  
Targeted Delivery System

  
**B4**  
PRE-IMPRESSION SURFACE OPTIMIZER



優れた親水性で、細部の印象まで  
確実にキャッチ



6年連続 REALITY's CHOICE 受賞  
※「REALITY」は米国の歯科材料研究評価専門誌

デンツプライ三金株式会社  
<http://www.dentsply-sankin.com>


B4



B4は、アクアジルウルトラの能力を最大限に引き出します。



アクアジルウルトラで印象を採得する前に、B4を被印象面に塗布し、均一になるようにエアでかるくなじませてください。

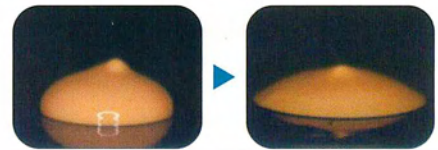


B4を処置することで、表面張力が低下します。

1. 象牙質、エナメル質、チタン、レジンなど、あらゆる物質のぬれ性を向上させる為、症例を選ばずに、安定した精度の高い印象採得が可能です。
2. B4が潤滑材としても機能するため、硬化後の印象材が口腔内から除去しやすくなり、患者さんへの負担も軽減できます。
3. アクアジルウルトラのもつ良好なフローがさらに増しますので、通法では入りづらい歯肉縁下、わずかな隙間へも入り込みます。


■ 未処置



■ B4処置

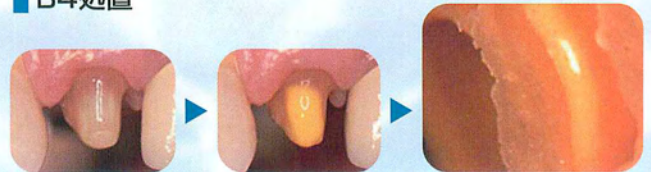

■ 大白歯象牙質平坦面左半分にI級窩洞を形成し、レジンコア材を充填した。歯牙にはエナメル質、象牙質、レジンコア材の3つの異なるコンポーネントが含まれている。

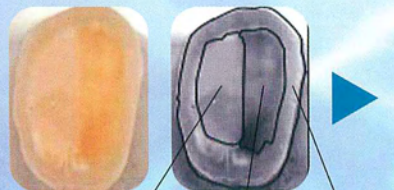

レジンコア 象牙質 エナメル質

■ 写真左は、未処理。写真右には、B4を処置した。どの物質の表面においても処置後にフローが増しているのがわかる。



歯科用シリコーン印象材

# アクアジル ウルトラ

**Aquasil Ultra**  
SMART WETTING IMPRESSION MATERIAL

MDM

アクアジルウルトラ、優れた親水性で精密な印象を実現。



**digit™**

Targeted Delivery System

シリンジ感覚で簡単に使えるdigit (ディジット) も新たに追加。無駄なく使えて、しかも衛生的です。



\* S: 1.6ml入 1~2歯  
L: 2.4ml入 3~4歯  
が目安です。

1. 親水性に優れているため、気泡・空隙の混入が最小限に抑えられ、精密な補綴物が製作可能です。
2. 引裂強度が強く、印象撤去の際もマージン部がちぎれるリスクを軽減します。
3. 作業時間中は低粘度を保つように設定されています。  
トレー用印象材とウォッシュ用印象材がなじみ、再印象のリスクが少なくなります。

種類・色調	トレー用				ウォッシュ用		
	パテ	リジット	ヘビー	モノフェーズ	LV	XLV	
硬さ	パテ	ヘビー・ボディ	ミディアム・ヘビー・ボディ	ミディアム・ヘビー・ボディ	ライト・ボディ	エクストラ・ライト・ボディ	
症例	流動性	—	低い	やや低い	普通	高い	非常に高い
	クラウン・インレー等	○	○	◎	○	◎	◎
	ブリッジ	○	○	◎	○	◎	◎
	デンチャー	○	○	○	◎ (無歯顎印象等)	◎ (有歯顎印象等)	◎ (咬座印象等)
	インプラント	○	○	◎	○	◎	◎
操作余裕時間	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	
口腔内保持時間	約30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	

※ MDMとは、Modern Dental Management の略であり、デンツプライ三金社および同社インストラクターの選考により、“環境にやさしい”、“先端技術を使用”、または“近年のモダンな医院にフィットする”など、プレミアムな商品群につけられる名称です。



アクアジル ウルトラ

商品番号	商品名	価格
678171	アクアジル ウルトラ B4 イントロキット モノフェーズ	¥ 9,800
678173	アクアジル ウルトラ B4 イントロキット リジット	¥ 9,800
678175	アクアジル ウルトラ B4 イントロキット ヘビー	¥ 9,800

内容

- モノフェーズ / リジット / ヘビー (ベース及びキャストリスト: 50ml) : 2個 ● XLV, LV: 各1個
- ミキシングチップ: 12本 ● digit XLV: ラージ 1個 スモール 2個 ● digit LV: ラージ 1個 スモール 2個
- digit ミキシングチップ: 6個 ● digit 口腔内注入用チップ: 6個 ● B4 (6ml)
- トレーアドヒューシブ (14ml) : 1個 ● アプリケーターチップ: 50本 ● ダッペンディッシュ: 1個

医療機器認証番号: 221AFBZX00079000

商品番号	商品名	価格
678768J	アクアジル ウルトラ XLV RS 単品	¥ 9,600
678140J	アクアジル ウルトラ XLV RS 単品: B4入	¥ 12,000
678771J	アクアジル ウルトラ LV RS 単品	¥ 9,600
678130J	アクアジル ウルトラ LV RS 単品: B4入	¥ 12,000
678773J	アクアジル ウルトラ モノフェーズ RS 単品	¥ 9,600
678775J	アクアジル ウルトラ ヘビー RS 単品	¥ 9,600
678777J	アクアジル ウルトラ リジット RS 単品	¥ 9,600

内容	● XLV / LV (ベース及びキャストリスト: 50ml) : 4個 ● ミキシングチップ L: 12本 * B4入【 B4 (6ml) / アプリケーターチップ: 50本 / ダッペンディッシュ: 1個】
----	--

医療機器認証番号: 221AFBZX00079000

商品番号	商品名	価格
678040	アクアジル ウルトラ digit LV (S)	¥ 12,000
678240	アクアジル ウルトラ digit LV (S) : B4入	¥ 14,400
678041	アクアジル ウルトラ digit LV (L)	¥ 14,000
678241	アクアジル ウルトラ digit LV (L) : B4入	¥ 16,400
678043	アクアジル ウルトラ digit XLV (S)	¥ 12,000
678242	アクアジル ウルトラ digit XLV (S) : B4入	¥ 14,400
678044	アクアジル ウルトラ digit XLV (L)	¥ 14,000
678243	アクアジル ウルトラ digit XLV (L) : B4入	¥ 16,400

内容	● digit LV (S / L) / digit XLV (S / L) (ベース及びキャストリスト S: 1.6ml / L: 2.4ml) : 50個 ● digit ミキシングチップ: 50個 * B4入【 B4 (6ml) / アプリケーターチップ: 50本 / ダッペンディッシュ: 1個】
----	--

医療機器認証番号: 221AFBZX00079000

商品番号	商品名	価格
678782	アクアジル ウルトラ DECA モノフェーズ RS	¥ 22,000
678786	アクアジル ウルトラ DECA ヘビー	¥ 22,000

内容	● DECA モノフェーズ / DECA ヘビー (ベース及びキャストリスト 380ml) : 2個 ● DECA ミキシングチップ: 20個 ● ロッキングリング: 1個
----	---

医療機器認証番号: 221AFBZX00079000

商品番号	商品名	価格
678120	アクアジル イージーミックスパテ	¥ 7,500

内容	● ベース (320ml) ● キャスタリスト (320ml) ● 計量スプーン: 2個
----	--

医療機器認証番号: 221AFBZX00079000

関連商品

商品番号	商品名	価格
678020	digit シリンジディスペンサー: 2本入	¥ 2,000
678003	digit ミキシングチップリフィル: 50個入	¥ 3,800
678006	digit 口腔内注入用チップ: 50個入	¥ 1,800
678950	DECA ミキシングチップ: 50入	¥ 5,000
276000-3000	デュオミックス (印象自動練和器) : 1台	¥ 210,000

医療機器届出番号: 0981X00005Y00230

表示価格は、2009年10月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

ご用命は

製造  
販売元

**デンツプライ三金株式会社**

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌 / TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋 / TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155  
 仙台 / TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪 / TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374  
 東京 / TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡 / TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880  
 関東 / TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 鹿児島 / TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター  
 受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)



0120-789-123

FAX:0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>