

For better dentistry

DENTSPLY

歯科用象牙質接着材

クシーノJP

XENO JP

テクニックエラーの少ない1液性ボンディング材



歯面の湿潤環境に
影響されない

エアブロー圧の
影響を受けにくい

フッ素徐放性

デンツプライ三金株式会社

<http://www.dentsply-sankin.com>


テクニックエラーの少ない1液性ボンディング材です。

特徴1

歯面の湿潤環境に影響されない

歯面はウエットな状態でも、ドライな状態でも高い接着強さが得られます。

歯面の湿潤状態と牛歯引張接着強度

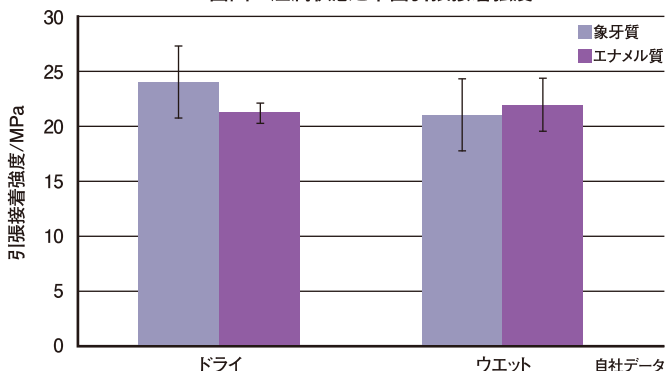

特徴2

エアブロー圧の影響を受けにくい


乾燥は、マイルドなエアブローでテクニカルセンシビティはほとんどありません。

特徴3


フッ素徐放性

塗布後200日を経過してもフッ素徐放性を有しています。


積算フッ素徐放量

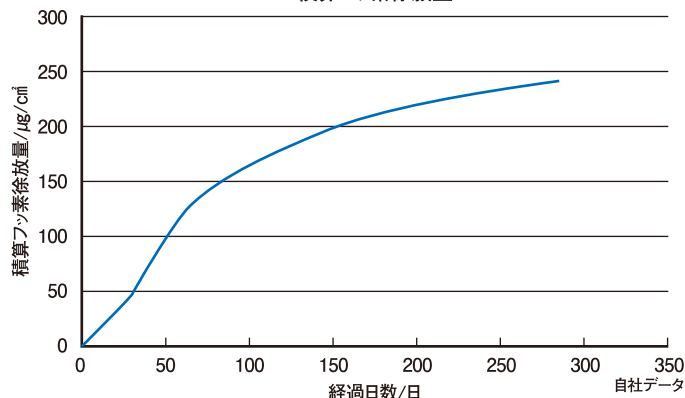


使用手順

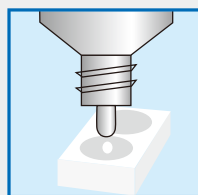


ボトルを垂直にし、ダッペンディッシュに適量を滴下してください。

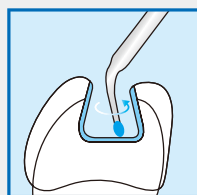

添付のマイクロブラシで塗布してください。

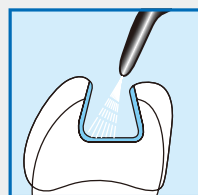

20秒間放置後、軽くエアで2~3秒間乾燥してください。

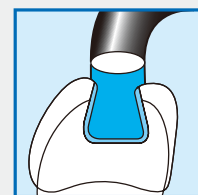

光重合10秒。

症例紹介



写真提供: 虎の門病院 山田敏元 先生

クシーノ JP

◆セット

製品番号	N12270010210
製品名	クシーノJP セット
内容	クシーノJP(4.5ml) マイクロブラシ(50本) ダッペンディッシュ(1個) ステップカード(1枚)
価格	7,800円

◆単品

製品番号	N12270010211
製品名	クシーノJP 単品包装
内容	クシーノJP(4.5ml)
価格	6,800円

※クシーノJPは、環境への配慮から、セット品・単品ともにゴミの少ない包装を採用しております。

医療機器認証番号: 220AGBZX00310000

表示価格は、2011年1月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌 / TEL: 011-222-4101 FAX: 011-222-2344 名古屋 / TEL: 052-452-2151 FAX: 052-452-2155
 仙台 / TEL: 022-373-5700 FAX: 022-373-5133 大阪 / TEL: 06-6386-9350 FAX: 06-6386-9374
 東京 / TEL: 03-5114-1002 FAX: 03-5114-1036 福岡 / TEL: 092-411-6326 FAX: 092-472-3880
 関東 / TEL: 03-5114-1003 FAX: 03-5114-1036 会社ター / TEL: 03-5114-1025 FAX: 03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター
 受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く) **0120-789-123** FAX: 0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>