

For better dentistry

**DENTSPLY**

歯科用象牙質接着材  
**XPボンド**

**XPBOND**  
... for eXtra Performance

操作がシンプルな  
エッチアンドリンスシステム



デンツプライ三金株式会社  
<http://www.dentsply-sankin.com>

# 歯科用象牙質接着材 XPボンド

特徴  
**1**

エッチング後の  
被着面の処理が容易

エッチング処理後の被着面の水分の量が多くても、  
少なくとも十分な接着強さです。

特徴  
**2**

シンプルな操作の  
1度塗り

1度塗りでも十分な接着強さです。

特徴  
**3**


長い操作余裕  
時間

クリックスディッシュに滴下後、ふたを  
閉じた状態で15分間保存可能です。


## SEM画像

象牙質にXPボンドを接着した接着界面\*1

■ 適度な湿潤状態

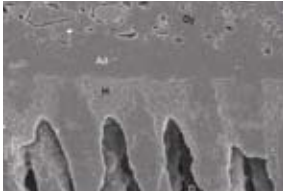

■ 過度な乾燥状態\*2

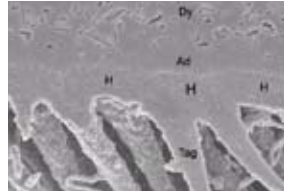


適度な湿潤、過度な乾燥状態  
ともにレジスタグ、ハイブリットレ  
イヤーが形成されている。


\*1 試験体をSEM観察前に酸で処理  
\*2 過度な乾燥状態:エアブローで10秒乾燥  
Ad:ボンディング層、H:ハイブリッドレイヤー、  
Tag:レジスタグ、D:象牙質、Dy:充填材

## 接着強さ

XPボンド1度塗りでの象牙質接着強さ

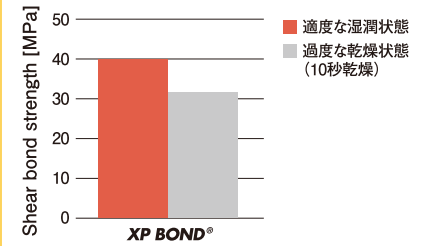

## 使用手順

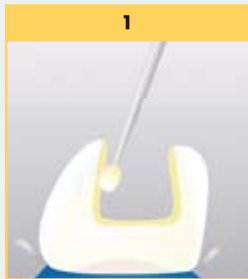

1 通法どおりエッチング処理した後、  
湿潤状態の窩洞表面にXPボンド  
を塗布してください。



2 20秒間放置してください。



3 5秒間エアをかけて、  
乾燥してください。



4 10秒間、光照射をしてください。

## XPボンド

製品名	XPボンド
製品番号	60667281
価格	¥15,800
内容	XPボンド (5ml)、アプリケーターチップ(50本)、 クリックスディッシュ、使用手順書



医療機器認証番号:222AABZX00223000

## 関連製品

製品名	デンツプライ エッチングジェル
製品番号	N12277773005
価格	¥3,000
内容	デンツプライ エッチングジェル(8g) ディスボチップ (5本)

医療機器認証番号:21300BZZ00234000

表示価格は、2011年3月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造  
販売元

**デンツプライ三金株式会社**

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌 / TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋 / TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155  
仙台 / TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪 / TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374  
東京 / TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡 / TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880  
関東 / TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 会社ター / TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター  
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)



0120-789-123

FAX:0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>

1103200KP