



銀歯から白い歯へ!

歯科接着用レジンセメント
スマートセム Z冠

セルコンZ冠の装着を、より確実に!


安心の接着力と
容易な余剰セメントの除去を実現しました



スマートセムZ冠

スマートセムZ冠は、セルコンZ冠専用の接着性レジンセメントです。以下の使用手順に従ってご使用ください。

Z冠接着操作法

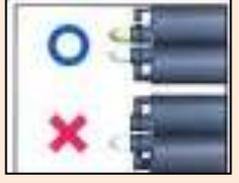- ①  歯面にエッチング材を塗布し15秒から30秒間放置後水洗し乾燥させます。
- ②  クシーノJPを適量ダッペンディッシュに滴下します。
注1)
- ③  全体にまんべんなく塗布し20秒間放置します。
- ④  2~3秒間エアブローで揮発成分を飛ばします。
- ⑤  10秒間光照射します。
- ⑥  スマートセムの2つのペーストが均一に出るまでピストンを押し出します。
- ⑦  練和紙に、等量のペーストを押し出しスパチュラで20秒間練和します。注2)
- ⑧  修復物被着面にセラミックプライマー処置の後スマートセムを塗布し装着します。
- ⑨  浮き上がりに注意して圧接し装着物が動かないよう押さえます。注3)、注4)
- ⑩  練和後2~3分で余剰セメントを取り除き、セメントラインと修復物全体に10秒以上光照射します。

注1) クシーノJPは、デンツプライ三金(株)が製造販売するセルフエッチングタイプの1液型歯科用象牙質接着材です。

注2) 練和は、ペーストが均一に混ざるよう、確実に行ってください。

注3) 練和開始より、90秒以内に、修復物を装着するようにしてください。

注4) 過酸化水素水、次亜塩素酸ナトリウム含有材は、硬化阻害の恐れがありますので併用を避けてください

仕様

名称: **スマートセムZ冠 スタートキット**

包装: デュアルバレルシリンジ(ベース2.7ml, キャタリスト2.7ml) 2本
スパチュラ 2本、練和紙(100枚綴)1冊、Z冠接着操作カード1枚

品番/ 価格 : 品番 N12270010102Z 価格 ¥9,660

医療機器認証番号: 218AIBZX00042000

名称: **スマートセムZ冠 イントロキット**

包装: デュアルバレルシリンジ(ベース2.7ml, キャタリスト2.7ml) 1本
スパチュラ 1本、練和紙(100枚綴)1冊、Z冠接着操作カード1枚

品番/ 価格 : 品番 N12270010103Z 価格 ¥6,300

医療機器認証番号: 218AIBZX00042000

名称: **スマートセムZ冠 リフィル**

包装: デュアルバレルシリンジ(ベース2.7ml, キャタリスト2.7ml) 2本

品番/ 価格 : 品番 N12270010104Z 価格 ¥8,750

医療機器認証番号: 218AIBZX00042000

関連製品



歯科用エッチング材
デンツプライエッチング

包装: デンツプライエッチングジェル 3.5ml 1本
専用オーラルチップ

品番/ 価格 : 品番 N12277773005 価格 ¥3,000

医療機器認証番号: 21300BZZ00234000




歯科用象牙質接着材
クシーノJPセット

包装: クシーノJP (4.5ml) 、マイクロブラシ(50本)
ダッペンディッシュ(1個) 、ステップカード(1枚)

品番/ 価格 : 品番 N12270010210 価格 ¥7,000

医療機器認証番号: 220AGBZX00310000

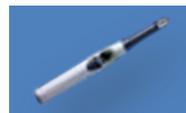

歯科重合用光照射器
スマートライトMAX

包装: スマートライトMAX ハンドピース1本
LEDプローブ1個 、充電器、ACアダプター
アイプロテクション、ディスプレイバリアスリーブ

品番/ 価格 : 品番 6440051 価格 ¥80,000

医療機器届出番号: 09B1X00005Y03550

表示価格は2012年6月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上1382番11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10

札幌/ TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344
仙台/ TEL:022-375-5700 FAX:022-375-5133
東京/ TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036

名古屋/ TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155
大阪/ TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374
福岡/ TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880
受注サービス/ TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

<http://www.dentsply-sankin.com>