


患者様に新たな提案を!

キャラクタースナップ第一弾
“楽しい矯正治療”のために



かわいい! ハローキティ スナップ

見せたくなるただのおしゃれ
アイテムではありません。
ハローキティスナップの使用
により、セルフ／ノンセルフ
ライゲーション自由自在。

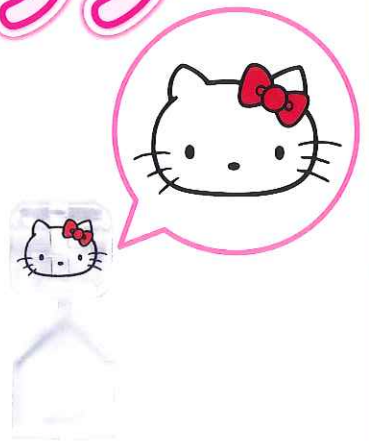

ハローキティ スナップの装着と撤去方法

装着



ハローキティ スナップを
プライヤー等で把持します。



歯頸部側のウイングに掛けます。



歯面に押し付けるように切端側の
ウイングに掛けます。



回転させてホームベースを
撤去してください。

撤去

スロット上でバーティカルバーを切断してください。

その際、スロットが開いてしまうような無理な力が掛からないようにご注意ください。

バキュームで吸い込みながら切断すると切断したハローキティ スナップの回収が簡単です。



カッターで撤去します。



先端の小さいピン
カッター等で撤去します。



クリアスナップカッターで
撤去します。

一症例キット(1-1)				品 番	標準価格(円)
キティスナップ クリア		2個入	ロスタイプ用	740-0101C	700

キティスナップホワイトも近日発売予定。

医療機器認証番号: 224AGBZX00027000

販売名: キャラクタースナップ

色々なところにかわいいハローキティ!

ハローキティ コラボ製品

リテナー保管ケース

ハローキティ リテナーケース

- ♡ かわいいハローキティをケースにデザイン
- ♡ ケースは、ピンク・ブルー・グリーンの3色1セット



好評発売中

色 / 個数	品番	標準価格(円)
ピンク・ブルー・グリーン / 12個 (各色4個入り)	RC-55ANMC-EU-KY	3,000

*寸法: (外寸)タテ83mm×ヨコ80mm×高さ39mm *包装: 12個 (各色4個入り)

鉛フリー X線防護用エプロン

スーズガードエア ハローキティ

- ♡ 鉛フリーのため患者様、医療従事者様、環境にやさしい
- ♡ 25%軽量化*、患者様の肩にやさしい *弊社従来品との比較



好評発売中

医療機器届出番号: 09B1X00005Y00290

タイプ	色	対象	品番	標準価格(円)
 レギュラー パノデュアル	バターカップイエロー	大人	86-8049HK	27,400
	バターカップイエロー	子供	86-8048HK	24,900
	ライトブルー		86-11048HK	24,900
	バターカップイエロー		86-8055HK	38,400

*すべてカラー(襟)のないタイプです。 *包装: 1着/箱

歯科用象牙質接着材

クシーノJP ハローキティ *iY products*

- ♡ 歯面の湿潤環境に影響されないため、ウェットでも、ドライでも高い接着力を発揮
- ♡ エアブロー圧の強弱や処理時間による影響が少なく、手軽に安定した接着力を発揮
- ♡ 生産コストの大幅削減により、高性能・低価格を実現
- ♡ 歯の強化を目指し、歯面およびその周辺にフッ素イオンを供給するフッ素徐放性を付与



好評発売中

ステップカードストッパー付き

医療機器認証番号: 220AGBZX00310000

製品名	品番	標準価格(円)
クシーノJP ハローキティ	N12270010220	7,000

*内容物: クシーノJP 4.5mL、マイクロブラシ(50本)、ダッペンディッシュ(1個)、ステップカード、ハローキティ ステップカードストッパー



iY products (いい製品、より安く)

高性能でありながら、コストの低減を実現し、大幅に価格を抑えた製品群につけられた、デンツプライ三金社独自のロゴ。

表示価格は、2012年8月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

© '76, '12 SANRIO APPR. No.G530562

For better dentistry

DENTSPLY

カスタマー・サービス・センター

0120-789-123

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

東京本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10

1209020KP