



duomix II

シリコン印象材自動練和器

デュオミックス II



duomix II

- ターボモードの選択で、練和時間の短縮
- 自動で戻るプランジャー機能で、簡単操作
- 残量や、残り1回の使用量が分かる見やすいパネル設計

For better dentistry

DENTSPLY

## 1 練和時間の短縮

通常のスPEEDモードに加え、倍の速さで押し出すターボモードを選択できるようになり、手早く均一な印象材の準備が可能になりました。



**ST** スタンダードモード  
通常のスピードで印象材を押し出すモードです。



**ターボモード**  
通常の2倍のスピードで印象材を押し出すモードです。

## 2 簡単操作

印象材の使いきりを検知し、自動で戻るブランジャー機能により簡単にカートリッジの交換作業が出来ます。



カートリッジの残量がわかるインジケーター

通常の1/2のスピードで印象材を押し出します。シリンジへの移し替えの際に便利です。

## 3 見やすいパネル設計

残量インジケーターと、残り1回分の使用をお知らせするパイロットランプにより、カートリッジの残量と、交換の時期をいつでも確認できます。

### 全顎トレー1個に印象材を盛る際のスピード比較



デュオミックス IIなら従来の約半分の時間で印象材の準備が可能

デュオミックス II

22秒

当社従来機器

41秒

\*ターボモード使用時の目安です

### 1mlあたりの材料コスト比較



DECAなら50mlカートリッジに比べて約40%も経済的

アクアジル ウルトラ DECA  
380mlカートリッジ

29円

アクアジル ウルトラ 50ml  
カートリッジタイプ

48円

## ◆仕様

医療機器届出番号：09B1X00005Y03500

電 圧	消費電力	サイズ(高さ×幅×長さ)	重量	価 格
100 V , 50/60Hz	280VA	330 × 190 × 380 mm	7.0 Kg	¥ 120,000

## 関連製品



アクアジル ウルトラ DECA モノフェーズ  
380ml × 2本, ミキシングチップ20入  
ロッキングリング1個

¥ 22,000



アクアジル ウルトラ DECA ヘビー  
380ml × 2本, ミキシングチップ20入  
ロッキングリング1個

¥ 22,000



アクアジル ウルトラ LV / XLV  
ヘビー / モノフェーズ / リジット  
50 ml × 4本, ミキシングチップ12入

¥ 9,600



アクアジル ウルトラ digit LV(S)・(L)  
/ XLV(S)・(L) 各50本入  
ミキシングチップ50入, オーラルチップ50入  
(S) : ¥ 12,000 (L) : ¥ 14,000

医療機器認証番号: 221AFBZX00079000

\*表示価格は2012年10月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

\*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製 造  
販 売 元

## デンツプライ三金株式会社

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上1382番11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10

札幌/TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋/TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155  
 仙台/TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪/TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374  
 東京/TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡/TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880  
 受注サービス/TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

<http://www.dentsply-sankin.com>