

“アメリカで生まれたホワイトニングシステム”

NITE ホワイト

エクセル

白い歯、いいね！



For better dentistry

DENTSPLY
SANKIN

アメリカで生まれた ホワイトニングシステム




NITEホワイト・エクスセルは、審美歯科の先進国アメリカで生まれたホワイトニングシステムです。『白くきれいな歯』への意識の高いアメリカで高いシェアを保有しており、日本においても、すでに10年以上の臨床実績をもつホワイトニングシステムです。

NITEホワイト・エクスセルは、受診者の歯列にフィットしたマウストレーにホワイトニングジェルを用いて使用します。1日2時間の使用で、およそ2週間という短い期間で着色歯面の改善を行うことが可能です。(効果は個人差や飲食嗜好習慣等によって異なります。)

NITEホワイト・エクスセルの主成分である過酸化尿素は歯面への刺激が少なく、受診者の自由な時間に合わせてご使用頂くことができます。

NITEホワイト・エクスセルを使用することにより、主に加齢による着色、喫煙等外因性による着色、遺伝による着色が改善されます。「後戻り」が少なく効果の持続が期待できます。

NITEホワイト・エクスセルのホワイトニングメカニズム

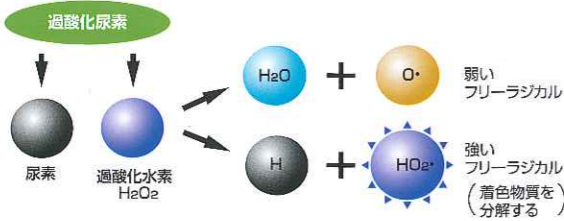

口腔内で化学分解された酸素基がエナメル質や象牙質に浸透し、着色部分だけに作用するため、歯牙の構造を変えずに色調を明るくすることができると考えられています。(左記参照)

Ronald E. Goldstein, DDS David A. Garber, DMD 著
"Complete Dental Bleaching"より引用

NITE ホワイト・エクスセルの使用方法

- 1** インフォームドコンセントを行い、ホワイトニングについて注意事項の説明をします。
- 2** 口腔内全体の診査をします。この時にホワイトニングの適応症かどうかを判断してください。
- 3** ホワイトニングの前処置として口腔内全体の除石・清掃を行います。
- 4** ホワイトニング前の状態でシェードの診査を行い、色調を記録します。
- 5** 口腔内撮影用カメラ等を用いてホワイトニング前の状態を記録します。
- 6** ホワイトニングする歯列の印象採得を行い、マウストレーを作製します。マウストレー作製後、患者に試着を行い変形がないことを確認してください。
- 7** マウストレーにホワイトニング材を注入し、患者の口腔内で試着を行います。
- 8** ホワイトニングは1日2時間以内で、期間は2週間以内となるように患者に指導してください。また、3日に一度は来院させ、トレーの変形・予後の確認をしてください。

ホワイトニング商品一覧 | NITEホワイト・エクスセル キット販売

商品コード	NITEホワイト・エクスセル イントロキット
N1NWE1401	¥39,400



- (キット内容)
- ホワイトニングジェル(シリンジ) 3g×4本
 - シリンジ用チップ(トレー注入用) 4個
 - トレーケース(トレー保存用) 1個
 - EVAシート(トレー作製用) 2枚
 - シェードガイド 1枚
 - NITEホワイトポーチ 1個

- 患者用小冊子(20枚入)
- 患者用小冊子スタンド
- 消費者向けバーチャルホワイトニング体験スマホサイトでのクリニック登録用認定カード
- ポスター(カラー1枚)
- ポスター(モノクローム3枚入)



- 消費者向けバーチャルホワイトニング体験スマホサイトでのクリニック登録用認定カード

※NITEホワイト・エクスセル ジェルの有効期間は米国にて製造時から2年間となります。

2つの機能を持つ消費者向けスマホサイトへのクリニック登録権



① バーチャルホワイトニング体験スマホサイト

患者さんが、自身のスマホでホワイトニング前後のイメージをシミュレーション。白い歯になった自分の笑顔の印象の違いを実感できます。

② ホワイトニングクリニック紹介

NITEホワイトを実施しているクリニックとして、消費者向けのスマホサイト上にクリニックを紹介できます。
※イントロキットに同梱の、認定コードにてご登録ください。

ホワイトニング商品一覧 | NITEホワイト・エクスセル 単品販売

商品コード	品名	価格	商品写真番号
N115-1638	EVAシート(12枚入)	¥1,800	A
N11002	患者用小冊子(20枚入)	¥800	B
N11003	患者用小冊子スタンド	¥500	C
N11004	患者用小冊子セット (セット内容)患者用小冊子(20枚入)、小冊子スタンド(1個入)	¥1,300	D
N11006	ポスター(カラー1枚入)	¥1,800	E
N11007	ポスター(モノクローム3枚入)	¥1,500	F

ホワイトニング商品一覧 | **NITEホワイト・エクセル 単品販売**

商品コード	NITEホワイト・エクセル リフィル
N1NWE1404	¥13,500



〈キット内容〉 ホワイトニングジェル(シリンジ)3g×10本
シリンジ用チップ(トレー注入用)10個

商品コード	NITEホワイト・エクセル リフィル
N1NWE1404-5	(5箱) ¥65,000

商品コード	NITEホワイト・エクセル リフィル
N1NWE1404-10	(10箱) ¥125,000

商品コード	NITEホワイトポーチ(3個入)
N11012	¥2,400



商品コード	トレーケース (10個入) ブルー
N115-1080	¥2,700



商品コード	シェードガイド(25枚入)
N119-3003	¥3,000



Shade Guide
For a healthy beautiful smile.

PHILIPS
ZOOM!

商品コード	NITEホワイト・エクセル セット
N1NWE1405	¥5,800



〈キット内容〉 ホワイトニングジェル(シリンジ)3g×4本
シリンジ用チップ(トレー注入用)4個
トレーケース(トレー保存用)1個
EVAシート(トレー作製用)2枚
シェードガイド1枚
NITEホワイトポーチ1個

商品コード	NITEホワイト・エクセル セット
N1NWE1405-10	(10箱) ¥55,000

商品コード	NITEホワイト・エクセル タッチアップ
N1NWE1406	¥2,900



〈キット内容〉 ホワイトニングジェル(シリンジ)3g×2本
シリンジ用チップ(トレー注入用)2個

商品コード	NITEホワイト・エクセル タッチアップ
N1NWE1406-10	(10箱) ¥28,000

商品コード	NITEホワイト・エクセル タッチアップ
N1NWE1406-20	(20箱) ¥54,000

NITEホワイト・エクセル 関連商品

商品コード	スピードストーン
N11032	¥3,800



速硬性の硬石膏で5分以内で硬化するため、マウストレー作成の時間短縮が可能となります。『スピードストーン』100gに対して水24mlで、20~30秒の練和の後、印象面に注入します。作業時間は60~90秒です。『スピードストーン』はマウスガードやカスタムトレーの他、矯正装置用模型、義歯の修理、咬合器への作業模型の装着にも応用できます。硬化15分後の圧縮強度は420kg/cmです。

内容量: 2kg

商品コード	NITEホワイト・フォーマー DX
N11050	¥59,000



NITEホワイト・エクセル専用のEVAシートと、予め作製したU型(歯列全体)石膏模型をセットし、加熱・吸引することによりマウストレーの成型をする機械です。

製造販売元: 株式会社東京技研

販売名:
NITEホワイト・エクセル
スピードストーン
NITEホワイト・フォーマーDX

一般的名称:
医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
歯科用硬質石膏
歯科技工用成型器

医療機器承認/届出番号: クラス分類:
21300BZC00047000 III(高度)
09B1X00005Y03950 I(一般)
14B2X00036000003 I(一般)

表示価格は、2014年9月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

ご用命は

販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場/〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌/TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋/TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155
仙台/TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪/TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374
東京/TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡/TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880
関東/TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 競舟場/TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター 受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く) **0120-789-123** FAX:0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>