

製品仕様

製品番号	製品名	先端径/テーパー	長さ	内容
A0753221G0S03	ウェーブ・ワン ゴールド スモール	#20 .07	21mm	3本入り
A0753225G0S03			25mm	
A0753231G0S03			31mm	
A0753221G0P03	ウェーブ・ワン ゴールド プライマリー	#25 .07	21mm	
A0753225G0P03			25mm	
A0753231G0P03			31mm	
A0753221G0M03	ウェーブ・ワン ゴールド ミディアム	#35 .06	21mm	
A0753225G0M03			25mm	
A0753231G0M03			31mm	
A0753221G0L03	ウェーブ・ワン ゴールド ラージ	#45 .05	21mm	4本入り (上記各1本入り)
A0753225G0L03			25mm	
A0753231G0L03			31mm	
A0754221G9A03	ウェーブ・ワン ゴールド アソート	—	21mm	
A0754225G9A03			25mm	
A0754231G9A03			31mm	

・製品名: ウェーブ・ワン ゴールド 一般名: 電動式歯科用ファイル 医療機器承認番号: 227A6BZX00033000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)

関連製品

製品名	内容
X スマート プラス	コントロールユニット モーターハンドピース コントラングル (ギア比6:1) 他
プログライダー	長さ (21, 25, 31mm) 各3本入り
ウェーブ・ワン ファイル	スモール, プライマリー, ラージ, アソート 長さ (21, 25, 31mm) 各3本入り
AH プラス	チューブセット ジェットセットスターター
メルファーマファイル	6本入り (#20 ~ #120) 30本入り (#20 ~ #40)
デンツブライ ガッターチャポイント	120本入り (.04 テーパー, #15 ~ #90) 120本入り (.06 テーパー, #15 ~ #40)

・製品名: X スマート プラス 一般名: 歯科用電動拡大装置 医療機器承認番号: 224AKBZX00131000 クラス分類: クラスII (特定保守管理医療機器)
・製品名: プログライダー 一般名: 電動式歯科用ファイル 医療機器承認番号: 226AGBZX00011000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)
・製品名: ウェーブ・ワン ファイル 一般名: 電動式歯科用ファイル 医療機器承認番号: 224AGBZX00096000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)
・製品名: AH プラス 一般名: 歯科用根管充填シーラント 医療機器承認番号: 220AABZX000327000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)
・製品名: メルファーマファイル 一般名: 歯科用根管充填用材料 医療機器承認番号: 223AGBZX00099000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)
・製品名: デンツブライ ガッターチャポイント 一般名: 歯科用根管充填ガッターチャポイント 医療機器承認番号: 222AGBZX00045000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)
*仕様および内容の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は
製造販売元
デンツブライ三金株式会社
東京本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10
郡原工場/〒324-0036 栃木県大田原市下石上1382番11
カスタマー・サービス・センター
受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)
☎0120-789-123 FAX:0120-789-129
<http://www.dentsply-sankin.com>

Surf the canal with confidence

wave•one®
GOLD



For better dentistry
DENTSPLY
SANKIN

製品特長


1 高い柔軟性

- GOLDワイヤーにより、高い柔軟性を実現

デンツブライ独自の熱処理工程により誕生した
高い柔軟性と疲労破折抵抗性を有するNiTiです。

GOLDワイヤー


柔軟性

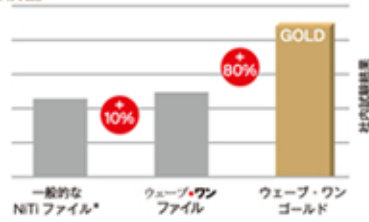

2 患者さんの安全性に配慮

- ウェーブ・ワン ファイル (当社従来品) に比べ、疲労破折抵抗性が50%向上し、ファイルの破折リスクが減少
- プロテーパー* (当社従来品) に比べ、菌質への食い込みを軽減


疲労破折抵抗性

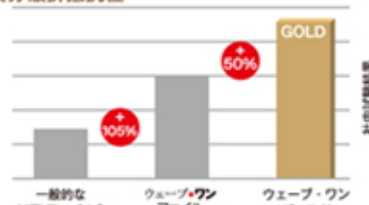


3 治療の効率化

- 切削効率が向上
- 約80%の症例に1本で対応でき、根管拡大・形成時間が短縮

根管拡大・形成時間

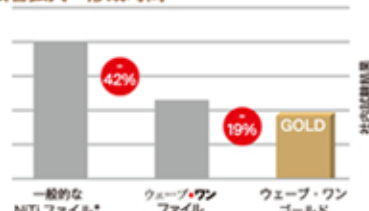


使用手順

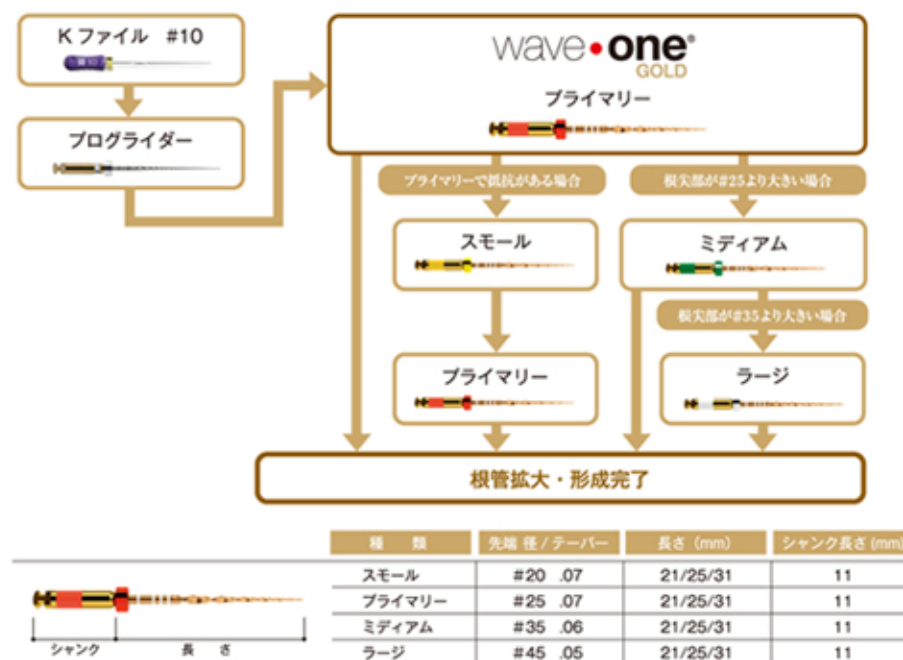

すぐに使用できるシングルユースファイル

- シンプル: 滅菌済みパッケージのため開封後すぐに使用可能
- 交差感染のリスク削減: 1F-1P (ワンファイル・ワンパーセント)
- 切削効率の最大化

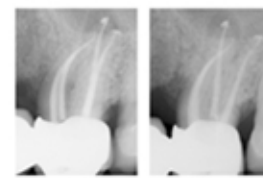

上顎左側第一大臼歯

根管治療の流れ



ファイルデザイン

Dr. C.Ruddle, Dr. J.Webber, Dr. W.Pertot, Dr. S.Kuttlerが開発チームに参加



- 根管壁に1つもしくは2つのカッティング・ポイントが接触
- 接触する数が変わることで、ファイルの食い込みが最小限に