


# TruNatomy™

MIコンセプトによる  
エンド治療システム



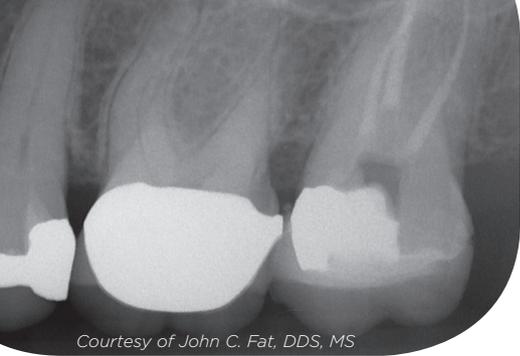

Courtesy of John C. Fat, DDS, MS

TruNatomyは、歯の解剖学的形態を重視し、最小限の侵襲の根管治療で限りなく歯牙を残し、治療後の強度を維持します。  
専用の洗浄針、オブチュレーションシステムもご用意した新しい根管治療のトータルソリューションです。



製品紹介動画

## CANAL PREP


**TruNatomy オリフィスマディファイヤ**は、歯冠部の構造を維持しながら根管口を形成します。歯冠修復の治療のオプションの幅が広がります。

様々な角度からの髄腔開拓が可能です。ブラッシングモーションはせず、自然に任せた優しいin-outの動きで使用します。


ストレートラインアクセスを確保しなくても根管拡大形成・充填ができます。



TruNatomy オリフィスマディファイヤ

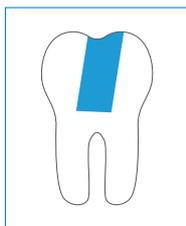

TruNatomyによる  
Canal Preparationのイメージ

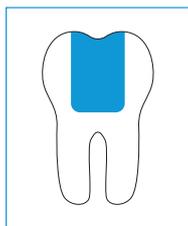

従来の手法による  
Canal Preparationのイメージ

TruNatomyの根管形成に適したガイドパス形成用の  
グライダー




TruNatomy グライダー


## SHAPING

**TruNatomy シェーピングファイル**は、必要以上に歯牙を切削する事なく、治療に必要な部分を除去します。

- **リグレスリブテーパーを採用 最大径は0.8mmでスリムなデザイン**  
リグレスリブテーパーとは：適切に洗浄するため根尖側のテーパーは大きく、歯冠側に近くなるに従い小さくなる設計 (図1)
- **独自の熱加工による柔軟性及び周期破折抵抗性の向上。弊社従来品と比べ柔軟性は最大3倍、破折抵抗性は最大4倍 (図2)**  
高い柔軟性により根管の中心軸に沿い、根管の形態を崩さず切削

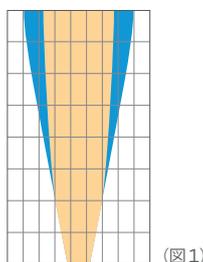


● TruNatomy™ Prime  
● 当社従来品

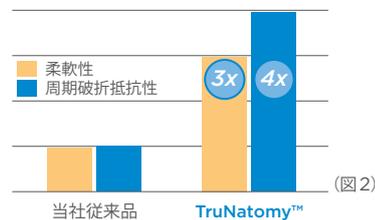

(図2)

- **優れたデブリ排出**  
回転軸の中心をずらした形状と、最大径0.8mmのスリムな形状 (図3)
- **臼歯部へのアクセスが容易**  
プレカーブの付与が可能であり、シャングの長さはわずか9.5mm (図4)

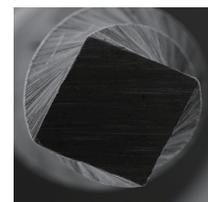

(図3)

拡大形成の際に使用するシェーピングファイルです。



TruNatomy プライム シェーピングファイル

スモール、ミディアムサイズもご用意しています。



(図4)

## インスツルメンテーション

### 標準的な使い方



手用ステンレス  
ファイル 10 TruNatomy  
洗浄針



TruNatomy  
オリフィスマディファイヤ  
20.08



手用ステンレス  
ファイル 10 TruNatomy  
洗浄針



TruNatomy  
グライダー  
17.®02V TruNatomy  
洗浄針 TruNatomy  
プライム  
26.®04V



TruNatomy  
スモール  
20.®04V TruNatomy  
ミディアム  
36.®03V

根管をEDTAで満たし、  
手用ステンレスファイル10番で  
ネゴシエーションする

約2~5 mmの緩やかな  
ベッキングモーションで  
2~3往復し、根管の1/3が  
形作されるまで  
繰り返す

根管にEDTAを満し、  
再起ファイリング  
作業長に達したら洗浄する

緩やかなベッキングモーションで作業長まで進む。ブラッシングモーションはしない。  
形成の度に、こまめに洗浄する

※ファイル全長における平均のテーパー (実際は根尖側に大きく、歯冠側に近くなるに従い小さなテーパーが付与されている)

モーター設定：500rpm / 1.5Ncm

### オプション

# TruNatomyで最小限の切削で拡大された根管を、十分に洗浄、適切に充填をする専用のイリゲーションと充填材

## IRRIGATION

TruNatomy 洗浄針による根管洗浄

- ・ポリプロピレンの洗浄針は柔軟性に富み、湾曲した根管に追従
- ・柔らかい素材なので、根管壁や口腔内の組織を傷つけない




TruNatomy 使用手順動画

- ・2穴開口デザイン：針の先端付近に洗浄液を放出する穴が左右に1つずつあり、根管全体をバランスよく洗浄



- ・根管長を測定し、適切な洗浄針のメモリ位置（18, 19, 20, 22mm）を確認の上使用

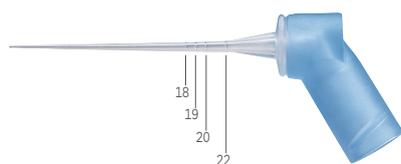

## OBTURATION

TruNatomy ガッタパーチャは、TruNatomy シェーピングファイルで形成した根管に合うよう設計されています。

- ・ファイルと合致するバリアブルテーパ
- ・タグバックを感じ、緊密な充填が可能
- ・ファイルとカラーコードが一致しており、サイズ選択が容易
- ・熱伝導性が良く低温で軟化
- ・ラテックスゴムは未含有



TruNatomy™ CF ガッタパーチャ

TruNatomy ペーパーポイントの特長

- ・滅菌包装のためそのまま使用可能
- ・ファイルとカラーコードが一致しており、サイズ選択が容易



TruNatomy™ ペーパーポイント

## 充填

### 標準的な使い方

TruNatomy  
ペーパー・ポイント  
プライム



TruNatomy  
CF ガッタ・  
パーチャポイント  
プライム



### オプション

TruNatomy  
ペーパー・ポイント  
スモール&ミディアム



TruNatomy  
CF ガッタ・  
パーチャポイント  
スモール&ミディアム



TruNatomyは、\*X-スマートIQ（根管拡大形成装置）と一緒にご使用出来ます。

TruNatomyのファイルデータ、使用手順はプリセットされています。推奨：500rpm, 1.5Ncm



\*Apple社のiPadとApp Storeの専用アプリを使用する日本初のエンド用モーター



# PRODUCT REFERENCES

## TruNatomy オリフィスマディファイヤ

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY316OMD	トゥルーナトミー オリフィスマディファイヤ	16MM	3本	7,100

## TruNatomy グライダー

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY321GLR	トゥルーナトミー グライダー	21MM	3本	7,100
BSTTNMY325GLR		25MM	3本	7,100
BSTTNMY331GLR		31MM	3本	7,100

## TruNatomy シェーピングファイル スモール

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY321SML	トゥルーナトミー スモール	21MM	3本	7,100
BSTTNMY325SML		25MM	3本	7,100
BSTTNMY331SML		31MM	3本	7,100

## TruNatomy シェーピングファイル プライム

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY321PRM	トゥルーナトミー プライム	21MM	3本	7,100
BSTTNMY325PRM		25MM	3本	7,100
BSTTNMY331PRM		31MM	3本	7,100

## TruNatomy シェーピングファイル ミディアム

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY321MED	トゥルーナトミー ミディアム	21MM	3本	7,100
BSTTNMY325MED		25MM	3本	7,100
BSTTNMY331MED		31MM	3本	7,100

## TruNatomy シークエンス

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY321SQC	トゥルーナトミー シークエンス	21MM	3本	7,100
BSTTNMY325SQC		25MM	3本	7,100
BSTTNMY331SQC		31MM	3本	7,100

## TruNatomy アソートメント

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNMY521AST	トゥルーナトミー アソート	16-21MM	5本	11,830
BSTTNMY525AST		16-25MM	5本	11,830
BSTTNMY531AST		16-31MM	5本	11,830

## TruNatomy 洗浄針

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BNSTNIRD2230G	トゥルーナトミー 洗浄針	30G	40個	7,700

## TruNatomy ペーパーポイント

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
BSTTNPP000AST	トゥルーナトミー ペーパーポイント	アソートメント	180本	4,600
BSTTNPP000MED		ミディアム	180本	4,600
BSTTNPP000PRM		プライム	180本	4,600
BSTTNPP000SML		スモール	180本	4,600

## TruNatomy ガッタパーチャポイント

製品番号	製品名	サイズ	入数	定価
B00TNGPF00MED	トゥルーナトミー CF ガッタパーチャ	ミディアム	60本	3,900
B00TNGPF00PRM		プライム	60本	3,900
B00TNGPF00SML		スモール	60本	3,900
B00TNGPF00AST		アソートメント	60本	3,900

販売名: TruNatomy ロータリーファイル  
 販売名: TruNatomy ガッタパーチャ  
 販売名: TruNatomy 洗浄針  
 販売名: TruNatomy ペーパーポイント  
 販売名: X-スマート IQ

一般的名称: 電動式歯科用ファイル  
 一般的名称: 歯科用根管充填回状材料  
 一般的名称: 洗浄針  
 一般的名称: 医療用スポンジ  
 一般的名称: 歯科用根管拡大装置

医療機器認証番号: 302AGBZX00027000  
 医療機器認証番号: 302AGBZX00023000  
 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04400  
 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04410  
 医療機器認証番号: 229AGBZX00094000

クラス分類: II (管理)  
 クラス分類: II (管理)  
 クラス分類: I (一般)  
 クラス分類: I (一般)  
 クラス分類: II (管理・特管)

表示価格は、2020年3月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 \*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

#trunatomy

ご用命は

製造販売元

**デンツプライシロナ株式会社**

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

**カスタマーサービス**

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

**☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659**

**http://www.dentsplysirona.com**