

表面ステイン材

# ビタ アクセント

## VITA AKZENT®

For natural surface colour effects

### 適用部位

“ビタ アクセント”は、ビタ陶材に使用する表面ステイン材です。適用出来る陶材は、VITA VM7、VITA VM9、VITA VM13、VMK Master、VITA TITANIUM PORCELAIN等です。微細構造のCERECやCERAYの修復物(例:VITABLOCS)等にも同様に使用できます。

### 物 性

“ビタ アクセント”は、微細粒子でやや蛍光性を持ち、シェードにより蛍光性が違います。お互いに練和して使用することもできます。適用している間に最終的な色調効果を確認することができます。Akz18・Akz20は、粒子が少し粗めですので特に隣接部裂溝や欠損部周辺の沈着物の再現などに適しています。

### 焼成方法

練和する場合は最初に液をミキシングプレートに出して、それから粉末を加え、均質な粘稠度になるまで練和します。均質になった練和物をセラミック修復物表面に塗布します。セラミックベニア表面をグレースするには、アクセント液とフィニッシングエージェントを練和し、薄く塗布します。フィニッシングエージェントの薄い層は、グレース焼成として大気中で焼成することができます。ビタ アクセント グレース(Akz25)は、修復物に柔らかい絹のような光沢を付与するために使用します。モデリングナイフ等でグレースを少量取り出し、液1~2滴と練和して濃いめの粘稠度にしてセラミックベニアの表面にできるだけ薄く適用します。もし何らかの修正が必要ならステインに液を加えて練和してグレースに適用します。

最善の物性を得るためにステインは、前もって使用2時間前に練和しておかなければなりません。

“ビタ アクセント”の種類は20色です。



“ビタ アクセント”の各陶材における焼成条件は、以下の通りです。

VITA VMK Master	予備乾燥 温度	予備乾燥 時間	昇温時間	昇温率	最終温度	最終温度 係留時間	真空係留 時間
グレーズ(Akz25) フィニッシングエージェント(Akz26)	500℃	4.00分	5.15分	80℃/分	920℃	1.00分	—
グレーズ焼成	500℃	0.00分	5.15分	80℃/分	920℃	1.00分	—

VITA TITANIUM PORCELAIN*	予備乾燥 温度	予備乾燥 時間	昇温時間	昇温率	最終温度	最終温度 係留時間	真空係留 時間
グレーズ(Akz25) フィニッシングエージェント(Akz26)	400℃	4.00分	4.00分	93℃/分	770℃	1.00分	5.00分
グレーズ焼成	400℃	0.00分	4.00分	93℃/分	770℃	1.00分	5.00分

VITA VM7	予備乾燥 温度	予備乾燥 時間	昇温時間	昇温率	最終温度	最終温度 係留時間	真空係留 時間
グレーズ(Akz25) フィニッシングエージェント(Akz26)	500℃	4.00分	5.00分	80℃/分	900℃	1.00分	—
グレーズ焼成	500℃	0.00分	5.00分	80℃/分	900℃	1.00分	—

VITA VM9	予備乾燥 温度	予備乾燥 時間	昇温時間	昇温率	最終温度	最終温度 係留時間	真空係留 時間
グレーズ(Akz25) フィニッシングエージェント(Akz26)	500℃	4.00分	5.00分	80℃/分	900℃	1.00分	—
グレーズ焼成	500℃	0.00分	5.00分	80℃/分	900℃	1.00分	—

VITA VM13	予備乾燥 温度	予備乾燥 時間	昇温時間	昇温率	最終温度	最終温度 係留時間	真空係留 時間
グレーズ(Akz25) フィニッシングエージェント(Akz26)	500℃	4.00分	4.45分	80℃/分	880℃	1.00分	—
グレーズ焼成	500℃	0.00分	4.45分	80℃/分	880℃	2.00分	—

VITA BLOCS	予備乾燥 温度	予備乾燥 時間	昇温時間	昇温率	最終温度	最終温度 係留時間	真空係留 時間
グレーズ(Akz25) フィニッシングエージェント(Akz26)	600℃	4.00分	3.00分	107℃/分	920℃	1.00分	—
グレーズ焼成	600℃	0.00分	3.00分	113℃/分	940℃	1.00分	—

## ・ VITA AKZENT® Assortment ・

### ビタ アクセント セット内容

- アクセント ステイン(Akz 01~Akz 20) 3g × 20
- グレーズ(Akz25) 5g × 1
- フィニッシングエージェント(Akz26) 5g × 1
- 液 20mL × 1
- ミキシングパレット × 1
- ガラススパチュラ × 1
- ブラシ × 1
- シェードインジケータ—No.1 × 1
- シェードインジケータ—No.2 × 1

認証番号 222AKBZX00139000

# VITA

ご用命は当社へ

## 白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎ (011)616-5814  
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎ (048)884-3951  
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎ (045)222-0381  
 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎ (052)733-1877  
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎ (06)6396-4400  
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎ (092)432-4618  
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>