



Feel the Difference

LM LiftOut luxating instruments


LM リフトアウト

抜歯時の組織への損傷を
最小限に抑えます。

LM TwistOut elevators

LM ツイストアウト

強い力が必要な抜歯時に —

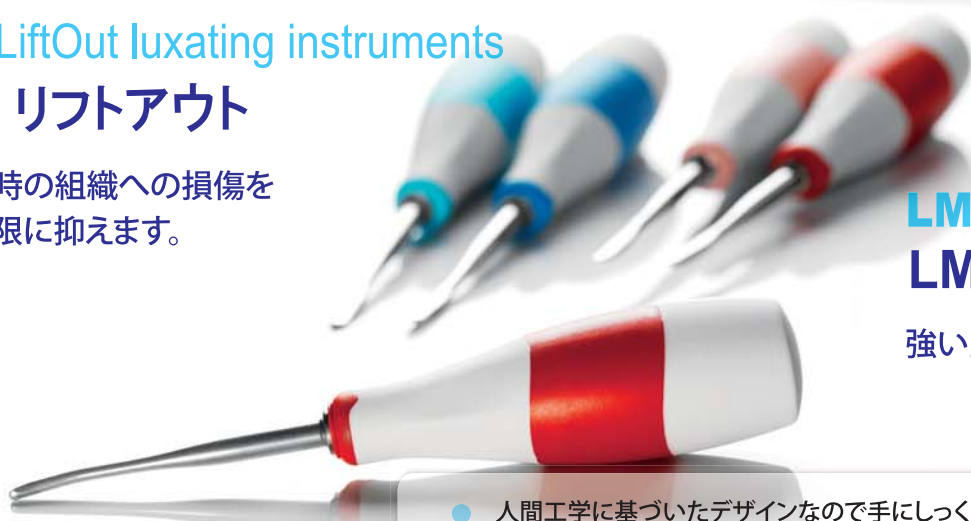


- 人間工学に基づいたデザインなので手にしっくり馴染む
- 滑りにくく握りやすいグリップ
- バランスが良く操作しやすい
- 軽いので手への負担が少ない
- カラーコーディングで識別が容易
- ブレードは丈夫でシャープなLM-DuraGradeMAXスーパースチール製
- ブレードと柄の接続部分に隙間が無く衛生的
- オートクレーブで滅菌可能



Easy to maintain

- 🔧 付属のLM リフトアウト・LM ツイストアウト専用カセットはお手入れ時の怪我やインスツルメントの破損を未然に防ぎます。また、滅菌バッグに穴があく危険性が減り、より確実に滅菌を行えます。カラーコードボタン(別売)を利用すると識別が容易です。

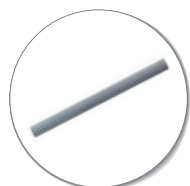

- 🔧 専用のLMシャープニングストーンはブレードの形状にフィットするので効率良くシャープニングできます。(別売)

【標準価格】 1本 ¥3,800

LM リフトアウト

歯科用エレベータ

一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020223044


LM ツイストアウト

歯科用エレベータ

一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020223043

使用方法

LM リフトアウトは極力無理な力をかけずに抜歯を行うためのインスツルメントです。組織の損傷を最小限に抑えることができるので、治癒が速く、スムーズにインプラントの埋入へと移行できます。

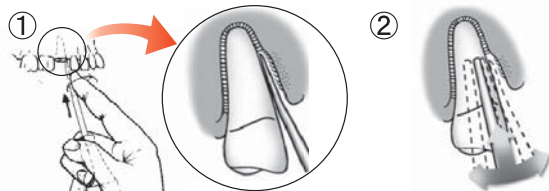

ブレード先端を歯根膜空隙に挿入し根尖に向かってゆっくりと上下運動させながら靱帯を切断します。



注意!

LMリフトアウトは、適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部の厚さが特になくなっています。誤った方法で抜歯を行ったり、捻ったり、過剰な力やてこの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

LM ツイストアウトは抜歯時に、強い力や捻りが必要な際に使用します。



形状 & サイズ

LM リフトアウト S2 **ストレート** 2.5mm (ブレード幅)



LM リフトアウト S3 **ストレート** 3mm (ブレード幅)



LM リフトアウト S5 **ストレート** 5mm (ブレード幅)



LM リフトアウト C3 **カーブ** 3mm (ブレード幅)



LM リフトアウト C5 **カーブ** 5mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト S3 **ストレート** 3mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト S5 **ストレート** 5mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト C3 **カーブ** 3mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト C5 **カーブ** 5mm (ブレード幅)



【標準価格】 1本 ¥11,600 (カセット付)

記載の価格は2012年2月現在のものです。[税別]



LMインスツルメンツ社
(フィンランド)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎ (011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎ (048)884-3951
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎ (045)222-0381
〒464-0075 名古屋市中千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎ (052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎ (06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎ (092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>