
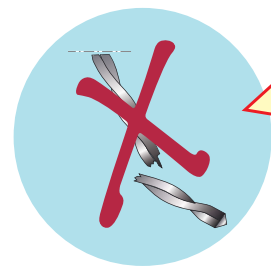


歯内療法をより簡単に！ 正確に！ そして更に安全に！

HAKUSUI

FGK S-アペックス NiTi S-ApeX D2 よりも D1 のほうが大きい逆テーパ型 狭窄や石灰化した根管の根尖部の拡大に

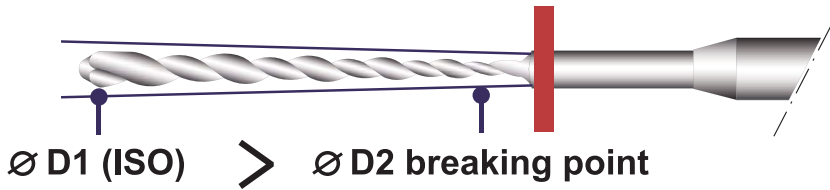


チップが折れて
かみ込む心配が
ありません。

“S-アペックス”は、形成用インスツルメントのチップが自由に回転できるスペースを作り出します。

“S-アペックス”は、根尖狭窄部の根先端数ミリを形成し、根尖空隙を作り出します。

洗浄効果と消毒効果を改善します。

“S-アペックス”は、潤滑剤、灌注剤、キレート剤が彎曲した狭い根管でも作業長まで到達するように手助けします。

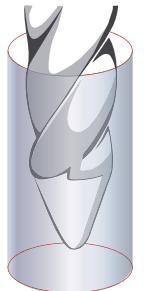

根管の清掃には

RCプレップ+ハイポーゲンを!

根管形成時の切削片を容易に除去するためのEDTA (エチレンジアミン四酢酸) をベースにした根管清掃材です。



【標準価格】

- ▲ シリンジタイプ
- ▲ ポンプタイプ
- ・ RC プレップ ポンプタイプ 1 瓶 (18g) ¥5,400
- ・ RC プレップ シリンジタイプ 1 箱 (9g × 2 本) ¥5,500

2.5% の次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) 溶液です。RC プレップとの併用で発泡作用を促し、根管内の切削片を浮き上がらせるので除去が容易になります。




【標準価格】

- ハイポーゲン 1 瓶 (118mL) ¥1,800

FGK
FKG DENTAIRE
Swiss Dental Products



Tools to keep smiling

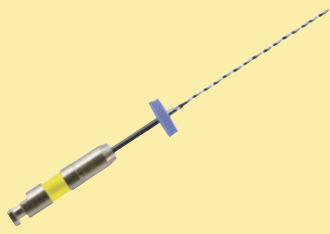

FKG S-ApeX

逆テーパータイプの新しいユニークな エンジン用ニッケルチタンファイル



エンジン用ニッケルチタンファイルで破折する部位は80%以上が根尖部から10mmまでの間実際に拡大を行う彎曲した狭くて石灰化した根管内で起こっています。“S-アペックス”を使用すればそうした危険性を避けることが出来ます。

S-アペックスの安全性

- 根尖部位に次に使用するインストゥルメントが自由に回転できるスペースを作る。
- 作業長まで灌注できるように手助けをする。
- 垂直加圧充填時にアピカルストップをつくる。


S-アペックスはいつ使うのか？

プリレイスの後、作業長を確認し、通常のレイスを使用する前に根尖 1/3 を形成するために使用します。


S-アペックスの使用手順

- 1 プリレイス 40/.10 と 35/.08 で最初の 1/3 を開口します。
- 2 レイス No. 10-15、K ファイル、根管長測定器などで作業長を測定します。
- 3 ISO15のS-アペックス(白色)を最初に使い、順番に大きいサイズを使用(黄色、赤色)して根尖を最終的に選択した大きさまで形成していきます。
S-アペックスは500-1,000rpmの回転数で使用して下さい。
- 4 通常の方法でクラウンダウン形成を行います。最初のレイスのサイズは、最後に使用するS-アペックスよりも小さいものでなければなりません。


- S-ApeX® ISO 15
- S-ApeX® ISO 20
- S-ApeX® ISO 25

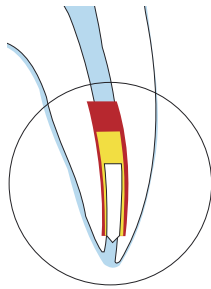

工場で強い負荷をかけてわざと破折させると先端から 16mm 前後で破折しました。

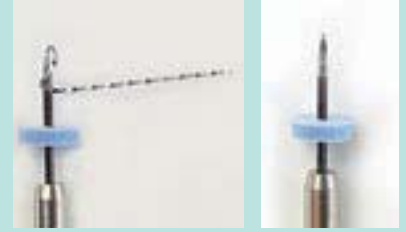


破折した部分は簡単に引き抜けます。先端はネジを切っていない独特のデザインのため、根管内でかみ込んだり、詰まったりしません。

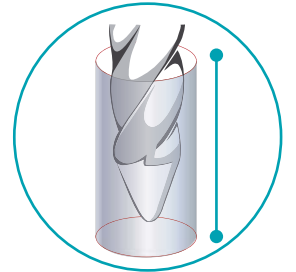



チップが自由に回転できる
||
安全性が改善される

- 4 通常の方法でクラウンダウン形成を行います。最初のレイスのサイズは、最後に使用するS-アペックスよりも小さいものでなければなりません。

根尖が形成されるまで円錐状の形成を続けます。

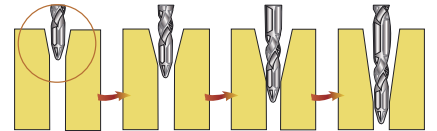

S-アペックスの種類

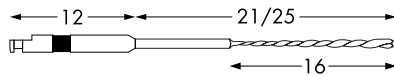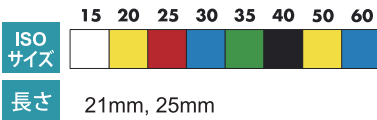

使用可能なモーターについて

- エアモーターの回転数 20,000rpm で 32/1 の減速コントラを使用 (=625rpm)
- 電気モーターの回転数 40,000rpm で 64/1 の減速コントラを使用 (=625rpm)
- モーターは、一定の最高スピードで回転させます。

歯内療法/トルクをコントロールできるモーター

- 回転数は 500-1,000rpm に調整します。
- 形成中は上記の回転数を維持します。
- 前もって調整するトルク：0.5Ncm

FKG インストゥルメントは、全てのマイクロモーターやコントローラシステムに適合します。

記載の標準価格は平成24年5月現在のものです。(税別)

商品名	標準価格
Sアペックス #25/#50 25mm アソート・2本入	¥ 2,000
Sアペックス #15-#40 21mm アソート・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #15-#40 25mm アソート・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #15 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #20 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #25 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #30 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #35 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #40 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #50 21mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #60 21mm 単品・6本入	¥ 7,600

商品名	標準価格
Sアペックス #15 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #20 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #25 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #30 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #35 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #40 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #50 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #60 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #70 25mm 単品・6本入	¥ 7,600
Sアペックス #80 25mm 単品・6本入	¥ 7,600

(管理医療機器) 医療機器認証番号 223AKBZX00217000

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎ (011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎ (048)884-3951
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎ (045)222-0381
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎ (052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎ (06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎ (092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2012.5.P.5000