

Hydent[®] Sticks



Color Transfer and Tissue
Marking Applicators

ハイデント
スティック

歯科適合試験用アプリケーター



ACCURATE FAST PATIENT FRIENDLY

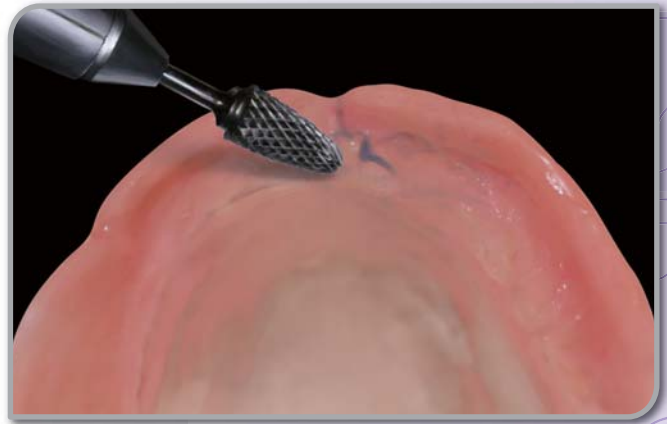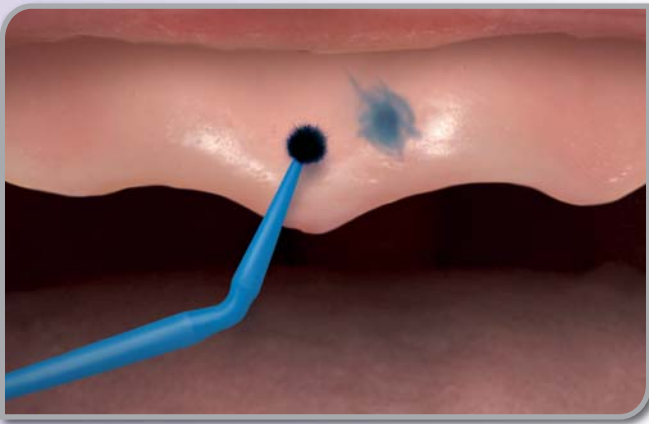

義歯の調整をよりスピーディー、簡便、安全にする色転写と粘膜マーキング用のアプリケーター。
義歯の不適合部位を精確に、手早く、やさしく、衛生的に濃紫色にくっきり転写します。



Hygienic & Safer



Precise Transfer



 Pascal[®]
International, Inc.



口腔内から義歯を取り出します。

歯肉・口蓋部の患部を湿らせます。(唾液又は水で)

ハイデントの先端を患部に軽く接触させます。

1

濃紫色が粘膜に描記!

2

義歯を口腔内にセットし咬合させた後、取り出します。

濃紫色が義歯上にくっきり転写!

3

濃紫色が転写された部位をバー等で削合します。

4



在宅診療に最適でコンパクト!



衛生的な Disposable

ピンポイントで塗布が可能!



垂れずに奥までしっかり到達!

くっきり見やすい濃紫色!



スピーディ&正確な転写!

クリニカルケース CLINICAL CASE



曲げられ柔軟なアプリーケータ Bendable



粘膜のマーキングにも最適 Distinct

