


LM LiftOut luxating instruments

LM リフトアウト

抜歯時の組織への損傷を
最小限に抑える

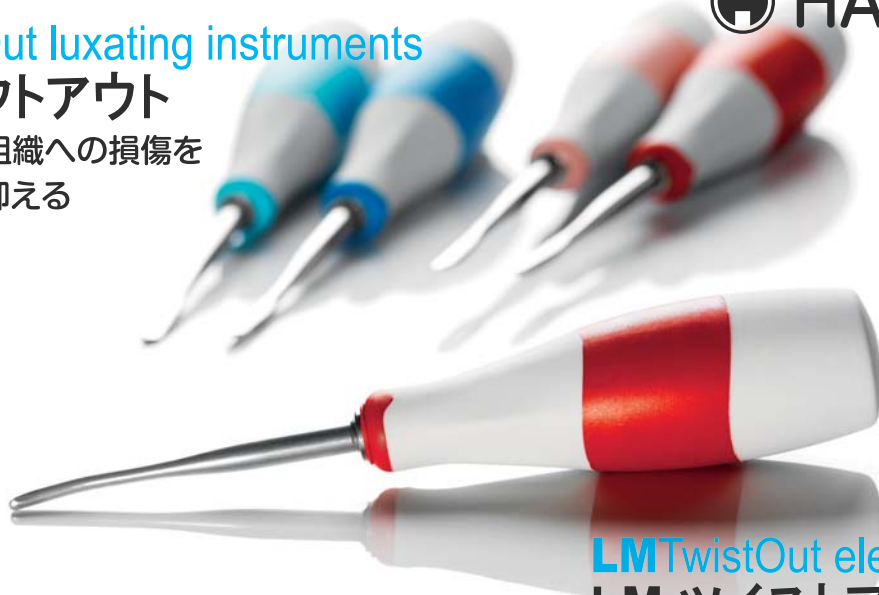

LM TwistOut elevators

LM ツイストアウト

強い力が必要な抜歯時に —

LM SlimLift luxating instruments

LM スリムリフト

挿入しやすいスリムなブレード



- 人間工学に基づいたデザインなので手にしっかり馴染む
- 滑りにくく握りやすいグリップ
- バランスが良く操作しやすい
- 軽いので手への負担が少ない
- カラーコーディングで識別が容易
- ブレードは丈夫でシャープなLM-DuraGradeMAXスーパースチール製
- ブレードと柄の接続部分に隙間が無く衛生的
- オートクレープで滅菌可能



LM LiftOut

LM リフトアウト


歯科用剥離子

組織損傷を最小限に抑え
力に頼らない抜歯が可能

一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020223044

使用方法

LM リフトアウト、LM スリムリフト は極力無理な力をかけずに抜歯を行うためのインスツルメントです。組織の損傷を最小限に抑えることができるので、治癒が速く、スムーズにインプラントの埋入へと移行できます。

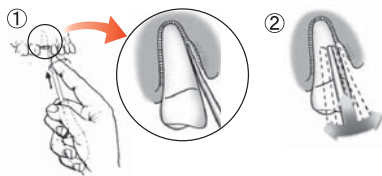

ブレード先端を歯根膜空隙に挿入し根尖に向かってゆっくりと上下運動させながら靱帯を切断します。



注意!


LMリフトアウト、LMスリムリフトは適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部の厚さが特に薄くなっています。誤った方法で抜歯を行ったり、捻ったり、過剰な力やテコの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

LM SlimLift

LM スリムリフト

歯科用剥離子

ブレードが非常に薄く
歯根膜に挿入しやすい

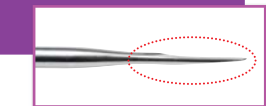

一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020225034

形状・サイズ

LM リフトアウト S2 ストレート 2.5mm (ブレード幅)



LM リフトアウト S3 ストレート 3mm (ブレード幅)



LM リフトアウト S4 ストレート 4mm (ブレード幅)



LM リフトアウト S5 ストレート 5mm (ブレード幅)



LM リフトアウト C3 カーブ 3mm (ブレード幅)



LM リフトアウト C4 カーブ 4mm (ブレード幅)



LM リフトアウト C5 カーブ 5mm (ブレード幅)



LM スリムリフト S3 ストレート 3mm (ブレード幅)



LM スリムリフト S4 ストレート 4mm (ブレード幅)



LM スリムリフト S5 ストレート 5mm (ブレード幅)



LM スリムリフト C3 カーブ 3mm (ブレード幅)



LM スリムリフト C4 カーブ 4mm (ブレード幅)



LM スリムリフト C5 カーブ 5mm (ブレード幅)



LM TwistOut

LM ツイストアウト

歯科用エレベータ

強い力や捻りが必要な
ケースに使用

一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020223043

LM ツイストアウト は抜歯時に、強い力や捻りが必要な際に使用します。



LM ツイストアウト S3 ストレート 3mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト S4 ストレート 4mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト S5 ストレート 5mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト C3 カーブ 3mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト C4 カーブ 4mm (ブレード幅)



LM ツイストアウト C5 カーブ 5mm (ブレード幅)



関連商品

LMリフトアウト、LMスリムリフト、LMツイストアウト 専用シャープニングストーン

専用のLMシャープニングストーンはブレードの形状にフィットするので効率良くシャープニングできます。



標準価格 1個 ¥4,000

残根除去用エレベータ LM ルートアウト

- 残根の除去に適しています
- 人間工学に基づいた把持しやすいグリップ



標準価格 1本 ¥12,500

残根除去用インスツルメント LM ルート チップピック

- 残根の除去に適しています



標準価格 1本 ¥6,800

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020225033

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020224016

記載の価格は2014年4月現在のものです。[税別]



LMインスツルメンツ社
(フィンランド)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/> 2014.4.P.5000