



Quiet Comfort Wireless

術者の耳に装着し、タービン音・超音波スケーラ音を軽減
患者さんの耳に装着し、より快適・安心・静かな歯科受診に

QuietOn

Active Noise Cancelling Earplugs


クワイエットオン



- ✓ 小型でコードレス
- ✓ 驚きの騒音低減
- ✓ 絶え間ない騒音によるストレスを軽減
- ✓ 長時間の治療・オペに術者は集中可能
- ✓ 会話は聞こえる
- ✓ 衛生的なイヤークリップス[保護カバー青・緑]はオートクレープ可能。
患者さんごとに清潔に提供可能
- ✓ 1回の充電で最大50時間使用可能

騒音低減レベル

騒音低減

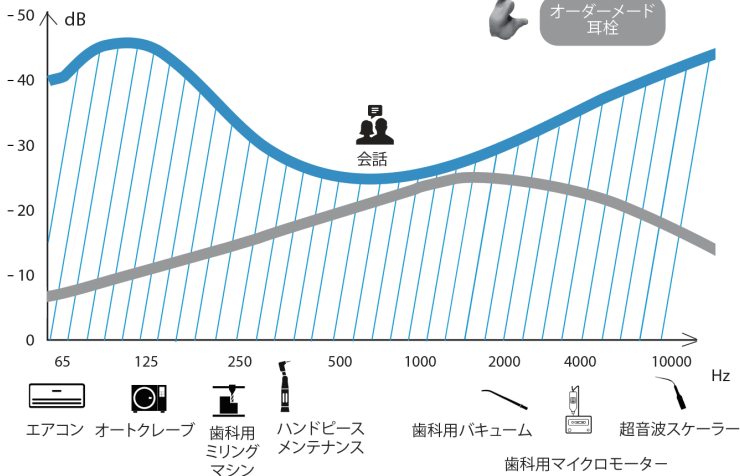

QuietOn イヤープラグは、患者さんとの会話は可能にしながらも、歯科医院での騒音を低減するのに効果的です。上のグラフは、歯科医院での一般的な騒音源のピーク時の周波数の例を示しています。QuietOn イヤープラグは、低周波騒音を低減するのにとても効果的で、高周波騒音低減にも最適です。

歯科従事者の感想



Päivi Jussila

歯科医師 / フィンランド

「初めて QuietOn を試した後、聴力を保護するために商品を購入したいと思いました。歯科医院での騒音をブロックできることで、治療に集中できます。」



Jaana Sverioff

歯科医師 / フィンランド

「QuietOn を装着することで邪魔に感じる騒音はブロックされますが、患者さんとはちゃんと会話できます。私は、読書の時にも QuietOn を使っています。」



Ville Partanen

歯科医師 / フィンランド

「3週間 QuietOn を試してみて、患者さんや歯科衛生士との会話はブロックされず、周囲の騒音のみ効果的に低減していると実感しました。」



Sally Masri
歯科医師 / フィンランド

「私の QuietOn を使用した感想は、QuietOn イヤープラグはある特定の騒音を低減するのにとても効果的だと思います。歯科医院内での周囲の騒音がブロックされることで解放された気分になります。実際、QuietOn を外した際に、こんなにも騒音があったのかと気づきます。私が QuietOn を装着するのは、しばらくの間会話せずに、集中して治療が必要な時、例えば、手術やその他の大掛かりな治療をする際です。QuietOn を装着することで、周囲の騒音から解放されるのでとても気に入っています。」



Kirsten Findling Nielsen
歯科医師 / フィンランド

「私は、過去数年に渡り耳栓を使用してきましたが、耳に痛みを感じる為、装着が不快に感じ、結局いつも外していました。そのため、朝に装着後、お昼休憩までずっと装着し続けられる、何か新しい耳栓がないか探していました。QuietOn の聴覚保護耳栓は、私が必要としていた耳栓そのものです。QuietOn は、特定の騒音のみをブロックするため、ずっと装着し続けることができます。装着したままでも人が話している声は聞こえ、患者さんとも会話ができます。QuietOn は、周囲の騒音のみを拾って低減してくれます。私は、QuietOn をとても気に入り、毎日使っています。マイクロモーターとバキューム併用時も快適です。QuietOn を装着していることが他の方に気づかれるということが唯一の欠点ですが、これにも段々慣れてきます。私は、同僚や、今は耳に痛みを感じていない人でも、聴力を守る目的で QuietOn の装着をおすすめします。」

QuietOn の使い方

※イヤープラグを確実に装着してください。

①



②



③



④



- ① QuietOn を充電ケースから取り出すと電源が入ります。
- ② 同梱されているイヤーチップ(黒・青・緑色の3種カパー)の中から最適なサイズを選び、QuietOn に正しく被せてください。
- ③ 正しい位置に回転させながらしっかりと耳奥に押し込みセット完了。装着時、キュルルル音が聞こえ、セット後は音が止みます。静寂をお楽しみください。ノイズキャンセル性能を最大限に発揮するために、QuietOn と耳の間に隙間ができないよう気密性を確保してください。
- ④ 使用后、QuietOn を充電ケースに戻し、蓋をします。
(自動的に電源オフ)

テスト&充電方法

⑤



⑥



⑦



- ⑤ QuietOnを充電するには、同梱されているMicro-USBケーブルを充電ケースの背面の接続穴に差し込みます。すると前面の円型ライト(2カ所)が点灯します。正しく充電するため、QuietOnを充電ケース内に正しく収納してください。QuietOnケースにはSV、0.12~3Aのアダプタで電源供給されます。
- ⑥ QuietOnの充電が完了すると、充電ケース前面の円型ライトが消灯します。充電時間は約1時間です。
- ⑦ 指でイヤープラグの穴を覆い、QuietOnの機能をテストしてください。かすかなキュルルル音はQuietOnが正常に動作していることを示します。QuietOnを装着中にこのキュルルル音が聞こえる場合はQuietOnの位置を調整すると音が止まります。

QuietOn

Active Noise Cancelling Earplugs

Protect your hearing

会話を邪魔しない聴覚保護具



QuietOn

Active Noise Cancelling Earplugs



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12F ☎(03)5217-4618

〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877

〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30/八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618

<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2018.5.P.2000 Ver.1.0