

Made in U.S.A.

HAKUSUI

**CordEze**  
コード イージー

手首や手などへの **負担** 軽減に **操作性** の向上に

**“FEEL” Cordless but stay connected!**



コードイージーは、毎日のお仕事やルーティーンの処置で使用する、超音波スケーラーなどのコードによってもたらされる  
手首や手などへの負担を軽減します

スプラソン P-MAX2 に



コードイージーの特徴

超音波スケーラーの  
ハンドピースコードの  
取り回しを改善

腕・手・手首・親指・指  
の負担軽減

ぜひご覧ください

歯科衛生士の腕はとても大切です。患者さんも  
歯科衛生士の腕次第、歯科衛生士のキャリアも  
需要も腕次第。私達は自分の腕を愛し、しっかりと  
ケアしてあげましょう。



超音波スケーラーでの使用について

## コードイージーのご使用について



### コードイージー・リストバンドの取付方法



1.



2.


### <コードイージー・リストバンドの取付方法>

1. コードイージー・リストバンドを利き腕の手首に巻き付けます。コードイージー・リストバンドの片方をリング部分の内側を通します。
2. コードイージー・リストバンドを引っ張って長さを調整し、丁度良い場所にある穴にメタルピンを挿入し固定します。

### <コードイージー・アダプターの取付方法>

1. アダプターの下部をつまんでアダプター上部にあるスロットを広げ、ハンドピースコードを取り付けます。アダプターの場所を調整してハンドピースコードを緩める長さを仮決めします。
2. 利き腕でハンドピースを持ちます。コードイージー・アダプターを親指と他の指で持ち、コードイージー・リストバンドの溝にアダプターをスライドさせて取り付けます。これでハンドピースコードを保持することなく処置を行う事が出来ます。

### コードイージー・アダプターの取付方法

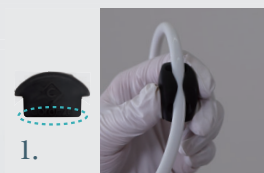

1.



2.

### <コードイージーの取り外し方法>

アダプターを持ってスライドさせてコードイージー・リストバンドから取り外します。アダプターはハンドピースコードに付けたままにしておきます。

### <日常のお手入れ>

包装もしくは未包装の状態オートクレーブ滅菌を行ってください、もしくは中水準消毒液を染み込ませたワイプを使って拭いて下さい。

### <セット内容>

- ・リストバンド…1本
  - ・アダプター……3個（太さ 5mm/7.5mm/9mm）
- ※P-MAX2 には 7.5mm がお勧めです。



### <関連商品>



**acteon**

**P-MAX<sup>2</sup>**  
NEUTRON POWERED

**多目的で使える  
超音波治療機器**

**術者と患者さんともに  
満足の快適性を実現。**

**豊富な専用チップで  
様々な診療に  
使用可能！**

製品ご紹介はこちら