

マニーダイヤモンド ショートシャंक

ショートシャंकならではの高いアクセス性を確保
治療をよりスムーズにするダイヤモンド




Short shank lineup

マイクロヘッドのハンドピースとの併用によって、操作性が高まり、より正確な形成が可能になります。

マイクロヘッドのハンドピースでを使用することにより、臼歯部などへのアクセスや視認性の向上とともに、対合歯とのクリアランスが確保できるため操作性も高まります。これによって、より正確な形成が可能になり、余分な切削量を低減できます。



臨床写真ご提供：
上野博司先生/上野歯科
(東京・練馬区開業)

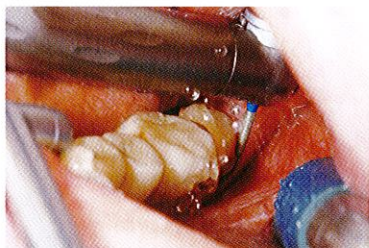


使用バー：EX-SS13
症例：下顎第二大臼歯軸面形成

臼歯部クラウンの軸面及びマージン形成全般に使用できるバーである。開口量の少ないケースに有効であり、対合歯の影響を受けにくく、歯軸に対して垂直にバーを使用している。遠心面、舌側面形成でもバーを滑らかに運びやすい。



使用バー：EX-SS33
症例：下顎左側第二大臼歯のアンレー形成
歯冠長が短く、開口量も少ないケースに有効なバー。オールセラミックスなど丸みを帯びた形成が不可欠な修復材でのインレーやアンレー形成に適している。コーナーが丸みを帯びているため、窩底部に近い壁面がアンダーカットになりにくい。

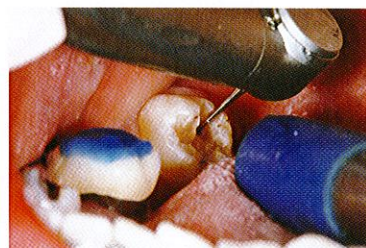

使用バー：MI-S45
症例：舌側傾斜した下顎右側
第三大臼歯咬合面う蝕除去

ハンドピースが舌や対合歯に阻まれ、非常にアクセスしにくい部位だが、ダイヤモンド部からシャンク部までの細長い形状によりアプローチしやすいバーである。MIの概念から行う内開きの窩洞形態にも対応しやすい。

★R=ショルダーR S=スタンダード F=ファイン EF=エクストラファイン 30=300,000m⁻¹ 45=450,000m⁻¹

形状(原寸大)	コード	品番	寸法(mm)			粒度	最高許容回転数	用途・特長
			作業長	最大径	全長			
	249656-MIS45	MI-S45	0.9	1.0	17.0	S	30	特に小さなカリエスの除去に。
	249657-CD51	CD-SS51	2.2	0.9	16.0	S	30	エナメル質の開拡や軟化象牙質の除去等に。
	249656-FOS54	FO-S54	9.5	1.7	20.0	S	30	根管処置時の髄室開拡に。
	249658-CD57F	CD-57F	3.6	0.7	16.8	F	30	レジン充填後の小窩裂溝の形態付与に。
★R	249657-EX33	EX-SS33	4.0	1.6	14.2	S	45	インレー形成に。
★R	249657-EX33EF	EX-SS33EF	4.0	1.6	14.2	EF	45	インレー形成の最終仕上げに。
★R	249657-EX38	EX-SS38	4.2	1.9	16.0	S	45	セラミックス等のインレー形成に。
★R	249657-EX38EF	EX-SS38EF	4.2	1.9	16.0	EF	45	セラミックス等のインレー形成の最終仕上げに。
	249657-EX13	EX-SS13	6.0	1.4	16.0	S	30	臼歯部7-8番の軸面形成に。
	249657-EX13EF	EX-SS13EF	5.9	1.2	15.9	EF	30	臼歯部7-8番の軸面形成の最終仕上げに。
	249657-EX14	EX-SS14	6.0	1.5	16.0	S	30	臼歯部7-8番の軸面形成に。
	249657-EX14EF	EX-SS14EF	5.9	1.3	15.9	EF	30	臼歯部7-8番の軸面形成の最終仕上げに。
	249657-TC21	TC-SS21	8.0	1.4	17.0	S	30	隣接面のスライスカットに。
	249656-ProS3	Pro-S3	4.7	2.4	17.0	S	30	咬合面の形成に。
	249656-TRS14	TR-S14	9.2	2.2	20.0	S	30	支台歯形成時のシャンファー形成等に。
	249656-TR14EF	TR-S14EF	9.0	2.0	19.9	EF	30	支台歯形成時のシャンファー形成等の最終仕上げに。

有限会社 マルヤマ歯科商店

歯科用ダイヤモンドバー マニーダイヤモンドバー ショートシャンク

プリストア各5本入り 標準価格 3,000円

- 販売名 マニーダイヤモンドバー
- 医療機器届出番号 09B1X00006002010
- 一般名称 歯科用ダイヤモンドバー
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

- 標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。
- 掲載商品の標準価格は、2012年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。