




埋伏智齒分割用 サージカルバー (1559L)
SURGICAL BURS

Healthy teeth, happy smiles,
to the world.

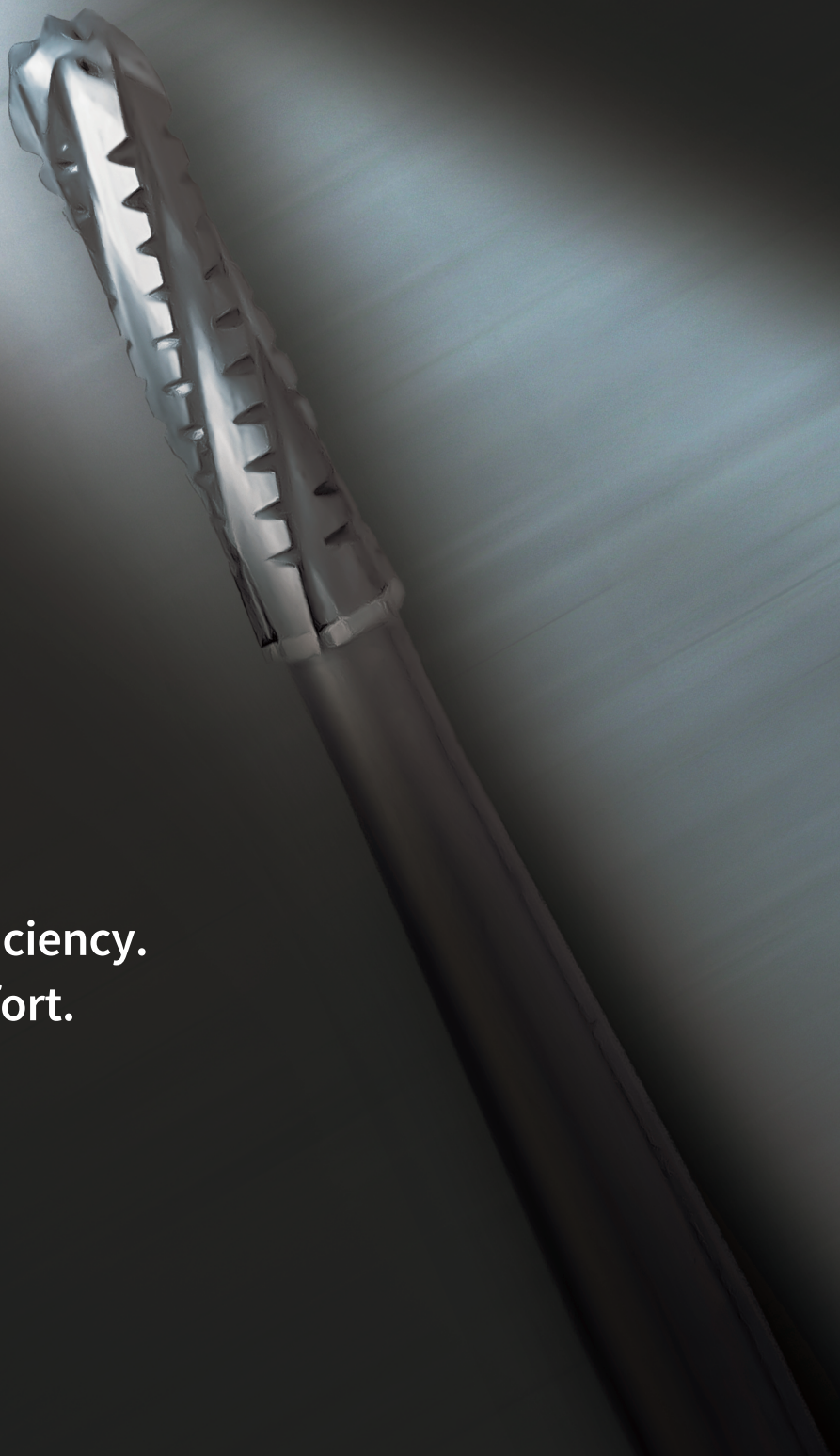

**Engineered for Efficiency.
Designed for Comfort.**

KEY FEATURES

効率的でスムーズな歯牙分割のために

01 スパイラルブレード形状

刃部形状の最適化により、
スムーズな切削を可能に。
従来のブレードに比べて振動が少なく、
安定した操作へ。

04 ネック形状

最適なネック形状で、耐破折性を向上

02 クロスカット構造

クロスカットブレードにより、
切削効率を向上

03 作業部長 6 mm

従来品（Zekrya タイプ：11mm）に
比べて短く設計し、
コントロール性を高めるとともに、
軟組織の巻き込み低減を目指した。

PRODUCT OVERVIEW

Itemcode 1559L

主な用途	形態	材質	シャンクタイプ	全長	作業部長	最大径	標準価格 (4本入/ケース)
埋伏智歯の分割抜歯	ラウンドエンド ストレートフィッシャー	作業部 タングステンカーバイド	FG	25mm	6mm	1.4mm	¥ 2,800
		シャンク ステンレススチール		28mm			
				30mm			

i ハンドピースは5倍速を使用

医療機器届出番号 09B1X00006003010 一般医療機器 一般の名称：歯科用カーバイドバー 販売名 マニーカーバイドバー

i 埋伏歯抜歯時におけるリスクと注意点

この分割抜歯用バーはスムーズな抜歯を可能にするために、高い切削効率を備えています。
安全かつ効果的にご使用いただくために、下記にご留意ください。

- i 許容回転数 (12 万回転) で使用してください。12 万回転を超えると、破折や損傷の原因となります。
- i “フェザータッチ” で操作してください。
- i 下歯槽神経および舌神経を損傷しないよう注意して操作してください。
- i 破折するリスクがあるため、過度な力を加えないようにしてください。
- i 先端部にも切削力があります。注意して操作してください。
- i 本製品の使用対象は歯牙に限定されており、金属補綴物を含む歯科用金属材料の切削用途には適していません。

