

K3TM XF

Rotary Nickel Titanium File

根管治療用R相ロータリーニッケルチタンファイル

K3 XFファイル



これからNi-Tiロータリーファイル導入を検討されているドクターへ。

より安全な拡大形成のために耐久性を向上。

根尖孔の変位やマイクロクラック防止のために柔軟性の向上を
コンセプトに開発されたK3 XF。


ロータリーファイルのスムーズな導入をサポートします。



SybronEndo

複雑な熱処理により生成された R相ニッケルチタンファイル


安定した操作性と安全性でNi-Tiロータリーファイル導入をスムーズにします。
クラウンダウン法で効果的な拡大・形成が行えます。

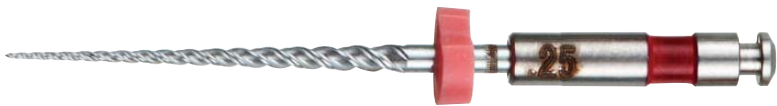

K3XF
Rotary Nickel Titanium File


クラウンダウン法とは？

歯冠側から根尖方向に向けて切削していきます。
大きなテーパーから順次使用し拡大するので、ファイルが根管壁に接する面積（作業域）を一部分に制限でき、効率的な拡大・形成ができます。また、その後に使用するファイルへのストレスが軽減し、ファイルの破折を最小限にします。

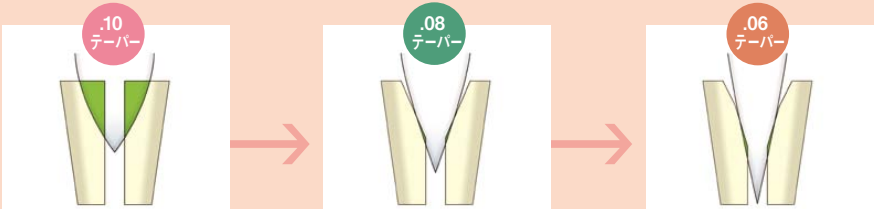


複雑な熱処理により生成された
R相ニッケルチタンファイル







当社のTFファイル同様にR相ニッケルチタンを使用しています。これにより、K3 XFファイルの柔軟性を高め、金属疲労の低減を図っています。

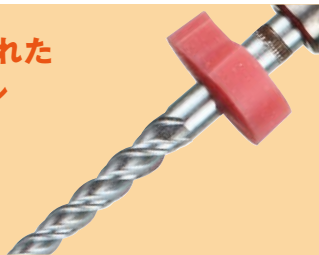

シンプルなカラーコード

シャンク上のカラーコードとセフトーラーバーのカラーでサイズを表示。今までの当社ファイルと比較して、シンプルなサイズ表示でファイルサイズの判別を容易にしました。

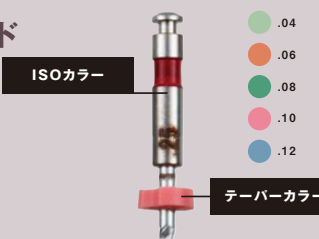

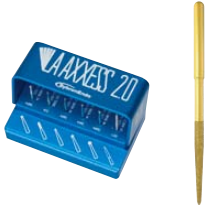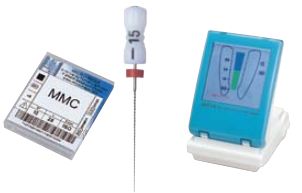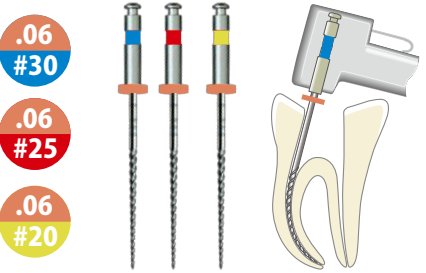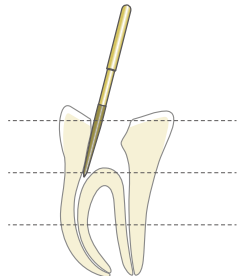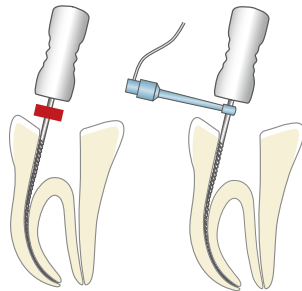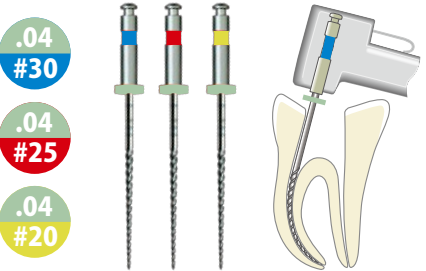1 根管口明示	2 穿通 + 根管長測定	中～太根管			
まずはLAアクセスバーなどにより 歯冠側根管1/3付近まで 直線形成します。	#8または#10のKファイルを用います。 穿通:#8または#10 手用ファイル:#8～#20	3 #25/0.10テーパーのファイルから使用し クラウンダウン法で根管形成します。	4 #40/0.06テーパーのファイルを使用。	5 #35/0.06テーパーのファイルを使用。	6 #30～#20/0.06テーパーまで下げてても作業長まで達しない場合は、 もう一度#40/0.06テーパーファイルに戻り 作業長に到達するまでクラウンダウン法を繰り返します。
					
MB2根管や細い根管					
		3 #25/0.08テーパーのファイルから使用します。	4 #40/0.04テーパーのファイルを使用。	5 #35/0.04テーパーのファイルを使用。	6 #30～#20/0.04テーパーまで下げてても作業長まで達しない場合は、 もう一度#40/0.04テーパーファイルに戻り 作業長に到達するまでクラウンダウン法を繰り返します。
					
K3 XFファイル使用のトルク:3.0Ncm					


- K3 XFファイル 使用上の注意点**
- ①回転数は350～500r.p.m.でご使用ください。
 - ②次亜塩素酸ナトリウム、EDTA製剤を併用してください。
 - ③押し込まないでください。
 - ④切削時は1mmの範囲で4～5回上限運動をさせながら根管形成を行ってください。
 - ⑤ファイルについての切削粉は除去してください。
 - ⑥Kファイルで再度穿通性を確認してください。

K3 XFファイル使用のトルク:3.0Ncm

作業長まで到達しない場合は、もう一度#40/0.06（中～太根管）#40/0.04（MB2根管や細い根管）テーパーファイルに戻ります。


K3 XFファイルの主な特長

非切削性の先端

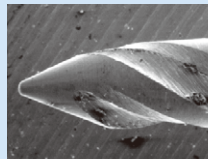


非切削性の先端チップのため、根尖移動をさせず安全な拡大・形成が行えます。

広いラジアルランドサポート

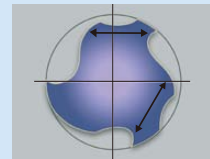


幅広いラジアルランドサポートがファイルの破折を防ぎます。

3つ目の異なる刃の形状

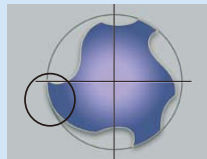


3つ目の幅広いラジアルランドがあるため根尖変位を防ぎ、根管の中心を保つように設計されています。

ポジティブな切削角度

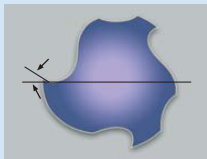

効率的な拡大・形成が可能です。


可変螺旋角度

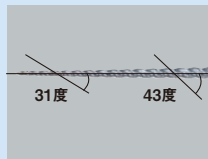

末端部の螺旋角が先端部より大きくなっているため、根管へのくい込みが少なく、切削粉を効率良く歯冠側へ運び出します。また、目詰まりによるファイルの破折を防止します。

K3 XFファイルの症例

●症例1

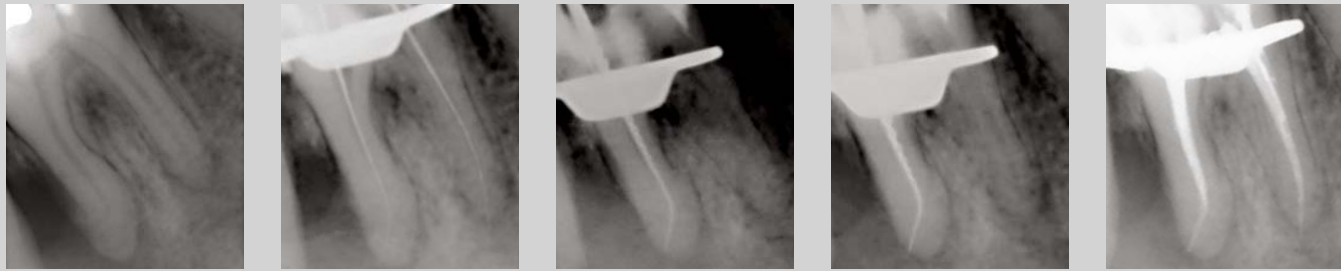

使用したファイルの順番は
#10/Kファイル→#15/Kファイル→#40/0.04 K3 XF→#35/0.04→#30/0.04→#25/0.04→#20/0.04→#20/0.06

●症例2



#60までラインナップされているから太い根管や再根管治療にも対応。

