

YOSHIDA

# 側枝の高さがみえる

根尖までの距離がみえる / 大画面でみえる



ファイルの先端が側枝に到達したとき  
マークが点滅するとともにブザー音で  
お知らせ

**JUSTY** **IV**  
ROOT APEX LOCATOR

根管長測定器 ジャスティⅣ

※目盛りは根管の先端から実際の距離の近似値を示しますが、根管拡大や根管洗浄、あるいは根管の状態によっても値が変化する場合があるので、あくまでも目安として使用してください。

# ジャスティVの特徴


独自の高精度測定に大画面表示で、側枝の高さがみえる/根尖までの距離がみえる※1



## 側枝の高さを検知、お知らせ

根管にある側枝を検知し、画面表示とブザー音でお知らせ。

計測可能な側枝は、  
直径: >0.15mm、  
高さ: APEX から 2.5~5mm

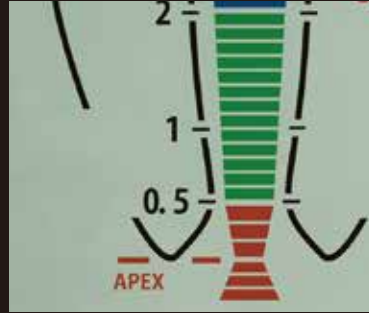

## 独自の高精度測定で根尖までの距離を計測

2種類の周波数の組み合わせから、常に整合性を確認する「統合補足測定システム」搭載。口腔内の環境に影響されず、ドライでもウェットでも測定可能。



## 見やすい大きな液晶表示


大画面で鮮やかな画面表示。ファイルの到達距離に応じて3段階で色分け。

※1 目盛りは根管の先端から実際の距離の近似値を示しますが、根管拡大や根管洗浄、あるいは根管の状態によっても値が変化する場合があるので、あくまでも目安として使用してください。

# ジャスティVの根管長測定方法と表示例


## 01 根管長測定Ver.

根管内にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが連動し、ファイルがAPEXに到達するとブザー音でお知らせ。

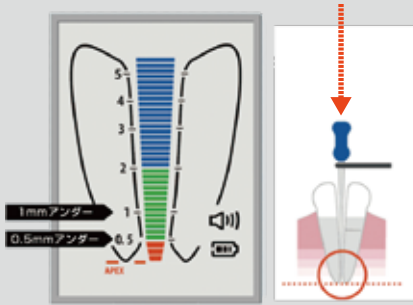


## 02 側枝検出Ver.

側枝がある場合は、ファイルを根管内から抜いたときに画面に「LC」マークが表示され、側枝のおおよその場所に※2が表示。

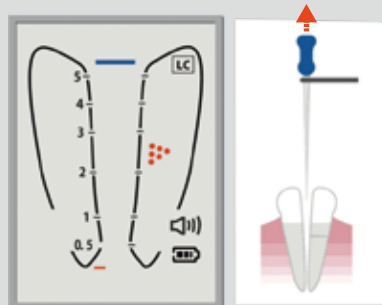

## 03 側枝の高さ計測 Ver.

ファイルを再度挿入し、ファイルの先端が側枝に到達したとき、画面の※2が点滅するとともにブザー音でお知らせします。

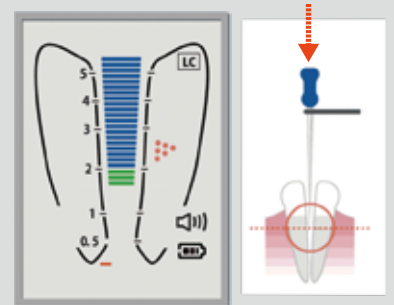

※2 側枝の場所はおよその場所であり、実際の計測位置と異なる場合があります。

## ジャスティVの付属品



チャンネルインストルメントホルダー 大・小 各2本(ファイルホルダー)

口角クリップ 3本

排唾管クリップ 1本

## ジャスティV仕様

- ◎ジャスティV本体 ●定格電源:DC3.0V(単4アルカリ電池×2本) ●消費電力:70mW ●測定電圧:AC50mV以下 ●測定電流:10μA以下 ●測定表示:LCD表示板/ブザー音
- 本体W80mm×D68mm×H115mm ●質量:190g(電池・ケーブル含む)
- ◎付属品 ●本体 ●チャンネルインストルメントホルダー大・小 各2本 ●口角クリップ3本 ●排唾管クリップ1本 ●単4アルカリ乾電池2本
- 一般的名称:歯科用根管長測定器 ●販売名:ジャスティV ●承認番号:30400BZX00196000(管理 特管) ●標準価格:150,000円(税別)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2023年10月現在。

禁無断転載

●取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●販売元: 株式会社 **ヨシタ** 東京都台東区上野7-6-9  
●製造販売元: 藤栄電気(株) 神奈川県横浜市都筑区大丸26



(01)02747937021101

C02540/2023年10月/PRI/10/@20/新