


側枝の位置を検知
表示と音でお知らせ



根管にある側枝を検知し、画面
表示とブザー音でお知らせ。

計測可能な側枝は、直径: >0.15mm、
高さ: APEX から 2~5mm


独自の高精度測定で
根尖までの距離を計測

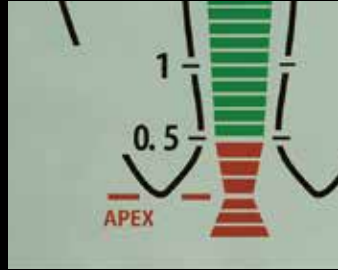

2種類の周波数の組み合わせから、
常に整合性を確認する「統合補足
測定システム」搭載。口腔内の環境
に影響されず、ドライでもウェット
でも測定可能。

NEW チェックモード


根管内の測定に適切な
通電性が保たれているか
を調べるモードを搭載

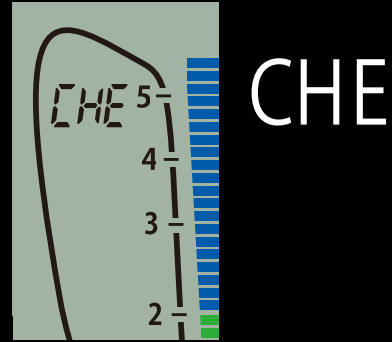

根管長測定方法と表示例


01 根管長測定モード

根管内にファイルを挿入するとリアルタイムで
メーターが連動し、ファイルがAPEXに到達する
とブザー音でお知らせ。

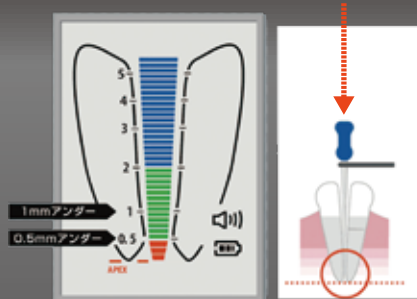


02 側枝検出モード

側枝がある場合は、ファイルを根管内から抜いた
ときに画面に「LC」マークが表示され、側枝の
おおよその場所に「※」が表示。※

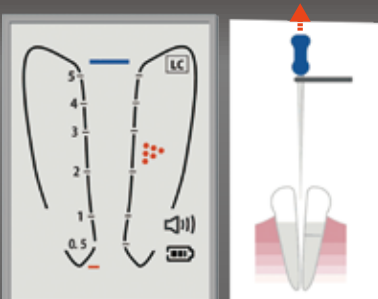

03 側枝位置計測モード

ファイルを再度挿入し、ファイルの先端が側枝に
到達したとき、画面の「※」が点滅するとともにブザー
音でお知らせします。

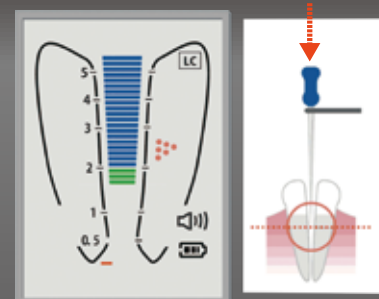

※側枝の場所はおおよその場所であり、実際の計測位置と異なる場合があります。

ジャスティVプラスの付属品



ジャスティV PLUS 仕様
◎ジャスティV Plus本体 ●定格電源:DC3.0V(単4アルカリ電池(1.5V)×2本) ●消費電力:70mW ●測定電圧:AC50mV以下 ●測定電流:10μA以下 ●測定表示LCD表示板/ブザー音
●本体W80mm×D68mm×H115mm ●質量:170g(電池含まず)
◎付属品 ●本体 ●チャンネルインスツルメントホルダー大2本、小1本、クリップ1本 ●口角クリップ3本 ●排唾管クリップ1本 ●単4アルカリ乾電池(1.5V)2本
●一般的名称:歯科用根管長測定器 ●販売名:ジャスティV(型式TME-604A) ●認証番号:30400BZX00196000(管理 特管) ●標準価格:150,000円(税別)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年9月現在。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●販売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9
●製造販売元: 藤栄電気(株) 神奈川県横浜市都筑区大丸26



(01)02747937023471
C02777/2025 年 9 月 /@40/ 新

側枝の高さが見えるJUSTY IVに

新たな機能とパーツをプラス

JUSTY IV+
ROOT APEX LOCATOR

根管長測定器 ジャスティV PLUS

NEW チェックモード

CHE

根管内の測定に適切な
通電性が保たれているか
を調べるモードを搭載

側枝モード

LC

ファイルの先端が側枝に
到達したときマークが
点滅するとともにブザー
音でお知らせ


NEW チャンネルインスツルメントホルダー(クリップ)

- 口腔内でも邪魔にならず、測定が可能
- ヘッドが軽くファイルから手を放しても引っ張られない
- スムーズなファイルの着脱が可能


(ファイルは別売りです)

根管長測定モード


- ① 根管内にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが連動。

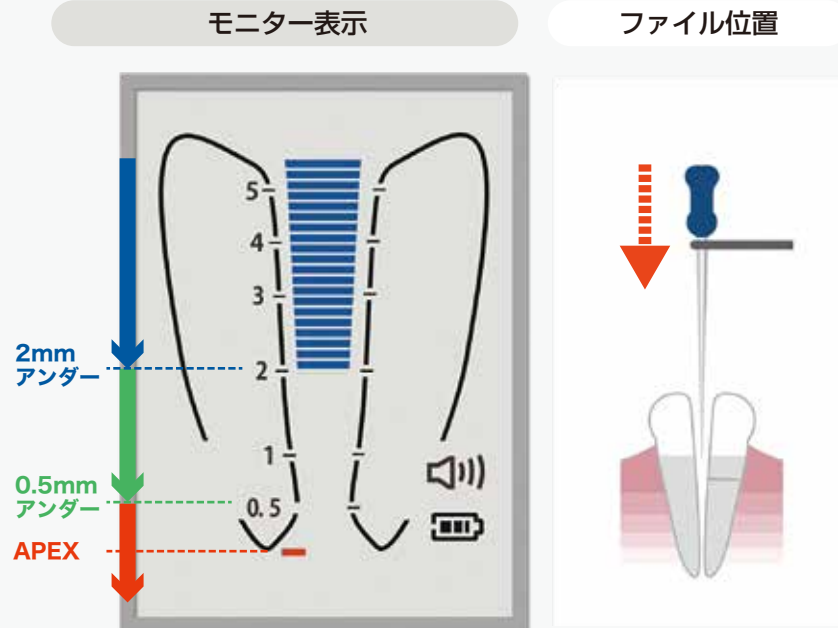

- ② メータスケールでファイルの位置を表示。

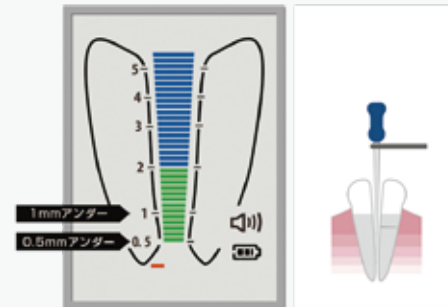

- ③ ファイルがAPEXに到達するとブザー音でお知らせ。

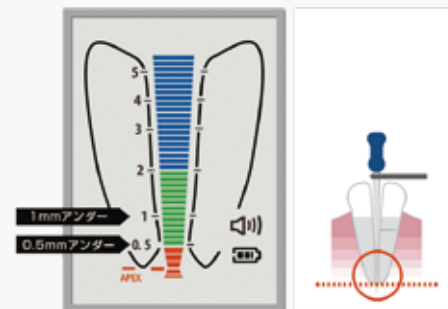


側枝モード

LC ファイルの先端が側枝に到達したときマークが点滅するとともにブザー音でお知らせ。


側枝検出モード

側枝がある場合は、ファイルを根管内から抜いたときに画面に「LC」マークが表示され、側枝のおおよその場所に が表示。[※]

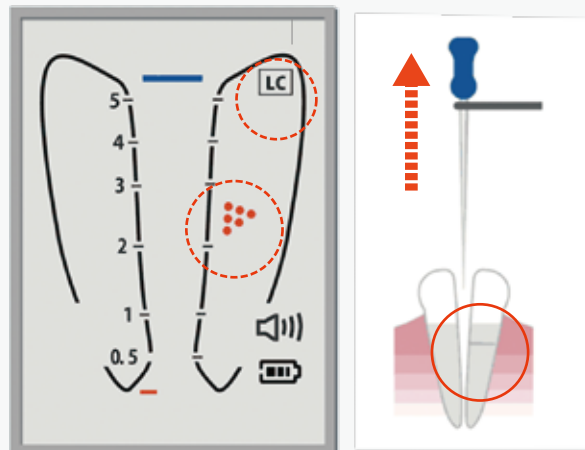

側枝位置計測モード

ファイルを再度挿入し、ファイルの先端が側枝に到達したとき、画面の が点滅するとともにブザー音でお知らせします。

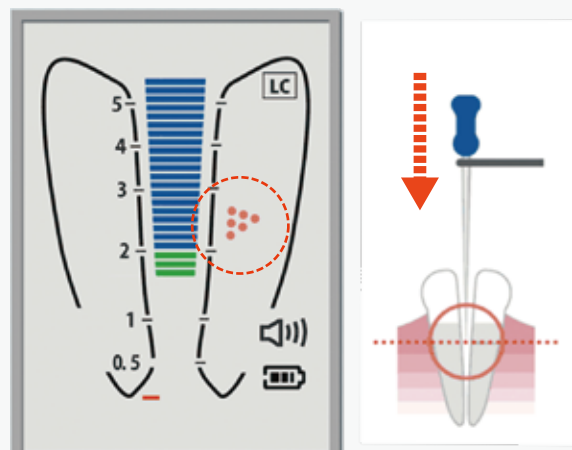

[※]側枝の場所はおおよその場所であり、実際の計測位置と異なる場合があります。



先生のメリット

予め複雑な根管形態であることを確認できることで、治療計画を立てやすくなり、治療方針の目安としていただけます。




患者のメリット

より詳細な治療説明を受けられることにより安心感を感じることができます。

NEW チェックモード

CHE 根管内の測定に適切な通電性が保たれているかを調べるモードを搭載

- ① APEX までファイルを到達させたあと、チェックボタンを押すとモニターに「CHE」が表示され、チェックモードに。

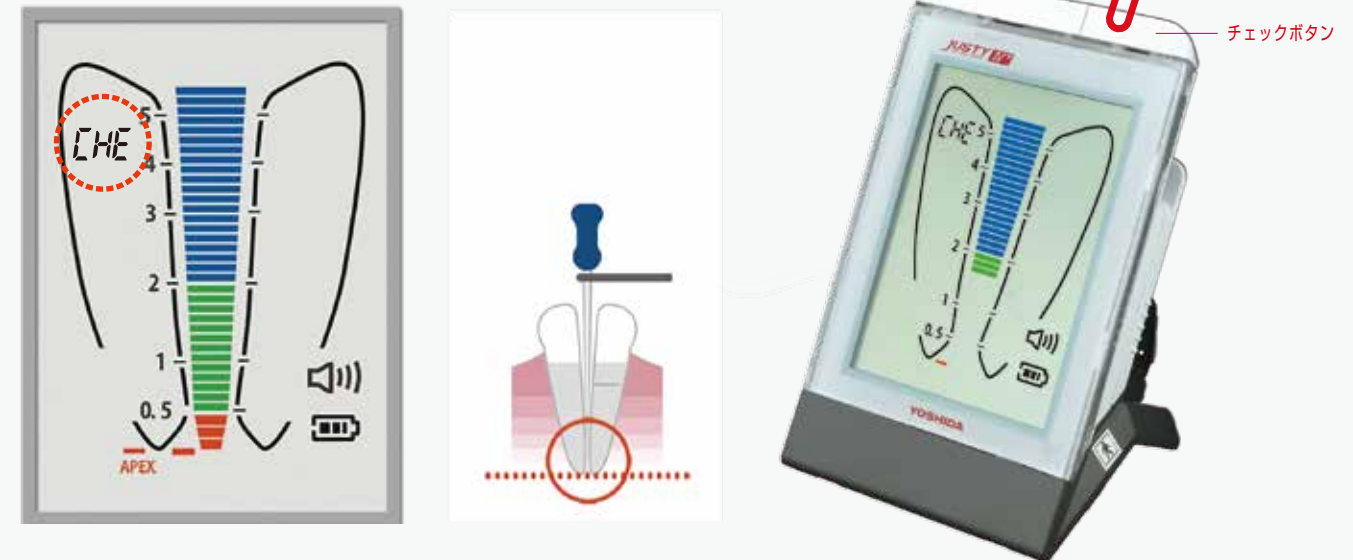


- ② 測定中の通電性(電流値)の状態によりメータの指示値が変化。




根管内の通電性が弱い



根管内の通電性が適正

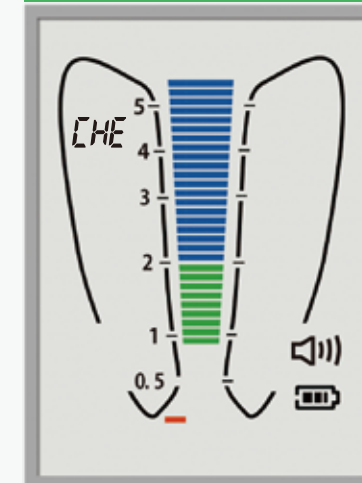

根管内の通電性が強い

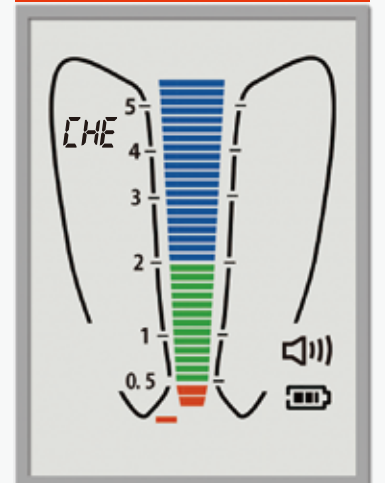

- ③ 指示値をもとに適時根管内の環境を改善してください。
④ チェック終了後、再度チェックボタンを押して根管長測定モードに戻してください。


NEW キャナルインストルメントホルダー(クリップ)

- 口腔内でも邪魔にならず、測定が可能。
- ヘッドが軽くファイルから手を離しても引っ張られない
- スムーズなファイルの着脱が可能。




(ファイルは別売りです)

キャナルインストルメントホルダー(クリップ)

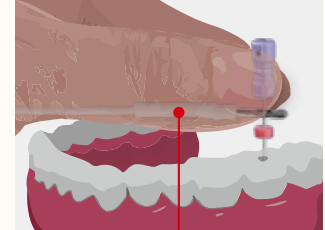

キャナルインストルメントホルダー

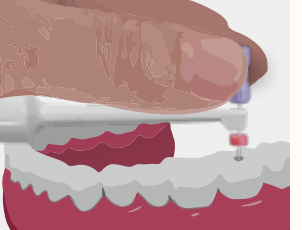

口腔内に入る管が細くなり、引っかかりにくくなりました。