

KAIGO NENMAKU BRUSH PRO

DENT-CARE[®]
DC-93

＜オーラルケア用粘膜ブラシ＞
介護粘膜ブラシ プロ

口腔内の食物残渣を除去する

日本で最初に要介護者向け舌清掃具を開発した歯学博士が設計し、訪問歯科の歯科医師・歯科衛生士チームが開発に参加した「介護粘膜ブラシ」は、食物残渣を口腔外へ効率よく取り出すことができます、要介護者向けの口腔粘膜清掃用ブラシです。(特許申請中)

Fr.12
エアロフローチップカテーテル
推奨



ループ内側のブラシ同士がからんで、網となり、スプーンブラシとして口腔内の粘膜や歯面に付着した食物残渣を、効果的に口腔外へ取り出すことができます。また、お手持ちのカテーテルも本体に取り付けることができます。

用途

- 頬粘膜、舌粘膜、口蓋、上下顎堤の粘膜面、及び歯面の清掃。
- 口腔粘膜のマッサージ。

ブラシメントから進化→舌・粘膜OK

ベットのサイドに吸引システムがある場合は、本ブラシにカテーテルを接続

使用方法

- ① あらかじめブラシを水で濡らします。
- ② 力を入れすぎて粘膜を傷つけないように、粘膜及び歯面を清掃します。
- ③ ブラシの両面とも使用することができますので、部位によって使い分けてください。
- ④ 歯ブラシ同様、使用後は流水下で汚れを十分に洗い流します。

保管方法はブラシが乾燥するように立てかけるか、変形しないようにブラシが上を向くように置いてください。

カテーテルの取り付け方

- ① ブラシ屈曲側とは反対側からハンドル後部の穴にカテーテルを差し込みます。(イラスト参照)
 - ② 次に、ハンドル中央部の穴に、カテーテル先端を通します。
 - ③ ブラシの輪内にカテーテル先端を上からつきさし、ワイヤーループ先端にカテーテル先端部があたって押さえられるようにします。
- ※ハンドル上のカテーテルを人差し指か、輪ゴムで固定しながら、清掃、吸引します。

ご注意

- 粘膜面に異常がある場合や、出血している場合は使用を中止してください。
- 粘膜面を傷つけることがありますので、強く力を入れすぎないようにしてください。
- 小児の手の届かない清潔な場所に保管してください。



(汚水のゴエン予防も) 行える。

| 商品名 | 定価 | JANコード |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 介護粘膜ブラシ プロ DC-93 | 660円 33円 (消費税) 693円 (総額) | 4 971940 580029 |

※内箱6本入

| 家庭用品品質表示 | | | |
|----------|------|-------|------|
| 柄の材質 | 毛の材質 | 毛の硬さ | 耐熱温度 |
| ポリプロピレン | ナイロン | やわらかめ | 80℃ |



台紙(古紙配合比率70%)

● 包装は環境に優しいVA-PET(ポリエチレン テレフタレート)を使用しています。

亀水化学工業株式会社

大阪府寝屋川市豊里町 17-16 〒572-0071
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299
フリーダイヤル: 0120-267-720
http://www.twin.ne.jp/~kamemizu
E-mail: kamemizu@po.twin.ne.jp