



## PCP (Professional Care for Prophylaxis) 商品

PCPIは松風が提唱する、口腔衛生や予防のための新しい概念で、PCP商品はそれらに最適な商品群です。

メルサージュ シリーズは、口腔衛生のプロフェッショナルケアを始めるデンティスト、  
ハイジニストの方々に強力にサポートするPCP商品です。

# メルサージュ システム



メルサージュ システムは、「患者様に気持ちよく、喜んでいただける」効率の良い確実な  
PMTCをお手伝いします。

# フッ素配合歯面研磨ペースト メルサーージュ

操作性に優れたフッ素配合歯面研磨ペーストです。  
適度な粘性を有し、飛散の少ないペーストは、高齢者や唾液の少ない患者様にも最適です。



## 優れた親和性

だ液との相性が良いので水を加える必要がなく、素早くクリーミーな泡状になり歯面に良くなじみます。ほど良い泡立ちでムダなく使い切れ、しかも簡単に洗い流せます。

## 爽やかなミントとレモンの香り

ペーストは色と香りで識別しやすくなっています。



**ファイン（細粒・レモン）**  
メルサーージュ ブラシやカップで仕上げ研磨を行います。

**レギュラー（粗粒・ミント）**  
メルサーージュ ブラシを併用し、頑固な汚れを除去します。

	着色の著しい方	再着色期間が短い方 滑沢性が出にくい方	補綴物 (装着期間の短い)	脱灰・白濁の 見受けられるところ	ホワイトニング後 歯面清掃器使用后
<b>メルサーージュ レギュラー</b>	↑	↑			
<b>メルサーージュ ファイン</b>	↓	↓			↑
<b>メルサーージュ プラス</b>	↕	↕	↕	↕	↕

↕ : 主として使用します。 ↕↔ : 使用する場合があります。

# フッ素配合歯面研磨ペースト（薬用歯磨）

# メルサーージュプラス 医薬部外品

PMTCの最終仕上げにお使いいただくことで、ツヤのあるなめらかな歯面と、プラークやステインの再付着を遅延化できます。



## 天然歯・補綴物へのや・さ・し・さ

天然歯だけでなく、補綴物に傷をつけずにやさしく研磨をすることができます。




写真提供/ウチヤマ歯科医院 内山 茂 先生

- フッ素950ppm配合      フッ素がう蝕の発生および進行を抑制します。
- 塩酸クロルヘキシジン配合      殺菌効果によりう蝕や歯周病を予防し、口臭を防止します。

## プロフェッショナルケアによるプラス効果

**STEP 1**  
メルサーージュプラスで最終研磨

低回転ですり込むように研磨を行なってください。  
なめらかで輝きのある歯面でプラーク・ステインの再付着防止。

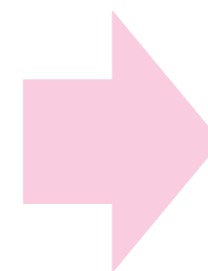

**STEP 2**  
メルサーージュプラスを小さめの歯ブラシに少量とり、歯面全体に軽くブラッシング

薬用成分をできるだけ停滞させることによりう蝕・歯周病予防効果を高めることが期待できます。

### 塩酸クロルヘキシジンの殺菌効果について

塩酸クロルヘキシジンは強い抗菌性と広範囲の微生物に作用し、特にブドウ球菌などのグラム陽性球菌には、低濃度でも迅速な殺菌作用を示します。クロルヘキシジンはカチオン性の物質で、アニオン性の細菌表面や口腔内表面に吸着して長時間口腔内に滞留し、持続的な殺菌作用を発揮します。  
(注) 塩酸クロルヘキシジンはグルコン酸クロルヘキシジンと比較してショック症状の報告はほとんどありませんが、クロルヘキシジンに対する過敏症の既往歴がある患者様には使用しないでください。

Message Screw Type Brush and Cup

スクリータイプ(ねじ込み式)

メルサージュ(ブラシ)  
歯面研磨清掃用



メルサージュ(カップ)  
歯面研磨清掃仕上げ用



スクリータイプのコントラアングルハンドピースでご使用いただけるブラシ・カップです。  
従来のCA用(ラッチタイプ)より作用距離が短く、より快適な作業性を確保できます。

※ラッチタイプのコントラアングルハンドピースでご使用の際は、ブラシ・カップを別売のPCPマンドレルに装着してお使いいただけます。



No.13使用

メルサージュブラシ スクリュータイプ		
No.11	フラット	ブラシの細さを活かして狭い凹み部分の清掃・研磨
No.13	ペンシル	とがった先端部を活かして小窩裂溝や叢生、歯間部などの狭い部分の清掃・研磨



カップ No.13使用

メルサージュカップ スクリュータイプ		
No.12	ウェブソフト	ウェブを活かして、切縁や隅角部、しっかり当てたい部位の清掃・研磨
No.13	コーン	先端を押し当てることにより、隣接面の研磨やマージン部、ブラケットや矯正用バンド周辺、先端部分を活かして歯周ポケットの清掃・研磨
No.14	リップソフト	カップの裾が広がりやすく、リップを活かして隣接面や歯肉縁下の清掃・研磨
No.15	リップ&ウェブミニ	ラテックスフリータイプのコンパクトな形状で、小児や白歯部の舌側隅角部などの清掃・研磨



カップ No.15使用

※逆回転について 逆(左)回転するとブラシやカップはコントラハンドピースから外れる恐れがあります。また、マンドレルを装着したブラシ、カップも外れる恐れがありますので、逆(左)回転のご使用はご注意ください。

Message Latch Type Brush and Cup

CAタイプ(マンドレル一体式)

メルサージュ(ブラシ)  
歯面研磨清掃用



メルサージュ(カップ)  
歯面研磨清掃仕上げ用



ラッチタイプのコントラアングルハンドピースでご使用いただける  
CAタイプのブラシ・カップです。

豊富な形態から部位や目的に合わせて効率よく選択してご利用いただけます。



ブラシ No.2使用

メルサージュブラシ CAタイプ		
No.1	フラット	ブラシの細さを活かして狭い凹み部分の清掃・研磨
No.2	フラットリング	リング状のソフトなブラシなので広い歯面や隣接面、染め出し後のプラーク除去の清掃・研磨
No.3	ペンシル	とがった先端部を活かして小窩裂溝や叢生、歯間部などの狭い部分の清掃・研磨



カップ No.3使用

メルサージュカップ CAタイプ		
No.1	リップ&ウェブレギュラー	適度な弾力を活かして、頑固なステイン除去
No.2	ウェブソフト	ウェブを活かして、切縁や隅角部、しっかり当てたい部位の清掃・研磨
No.3	コーン	先端を押し当てることにより、隣接面の研磨やマージン部、ブラケットや矯正用バンド周辺、先端部分を活かして歯周ポケットの清掃・研磨
No.4	リップソフト	カップの裾が広がりやすく、リップを活かして隣接面や歯肉縁下の清掃・研磨



カップ No.4使用

PCPマンドレル CA

(スクリー式ブラシ・カップ用アタッチメント)

スクリータイプのブラシ、カップをラッチタイプのコントラアングルハンドピースに取り付けてお使いいただくことのできる全長14mmのアタッチメントです。

メルサージュ ブラシ・カップ、PCPマンドレルの使用上の注意事項 最高許容回転速度：2,000min<sup>-1</sup>

※最高許容回転速度を超えて使用しないこと。  
※メルサージュ カップ(No.15を除く)は、天然ゴムを使用しています。天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある歯科医療従事者の使用および患者への使用は禁止すること。  
※本体および本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎などの既往歴のある患者には使用しないこと。  
※スクリータイプのブラシおよびカップはモーターを逆(左)回転させるとハンドピースから外れるので口腔内では必ず正(右)回転で使用すること。



歯面研磨材  
プレサージュポイント



プレサージュポイントは、歯面を傷つけることなく強固に付着した汚れを除去することができる歯面研磨用のポイントです。

ポリッシング準備に時間がかからない

確認しながら汚れを落とせる

オートクレーブ滅菌対応

研磨は乾式で行い、軽いタッチで発熱に十分注意しながらお使いください。最高許容回転速度：5,000min<sup>-1</sup>



# PMTC用コードレスハンドピース メルサーージュ プロ



メルサーージュプロは、軽量・コンパクトボディの  
PMTC用コードレスハンドピースです。

## 広範囲なスピードセッティング

3種類のギア(シャンク)を交換することで、125~10,000min<sup>-1</sup>の広範囲な回転速度設定ができます。  
また、定格負荷で連続約1時間の使用が可能です。  
(使用状況により異なります。)

コントラアングルヘッドリング色	ギア	回転速度min <sup>-1</sup>									
		2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	
赤	1:1										
黒	4:1	500	750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	
黄	16:1	125	190	250	310	375	440	500	560	625	

※1:1、16:1のギア(シャンク)は別売品です。


## シンプルなコントロールパネル

コントロールボタンはすべて  
ハンドピース上面に設置して  
いますので、操作が容易です。



## ヘッドの向きは6通り

ヘッドは部位に応じて6方向  
(60度毎)に向きを変えて取  
り付けることができますので、  
操作性が大幅に向上します。

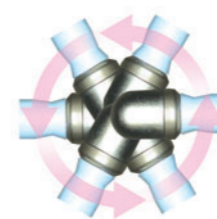

## 仕様

チャージャー：定格電圧AC100V 50/60Hz、充電時間90分、  
寸法W95×D115×H63 (mm)、質量320g  
ハンドピース：定格電圧 DC2.4V、ニッケル水素電池(充電式単4電池)、  
寸法W26×D141×H24 (mm) (コントラアングルヘッドを除く)、  
質量85g (コントラアングルヘッドを除く)

## 包装・価格

PMTC用コードレスハンドピース  
**メルサーージュ プロ セット**  
(1/4減速スクリータイプ)

### セット内容

- ハンドピース
- チャージャー
- 1/4減速シャンク (F4R)
- スクリータイプ・ヘッド (ARS)



PMTC用コードレスハンドピース  
**メルサーージュ プロ セット**  
(1/4減速ラッチタイプ)

### セット内容

- ハンドピース
- チャージャー
- 1/4減速シャンク (F4R)
- ラッチタイプ・ヘッド (NAC)




## 軽く・バランスのよいコンパクトなボディ

操作性を重視し、軽量・コンパクト、バランスの良いデ  
ザインにより、歯科衛生士の方にも疲れにくいハンド  
ピースです。



## スクリータイプは届きにくかったところもスムーズに

スクリータイプはラッチ  
タイプと比べて、ヘッドが  
小さくブラシ、カップ先端  
までの作用距離が短くなり  
ます。そのため上顎臼歯部  
頬側にも届きやすくスムー  
ズに作業できます。

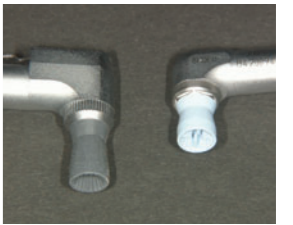

左:ラッチタイプ(メルサーージュ カップ No.4)  
右:スクリータイプ(メルサーージュ カップ No.15)

## 別売品

メルサーージュ プロ チャージャー (電源コード付)



メルサーージュ プロ ハンドピース (モーターキャップ付)



メルサーージュ プロ スクリータイプ・ヘッド (ARS)



メルサーージュ プロ ラッチタイプ・ヘッド (NAC)



メルサーージュ プロ 等速シャンク (FC)



メルサーージュ プロ 1/4減速シャンク (F4R)



メルサーージュ プロ 1/16減速シャンク (F16R)



販売名

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
メルサージュ	歯科用口腔内清掃キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000147
PCPマンドレル	歯科用マンドレル	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000015
プレサージュポイント	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000013
メルサージュ プロ	歯科用電動式ハンドピース	管理医療機器 医療機器承認番号 21400BZZ00445A01 特定保守管理医療機器

包装・価格



メルサージュ

フッ素配合 歯面研磨ペースト

【種類】 レギュラー (粗粒・ミント)  
          ファイン (細粒・レモン)

■ 各1本40g



薬用歯磨 医薬部外品

メルサージュ プラス

フッ素配合 歯面研磨ペースト

■ 1本38g



スクリュータイプ  
メルサージュ (ブラシ)

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

■ No.11  
■ No.13



CAタイプ  
メルサージュ (ブラシ)

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

■ No.1  
■ No.2  
■ No.3



スクリュータイプ  
メルサージュ (カップ)

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入

■ No.12  
■ No.13  
■ No.14  
■ No.15



CAタイプ  
メルサージュ (カップ)

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入

■ No.1  
■ No.2  
■ No.3  
■ No.4



PCPマンドレル

スクリュー式ブラシ・カップアタッチメント

■ アタッチメント 12本入



プレサージュポイント

歯面研磨材

■ 25個入  
専用マンドレル  
タイプ1 (CA用) 1本付



関連商品



薬用歯磨 医薬部外品 歯科医院用

メルサージュ クリアジェル  
メルサージュ クリアジェル キッズ

フッ素配合口腔ケアジェル

【包装・価格】

メルサージュ クリアジェル  
(アップルミントフレーバー)  
メルサージュ クリアジェル キッズ  
(ピーチフレーバー)  
各1本60g



薬用歯磨 医薬部外品 歯科医院用

メルサージュ ヒスカア

1本80g



メルサージュ PC ペレット

歯垢・歯石染色材

●種類・用途 レッド(歯垢染色用)、  
                  ブルー(歯垢・歯石染色用)

●包装・価格 1瓶(100個)



デントテープ 100ヤード・ロウ付

【包装・価格】 1個

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

すべては、患者様のために

松風はMiCDというコンセプトを提唱いたします。

松風   <http://www.shofu.co.jp/micd/>

取扱い店



Minimally Invasive  
Cosmetic Dentistry

世界の歯科医療に貢献する



株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1208.JEJTI