



義歯はお手入れが大切です。

ラクシデント

**LUXIDENT**

義歯清掃用ブラシ

色調 イエロー、グリーン  
患者価格1本¥500

ピカ

**PIKA**

義歯洗浄剤

患者価格  
1箱¥700

ピカ入れ歯洗浄保存容器

**PIKA DENTURE BOX**

義歯洗浄保存容器

色調 イエロー、グリーン  
患者価格1個¥1,000

価格は2002年12月現在の患者価格(消費税抜き)

# さわやかなデンチャーライフのために…

## 食べカスや歯垢には…

### ラクシデント 義歯清掃用ブラシ

義歯は天然歯と同じ様に食後と就寝前には、目に見える食べカスや歯垢などの汚れを取るために取り外してブラシで洗う必要があります。持ちやすいグリップ、使い易く美しいフォーム。ラクシデントは義歯を清掃するための専用ブラシは操作性を求めた機能的なデザインを採用しました。ブラシは、便利なツインタフト(2つの植え込み)でソフトな材質は義歯を傷付けることはありません。

短く広い面積の植毛部は口蓋や人工歯面、もう一方の植毛部はそれ以外のクラスプ等、狭い部分を清掃するのに適しています。

おしゃれなパステルカラー2色を揃えています。



## カンジダ菌や着色性の汚れには…

### ピカ 義歯洗浄剤

包装・青色包装(錠剤) 28回分・赤色包装(顆粒) 4回分

義歯に付着した目に見えない菌(カンジダ菌)を完全に除くためには、就寝前にラクシデントで清掃後、義歯洗浄剤での洗浄が必要です。カンジダ菌という真菌(カビの一種)は、義歯の汚れの主体で悪臭の原因となり、義歯性口内炎など口腔カンジダ症を誘発します。

**ピカ青色包装は、**カンジダ菌を溶菌除去する特殊な酵素(ザイモリエイズ、キタラーゼ)と蛋白分解酵素(ノボザイム)を配合した酵素剤タイプ。毎日使用してください。

**ピカ赤色包装は、**タバコのヤニなどの着色性の汚れを強力に除去するアルカリ酸化剤タイプで、義歯特有の臭いも分解できます。週一回使用してください。

これにより、義歯の目に見える汚れも目に見えない汚れ(菌)も全部落とし、さわやかなデンチャーライフをお届けします。



### ピカで洗浄する際に…

### ピカ入れ歯洗浄保存容器

内側の容器がパイレックス製(耐熱ガラス)ですので、長期間使用しても嫌な臭いやキズがつきにくく、煮沸消毒できていつまでも衛生的に使用できます。取っ手付きで持ち運び易く、また、ふたをすると中の義歯が丸見えにならず、洗面所やお部屋のどこに置いてもマッチするデザインとカラーです。ピカで洗浄する際にお使いください。



ご使用の際は、使用説明書をよくお読みいただくよう患者さんにお伝えください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 千605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社: 東京(03)3632-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)298-2332/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6252-8141/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

0305AJJS