

陶材研削用ダイヤモンドポイント

## ボーセレンマスターキット

概形から周波条の付与まで 陶材の形態修整を助けるポーセレンマスター


SHOFU INC.

## 概形から周波条の付与まで 陶材の形態修整を助けるポーセレンマスターシリーズ

## 【用途】概形付与、形態や排列状態の確認

研削性が高く効率的な作業が可能です。概形確認が容易にできることで 形態修整に客観性を持たせ、形態の再現性を高めます。

各アングルからの 概形確認

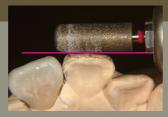





先端の丸みを利用



唇側面隆線の付与



舌側面の凹面部の付与



直線部を利用した研削

# Select Diamond Ho

## 隆起や谷間の付与

ポーセレンマスター SD

**31YN** 

【用途】隆線付与、舌側面の形態付与

隆起や谷間を付与するために 最適な形状です。



唇側面隆線の付与



舌側面辺縁隆線の付与



横走溝の付与



## 形態を繋ぐ切り札

ポーセレンマスター SD

**19YN** 

## 【用途】隆線の調整、咬合面の形態付与

31YNで付与した形態の調整など、 オールマイティに使用できます。



唇側面細部の修整



唇側面V字溝の調整

## red Diamond HP

## 「しなり」が生み出すエレガントな表徴

ポーセレンマスター D

1YN

and Point Ha

【用途】表面性状の付与(歯間の調整、咬合面形態の調整)

最適な「しなり」により、自然感のある繊細な表面性状や 周波条の再現ができます。



周波条の付与

周波条の付与は、歯面の凹凸に沿わせながらバーを 近遠心に平行に走らせることがポイントです。 決して縦の凹凸を崩さないようにします。





注意

1YNは細くて曲がり易いため、無理な力を加えて使用したり高速回転で使用することはお避け下さい。(5,000min・1以下)





## 包装·形態

#### ポーセレンマスター キット (HP)

【キット内容】

- ●ポーセレンマスター D 〈1形態〉 2本/1YN
- ●ポーセレンマスター SD 〈3形態〉 各1本/19YN、31YN、50YN

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号	
ポーセレンマスター キット	歯科技工用研削・研磨器材キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000203	
ポーセレンマスター D	歯科技工用ダイヤモンド研削材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000201	
ポーセレンマスター SD	歯科技工用ダイヤモンド研削材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000202	



【単品販売】 ポーセレンマスター D(HP) 〈形態〉 1種 〈包装〉 1本入 1YN

otense Proceed Proceed Proceed Solidation

【単品販売】ポーセレンマスター SD(HP)〈形態〉 3種

〈包装〉 各1本入 19YN

31YN 50YN

ポーセレンマスター D	ポーセレンマスター SD		
1YN	19YN 31YN !	50YN	

関連商品 研磨仕上げ用ツール



一般医療機器 届出番号 26B3X00014000001 歯科用ゴム製研磨材

#### シリコンポイント Pタイプ(HP)

陶歯・陶材研磨仕上げ用 〈種類·形態〉PA···11 PB···11、13 〈包装〉各12本入



一般医療機器 届出番号 26B3X00014000011 歯科用ゴム製研磨材

#### セラマスター(HP)

陶材・歯冠用硬質レジン用 ダイヤモンドポリッシャー

〈種類·形態〉4種/10、11、13S、28 〈包装〉各3本入 ※No.28のみ4本入



一般医療機器 届出番号 26B3X00014000011 歯科用ゴム製研磨材

#### セラマスターコース(HP)

陶材・歯冠用硬質レジン用 ダイヤモンドポリッシャー

〈種類・形態〉4種/10、11、13S、28 〈包装〉各3本入 ※No.28のみ4本入



一般医療機器 届出番号 26B1X00004000148 歯科用研磨器材

## デュラポリッシュダイヤ

歯科用研磨コンパウンド (仕上げ用) 〈包装〉5g



一般医療機器 届出番号 26B1X00004000150 歯科用研磨器材

#### ピボットブラシ(HP)

研磨用ブラシ

〈包装〉12本入

陶材作業用筆							
種 類	毛 質	用途					
No.10	動物毛	築盛用					
No.2	ナイロン	築盛用					
No.5	ナイロン	築盛用					
No.7	ナイロン	築盛用					

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

₩₩	١.	r