

手軽に白い歯体験！

BeautiCoat

ビューティコート

歯面コーティング材

What is BeautiCoat?

手軽に歯を白く

ビューティコートは歯を削ったり、ホワイトニング材のように薬液を使用することなく白い歯を体験できる審美治療ツールです。

即日で処置を終えることも可能ですので、お急ぎの方にもご対応いただけます。

元に戻したい場合も簡単に除去できますので、患者様に気軽に白い歯を体験していただけます。

歯の色が気になる方や口元をイメージアップしたいという方に。

結婚式や同窓会など、特別な日に笑顔を輝かせるために。



★ どうやって歯を白くするのですか？

コンポジットレジンベースとしたペーストを歯面に一層コーティングすることで白く見せることができます。即日で処置することも可能です。

除去したい場合もBCアプリケーターで剥がすだけでもとの状態に戻すことができるため、患者様に、手軽に白い歯を体験していただけます。

※下顎には適用できません



写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)

★ 歯質への影響はありませんか？


コンポジットレジンベースとしたペーストを使用していますので、安全です。

プライマー処理による脱灰レベルは軽微であり、またペースト除去も比較的容易に行うことができるため、歯質へのダメージはほとんど認められません。

+ one point **GIOMER**

ビューティコートのペーストに含まれるS-PRGフィラーにはフッ素のリリース&リチャージ機能があります。

※適用期間中にフッ素の塗布やフッ素含有ハミガキを使用することで材料にフッ素がリチャージされるため、長期にわたり、フッ素の徐放を継続することが可能となります。

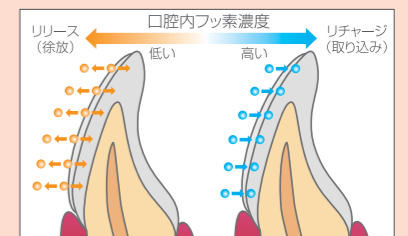


GIOMER 松風では独自技術S-PRGフィラーを含む材料群を「GIOMER」とカテゴライズしています。

★ 適用後どのくらい効果が持続しますか？


適用箇所や生活習慣等により個人差はありますが、1~3ヶ月程度効果を持続できます。

臨床で使用されているフロアブルタイプのコンポジットレジン(ビューティフィル フロー)と同程度の物性を有しています。また、少々剥がれてもリペアできますので、定期健診を行うなど、患者様に定期的に足を運んでいただくことで、より長く白さを保つことが可能です。

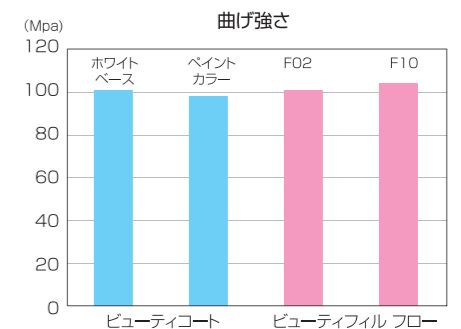

How to use?

8種類のカラーバリエーションにより、患者様合った白さを表現できます。

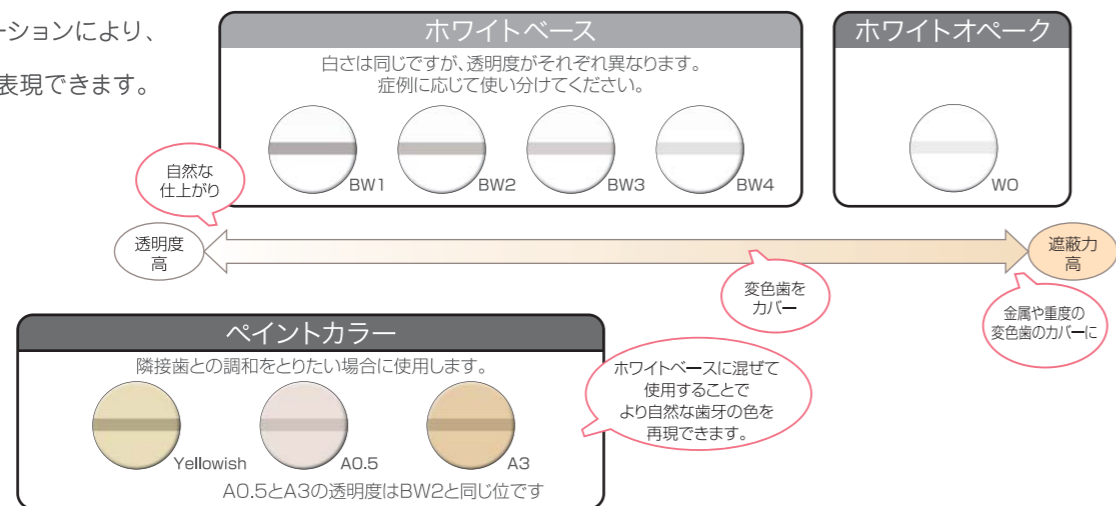


補綴修復物のカバーに(歯牙の一部に補綴修復物が混在するケース)

写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)



ペーストの混色

術者：長谷川 恵理 先生(北海道大学 大学院 歯学研究所)

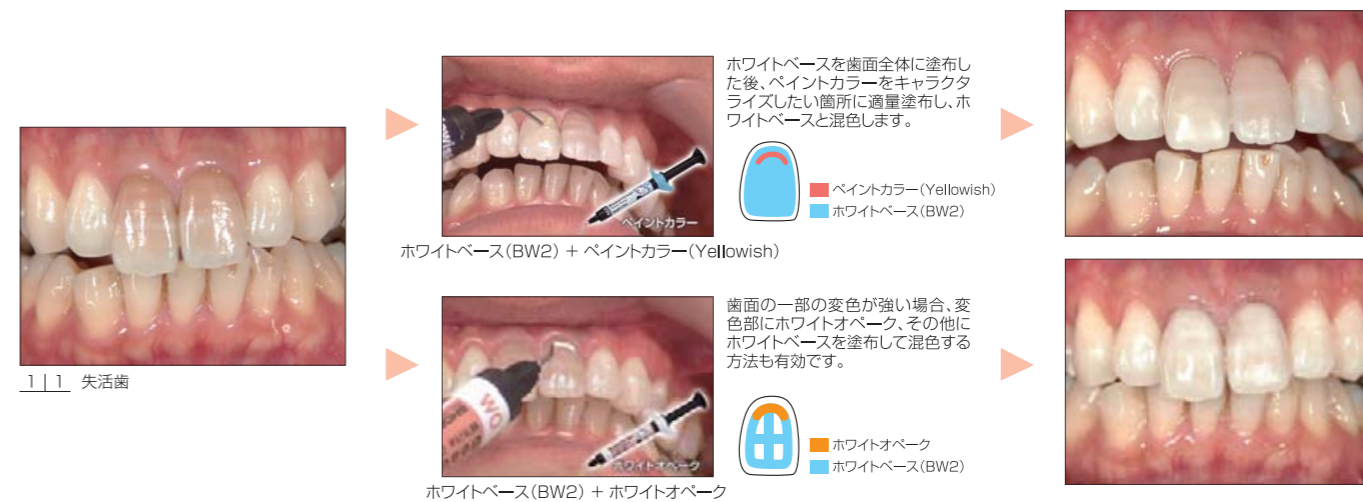


1.色合わせ



2.前処理



3.ペースト塗布

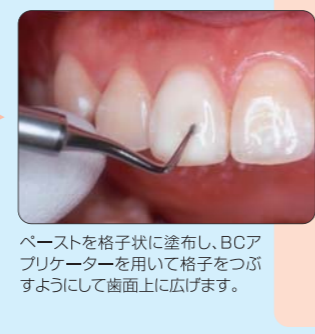

4.仕上げ

仕上げの方法は2種類あります。状況に応じてお選びください。

標準仕上げ
1日あたりの処置時間 短
処置に必要な来院日数 2
再来院していただくことで適用後の状態も確認できます

即日仕上げ
急ぎの方や、再来院の時間が取れない方に



写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)

リペア処置も簡単に

写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)




実際に臨床で使用される前に、院内スタッフのみなさんでぜひお試しください



How to use?

8種類のカラーバリエーションにより、患者様に合った白さを表現できます。

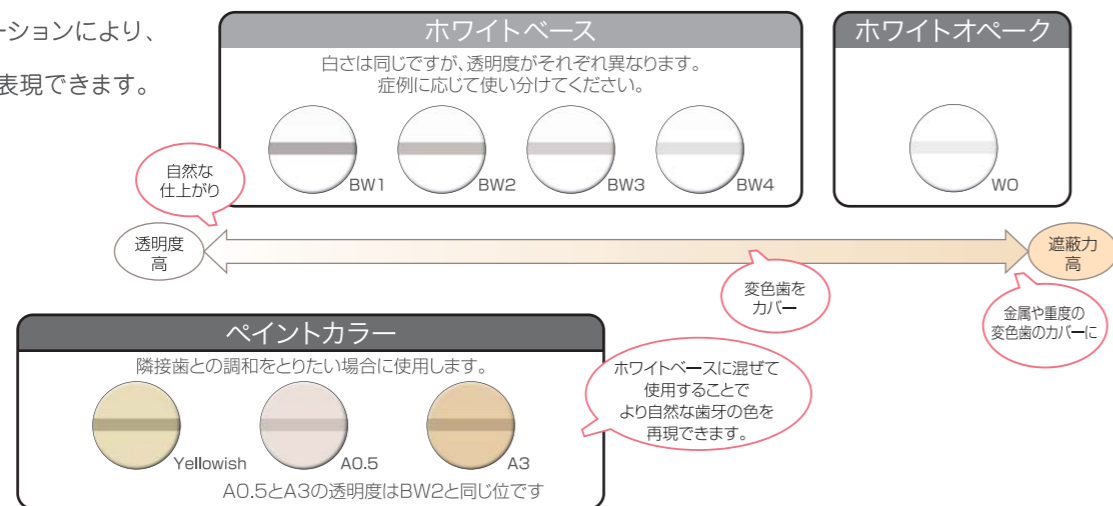


補綴修復物のカバーに(歯牙の一部に補綴修復物が混在するケース)

写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)



ペーストの混色

術者：長谷川 恵理 先生(北海道大学 大学院 歯学研究所)

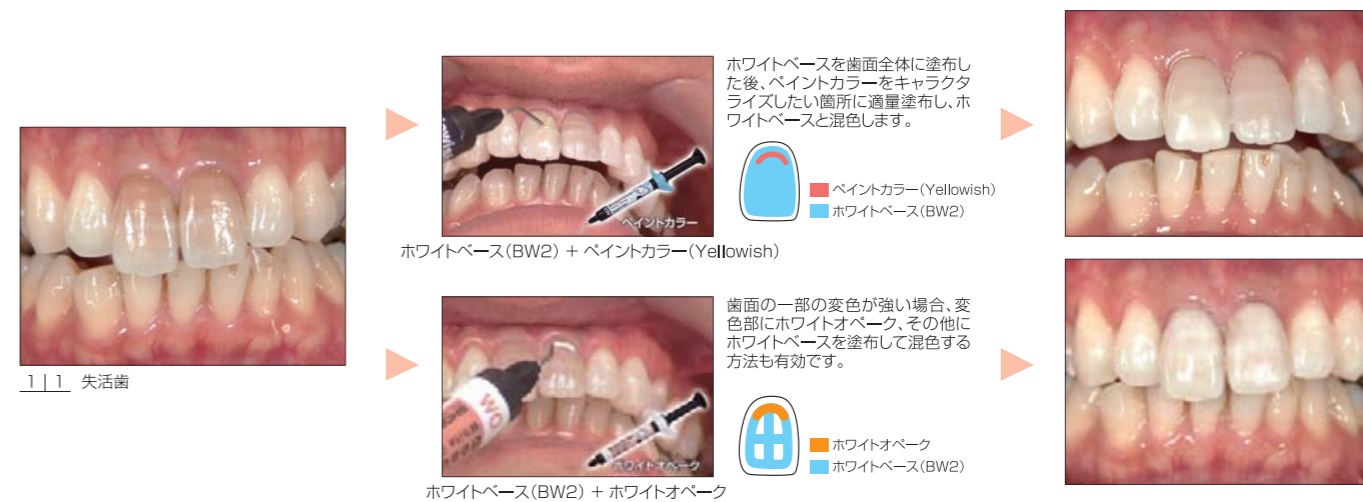

1. 色合わせ



2. 前処理



3. ペースト塗布



4. 仕上げ

仕上げの方法は2種類あります。状況に応じてお選びください。

標準仕上げ
1日あたりの処置時間 短
処置に必要な来院日数 2
再来院していただくことで適用後の状態も確認できます

即日仕上げ
急ぎの方や、再来院の時間が取れない方に



写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)

リペア処置も簡単に

写真提供：秋本 尚武 先生、大森 かをる 先生(鶴見大学歯学部)



実際に臨床で使用される前に、院内スタッフのみさんでぜひお試しください



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティコート	歯面コーティング材	管理医療機器 医療機器認証番号 220AIBZX00100000
ビューティコート BCアプリケーター	歯科用充填器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000207

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティコート グロスリファイン	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000205
ビューティコート バフディスク	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000206

包装・価格



GIOMER

ベーシックセット…1式

【内容】

ホワイトベース BW2(2g) …… 1
 ホワイトベース BW3(2g) …… 1
 プライマーA(3mL) …… 1
 プライマーB(3mL) …… 1
 グロスメーカー(6g) …… 1
 グロスリファイン(6.5g) …… 1
 BCアプリケーター …… 1
 バフディスク …… 25
 (専用マンドレル2本付)

【付属品】

シールドキャップ …… 2
 ディスポチップ平筆 …… 50
 (チップホルダー1本付)
 プチディッシュ …… 1
 ニードルチップ …… 25
 カラーテーブル …… 1
 ステップカード …… 1

使用手順等を動画で
わかりやすく解説



ビューティコートDVD
1枚

単品

セット ベーシックセットに入っている商品

別売 単品販売のみの商品

●ペースト



ホワイトベース
色調 4色/BW1、BW2、BW3、BW4
(BW1、BW4は単品での販売です)
各色2g



ホワイトオペク
色調/WO
各色2g



ペイントカラー
色調 3色/A0.5、A3、Yellowish
各色2g



BCアプリケーター
1本

ペーストの塗布や除去に便利

●ペースト塗布前の前処理に

天然歯の前処理



プライマーA
3mL

セット



プライマーB
3mL

象牙質の前処理



アクティベーター
3mL

別売

陶材、コンポジットレジン
の前処理



松風ポーセレンプライマー
5mL

別売

金属の前処理



メタルリンク
5mL

別売

プライマーの塗布に



ディスポチップ平筆
チップホルダー1本付
50個入

セット

●ペースト塗布後の仕上げ(ツヤ出し)に

標準仕上げの当日に
(酸素遮断材)



グロスメーカー
6g

即日仕上げ・再来院時の
ツヤ出し研磨に



ビューティコート
グロスリファイン
6.5g

セット

グロスリファインによる
ツヤ出し研磨に



ビューティコート
バフディスク
専用マンドレル2本付
25個入

セット

●ペーストの光重合



ブルーショット
1台

別売



キュアノス
1台

別売

取扱店

カタログに記載の価格は2009年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6252-8141/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp

0903GDJSe