



レジン床研削・研磨用

松風ビッグシリコンポイント

BIG SILICONE POINTS

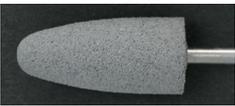
紅

くれない

レジン床研磨用シリコンポイント



高い耐久性、キレイな面性状、楽な艶出し工程

作業工程	システム1	システム2
多量削除 荒仕上げ	松風ビッグシリコンポイント HP R1 (約10,000min ⁻¹) 	松風技工用カーバイドバー ジブスカーバ HP (GP1W, GP7W, GP14F) (約5,000~15,000min ⁻¹) 
少量削除	松風ビッグシリコンポイント HP R2 (約10,000min ⁻¹) 	▼
中仕上げ	松風ビッグシリコンポイント HP R3 (約5,000min ⁻¹) 	松風ビッグシリコンポイント HP 紅 (約5,000~10,000min ⁻¹) 
研磨仕上げ	松風ビッグシリコンポイント HP R3 (約5,000min ⁻¹) 	▼
艶出し	デュラポリッシュ(歯科用研磨コンパウンド)	

※推奨回転速度

ビッグシリコンポイント HP 紅

特長

①高い耐久性

高い強度をもつバインダーを使用し、砥粒の保持力を高めました。

②キレイな面性状

R2タイプより細かい砥粒を用いており、研磨面が滑沢になります。

③楽な艶出し工程

ソフトタッチ研磨の後、すぐにデュラポリッシュで仕上げをすることが可能です。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ビッグシリコンポイント	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号26B3X0001400009

包装



歯科用ゴム製研磨材
松風ビッグシリコンポイント HP 紅

#147 6本入 100本入

<最高許容回転速度>15,000 min⁻¹

<推奨回転速度>5,000~10,000 min⁻¹

硬質レジン・レジン床/研削・研磨用

松風ビッグシリコンポイント **R1** **R2** **R3**

レジン床研磨用のビッグシリコンポイントは、
硬質レジンの研磨にも適しています。

研磨作業が能率的

2種類の形態

色表示による最高許容回転速度の区分▶  : 1万5千回転



#13Lの形態は特に歯冠用硬質レジンの研磨やレジン床細部の研磨に適した形態です。
歯間乳頭などの研磨に適します。

13L



#147の形態は砲弾型で大きく(φ10mm)、接触面積が広いいため均一に研磨できます。

147

R1、R2、R3の3種類

必要な削除量に応じて3種類(#13Lは2種類)を使い分けられますので、能率の良い作業が行えます。

チェアサイドでも

チェアサイドでの微調整(修整・研磨)後は、水洗するだけで違和感もなく試適できます。

【種類】

ビッグシリコンポイント HP R1(グレー)	
#13L、#147	荒仕上げ用
ビッグシリコンポイント HP R2(茶色)	
#13L、#147	中仕上げ用
ビッグシリコンポイント HP R3(白色)	
#147	研磨仕上げ用

用途

- No.13L : 歯冠用硬質レジン、レジン床細部の研削・研磨
- No.147 : レジン床、各個トレーの研削・研磨

販売名・一般名称

販売名	一般名称	承認・認証・届出番号
松風ビッグシリコンポイント	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000009

包装



松風ビッグシリコンポイント HP

- 形態/2種
- 種類/3種 : R1(グレー)荒仕上げ
R2(茶) 中仕上げ
R3(白) 研磨仕上げ
- 包装/ 6本・・・(No.147)
12本・・・(R1,R2-No.13L)
72本・・・(R2-No.13Lのみ)

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595