

マウスガードを作ろう!

Let's

TRY

サーモフォーミング(熱成型)による
オーラルアプライアンス(口腔内装置)で、
治療の幅が広がります。

fabricating a mouthguard

ORAL APPLIANCE

石こう



ヒドロギプス FS

分離材



アットバニッシュ TF

成型シート

ソフトタイプ



キャブチャーシート フロ

成型シート

ハードタイプ



キャブチャーシート ハード

印象採得した歯列模型の上に、軟化させた熱可塑性素材のシートをセットし、吸引・加圧し成型するための専用材料を
ラインナップしました。マウスガードやリテーナー、矯正装置などのさまざまなオーラルアプライアンス(口腔内装置)を
製作するお手伝いをいたします。

CAPTURE SHEET

キャプチャーシート プロ


マウスガード用



デザイン無限大! マルチデザインシート登場!

1. 新素材ポリオレフィン樹脂を採用

EVA樹脂に比較して吸水しにくいので、臭いや汚れが付きにくく、快適に使用できます。

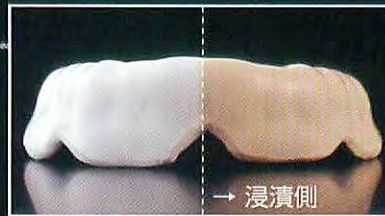

キャプチャーシート(EVA)



キャプチャーシート プロ

●着色試験 (各マウスガードの半分を3%コーヒー水溶液に37℃で18時間浸漬後、流水にて洗浄)

2. 豊富なアレンジが可能

シートは、シングルカラーの面とライン入りのツートンカラー面のどちら側でも成型できます。

また、ツートンカラー面はシートの角度や模型の配置を変えることによって、オリジナリティあふれるマウスガードのデザインが可能です。

●カラー組み合わせ・仕様

カラー (ライン色)	クリアー	ホワイト (イエロー)	ブラック (ホワイト)	ブルー (イエロー)	オレンジ (ホワイト)	イエロー (ホワイト)
四角形 127×127(mm)						
厚み(mm)	2, 3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4



★外箱に円型(φ120, φ125mmの2種)にカットできるガイドを付与しているので、円型シート専用の成型器にも対応できます。

PRO



【製作方法】



ハサミで不要な部分をカット

トリミング

仕上げ研磨

キャプチャーカーバ

ビッグシリコンポイントR3

【用途】 マウスガード用

厚み(mm)	主な用途	写真&コメント
2	ラミネート2層目用	ラミネート: 接着性が高いオレフィン系エラストマー素材なのでラミネート時に接着剤が不要です。
3	厚みを控えめにしたマウスガード(子供・女性用など)、ラミネートマウスガード	★1層目のシートが冷えていると接着効果が低下する恐れがあります。
4	厚みを持たせたマウスガード(男性用など)	スポーツマウスガード: シングルレイヤーでもMTPテクニック※で、前歯のシート厚さをコントロールしてスポーツマウスガードを製作することができます。

※MTP(モールド・トランス・ポジション)テクニックは、スポーツマウスガードに求められる前歯部のシート厚さをコントロールするための成型テクニックです。

製作方法: 成型時に軟化シートの後端を押して、模型を前方へ移動させます。



キャプチャーシート プロ マウスガード用

- 寸法: 127×127(mm)
- 成分: オレフィン系エラストマー
- 包装・種類・価格:
クリアー/厚み(1種:2mm) 10枚入 ¥6,000
厚み(2種:3mm・4mm) 各5枚入 ¥3,500
カラー/厚み(2種:3mm・4mm) 各5枚入 ¥3,500

【カラー(ライン色)5種】ホワイト(イエロー)、ブラック(ホワイト)、ブルー(イエロー)、オレンジ(ホワイト)、イエロー(ホワイト)

CAPTURE SHEET

キャプチャーシート ハード

歯科咬合スプリント用材料



ハードシートでサーモフォーミングの幅がさらに広がります。

1. 常温重合レジンと接着

常温重合レジンとの相溶性があり、スプリントに求められる咬合面の筆積みが可能です。

2. 透明なPET(ポリエチレンテレフタレート)素材

この素材で製作した透明な口腔内アプライアンスは審美的に優れています。



ナイトガード咬合面にオーソパレットにて筆積み

【製作方法】

1



不要な部分をカットし、トリミング

スプリントカーバ

2



仕上げ研磨

ビッグシリコンポイント
紅(くれない)

HARD



【仕様・用途】

仕様			用途	
大きさ	厚み(mm)	入数(枚)	矯正治療 (クリアライナー、リテーナー など)	スプリント (オクルーザルスプリント、ブラキシズムスプリント) 動揺歯の固定 など
四角形 127×127(mm)	0.5	20	○	
	0.8	20	○	
	1.0	20	○	
	1.5	10		○
	2.0	10		○



★外箱に円型(φ120、φ125mmの2種)にカットできるガイドを付与しているので、円型シート専用の成型器にも対応できます。

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
キャプチャーシート ハード	歯科咬合スプリント用材料	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000223



キャプチャーシート ハード

歯科咬合スプリント用材料

■寸法：127×127(mm)

■成分：PET(ポリエチレンテレフタレート)

■色調：クリアー

■包装・価格：厚み 0.5mm 20枚入 ¥1,800

0.8mm 20枚入 ¥2,400

1.0mm 20枚入 ¥2,400

1.5mm 10枚入 ¥2,000

2.0mm 10枚入 ¥2,000

HYDRO GIPS FS

ヒドロギプス FS

歯科用硬質石こう(熱可塑性レジン対応型石こう)



サーモフォーミング専用の
石こうは、使いやすい!



臨床模型



成型されたシート

1. サーモフォーミングに適した高い通気性

高い通気性を有しているため、シート成型時に歯冠部の裂溝までくっきりと再現できます。

2. 成型収縮を補填するのに最適な線硬化膨張

キャプチャーシート プロおよびキャプチャーシート ハードの成型収縮を補填し、高適合を実現しました。

3. 滑沢な表面の石こう模型

各種印象材との相性が良く、極めて滑沢な表面の石こう模型が得られます。

【用途】

熱可塑性レジン及び熱可塑性レジンシートの模型の製作

【色調】

アイボリー



【各種物性値】

項目	仕様
混水量(粉100gに対して)	28mL
硬化時間	8.0分
線硬化膨張	0.25%
圧縮強さ	35.0 MPa

試験室温23℃ ※試験方法はJIS T 6605:2005による。

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ヒドロギプス FS	歯科用硬質石こう	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000221



ヒドロギプス FS
歯科用硬質石こう
(熱可塑性レジン対応型石こう)
エコノパック3kg(1.5kg×2)
¥2,650

at VARNISH TF

アットバニッシュ TF

サーモフォーム用分離材



手早い作業でクリアな
美しいマウスガード!

1. 離型性に優れ、シートの仕上がりが綺麗

ヒドロギبس FSとの相性に優れ、強度の高い被膜を短時間で形成するので、美しいマウスガードの成型面が得られます。クリアシートは透明感が保たれるので特に有効です。

■ 成型シート内面性状比較



表面性状がクリアで、美しい仕上がりのトレーです。



石膏面の凹凸を転写するのでシート内面が白っぽくなっています。

※シートは、いずれもキャプチャーシート プロ(クリア4mm)を使用

2. あっと、驚く速乾性で作業時間を短縮

分離材塗布後、約10秒で分離材が乾燥するので、作業がスピーディです。また、塗布面は光沢がでるので、一目で識別でき無駄な作業を省きます。



【用途】

サーモフォーミング成型時における熱可塑性レジンシートと石膏模型の分離



アットバニッシュ TF
サーモフォーム用分離材
130g ¥1,000


この分離材はサーモフォーミング専用です。義歯製作用には使用できませんのでご注意ください。



オーソパレット
 歯科矯正用レジン材料
 粉液の組み合わせにより、
 様々な色調表現が可能です。
 粉100g(クリアー)¥1,900
 (イエロー、ブルー)¥2,200
 液100mL(クリアー、ピンク)¥1,500




歯科技工用カーバイドバー
キャプチャーカーバ HP
 軟性樹脂用カーバイドバー
 【形態・包装・価格】
 CC7 1本 ¥3,200
 CC8 1本 ¥3,200
 CC21 1本 ¥2,700

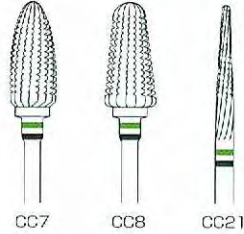

松風ビッグシリコンポイント HP
 歯科用ゴム製研磨材
 【形態・包装・価格】
 R3(白)研磨仕上げ 6本 ¥2,100



歯科技工用カーバイドバー
スプリントカーバ HP
 樹脂シート切断用カーバイドバー
 【形態・包装・価格】
 SP1 1本 ¥3,200
 SP2 1本 ¥2,700

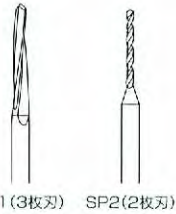

松風ビッグシリコンポイント HP
紅(くれない)
 歯科用ゴム製研磨材
 【形態・包装・価格】
 147 6本入 ¥2,400



松風キャプチャーシート
 スポーツマウスガード用
EVAシート
 ■寸法: 127×127 (mm)
 ■成分: エチレン-酢酸ビニル共重合体
 ■包装: 同色12枚入
 ■色調・種類・価格:
 クリアー/厚み: 3種 (2mm, 3mm, 4mm) 各¥3,000
 カラー/厚み: 1種 (4mm) 5色 各¥3,500
 ホワイト、ブラック、ブルー、オレンジ、イエロー



松風ハイライトシェードアップ
エバシート
 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
 マウストレー用シート
 12枚入 ¥2,000
 ■寸法: 127×127 (mm)
 ■厚み: 1mm



吸引・加圧のダブル機能で精度の高い技工物、製品、装置、
 アプライアンスが成型できます。

モデルキャプチャー
 歯科技工用成型器
 熱可塑性樹脂吸引加圧成型器
¥278,000

カタログに記載の価格は2010年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
 ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店