

GISHY GOO!™

口腔内粘膜保護材料に新しいシリコーンが新登場!



Gishy Goo(ギシ グー)は、
 歯科印象用シリコーンとして使用されている
 ポリビニルシロキサンエラストマー (PVS) で作られております。
 患者様がブラケット、マイクロインプラントなどの矯正装置を心地良く使用できるよう、
 舌、頬粘膜などの軟組織を保護するためのものです。

- ◎ 矯正治療期間中の唇や頬などの口腔内粘膜の痛みを和らげます!
- ◎ 痛みによる患者様の来院を減らせます!
- ◎ 軟組織にやさしい適度な硬さで、ブラケットから外れにくい!
- ◎ バブルガムのフレーバーがついており、患者様も使いやすいです!



出して!



Step 1.

シリンジから指の上に1回分を押し出します。(豆粒大)

使い方はカンタン!

練って!



Step 2.


10秒ほど指でしっかりと練り合わせます。色が完全に混ざるまで練り合わせてください。(練り合わせが不十分ですと、しっかりと固まらず十分な効果が得られません)

つける!



Step 3.

固まる前に痛みのある部分のブラケットに付け、形を整えます。完全に固まるまで2分ほどかかります。

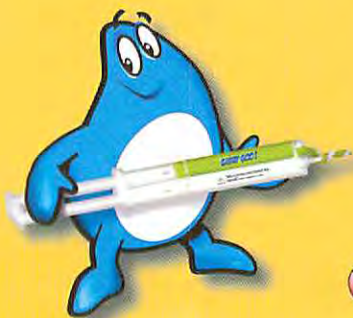

GET COMFORTABLE WITH GISHY GOO!



※ご使用の際は、添付文書・説明書をよく読んでお使いください。

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ギシ グー	短期的使用歯科矯正用粘膜保護材	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000048

商品名	包装	商品番号	標準医院価格	ご注文数量
ギシ グー アソート(各色 2ずつ)	5mL×10入	500-078	¥4,800	PK
ギシ グー レッド	5mL×10入	500-055	¥4,800	PK
ギシ グー ブルー	5mL×10入	500-056	¥4,800	PK
ギシ グー グリーン	5mL×10入	500-057	¥4,800	PK
ギシ グー イエロー	5mL×10入	500-058	¥4,800	PK
ギシ グー ホホワイト(トゥースカラー)	5mL×10入	500-059	¥4,800	PK

貴医院名

ご住所 〒

TEL. ()

通信欄

価格は2010年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

世界の歯科医療に貢献する **株式会社 松風** 矯正に関するお問合せ先 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風ESTビル
営業部 矯正課 Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
http://www.shofu.co.jp

