

# 口腔内撮影用ミラー

(ロジウムコーティング)



新発売!


商品番号:74-900  
口腔内撮影用ミラー Mi-0(歯鏡)  
サイズ:全長160mm 幅75mm  
材質:ステンレス製(ロジウムコーティング)

商品番号:74-901  
口腔内撮影用ミラー Mi-1(歯鏡)  
サイズ:全長160mm 幅70mm  
材質:ステンレス製(ロジウムコーティング)


商品番号:74-902  
口腔内撮影用ミラー Mi-2(歯鏡)  
サイズ:全長160mm 幅60mm  
材質:ステンレス製(ロジウムコーティング)

## POINT

- ◆ ロジウムコーティングにより高い反射率、色調の再現ができます。
- ◆ 口腔内を傷つけないよう全体に丸みを帯びた形状設計です。
- ◆ 表面は歪みのない特殊研磨仕上げになっており、鮮明に映し出します。
- ◆ ハンドル部は撮影時の手の映り込みを考慮し、長めに設計されています。

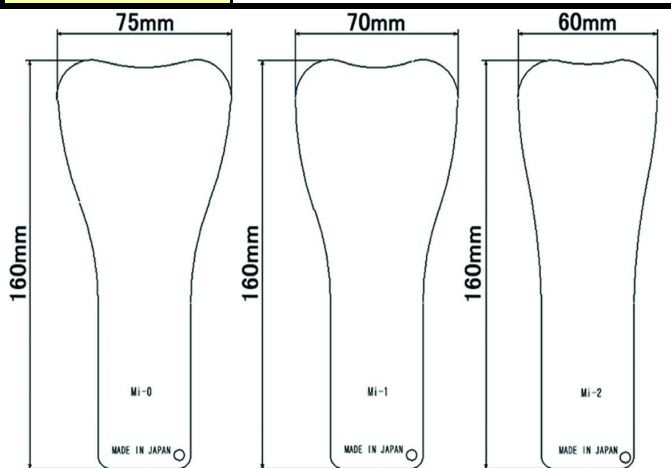

Mi-0(大)      Mi-1(中)      Mi-2(小児)  
サイズ表

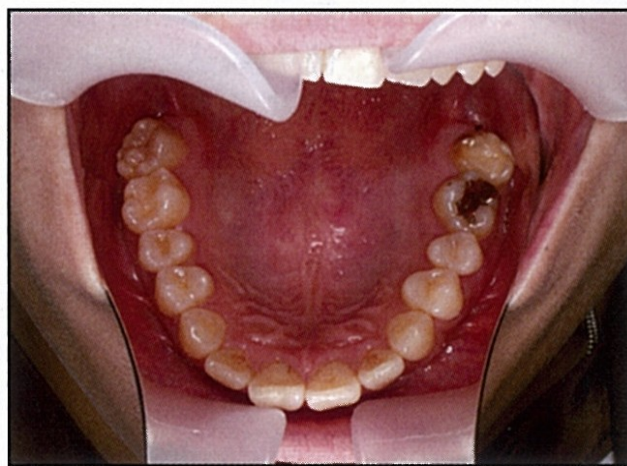

Mi-1使用例

## ご使用に際しての注意

1. 鏡面には表裏があります。使用面をお間違いにならないようご注意ください。
2. 金属本体の鏡面にはロジウムコーティングを施しています。傷をつけないよう取扱いには十分ご注意ください。
3. 滅菌はオートクレーブ(132℃)を推奨いたします。その際、商品に同梱されている、布ケースに入れて滅菌してください。ミラーの上に物が置かれた状態で滅菌しないでください。傷の原因になります。
4. 超音波洗浄は出来ません(ミラー表面の傷を防止するため)。
5. 必ず柔らかい布で拭いてください。付着したタンパク質などが固まった際は無理にふき取らず水に浸すなどして柔らかくなったところで拭き取ってください。
6. 本品は鋭角の箇所を設けないよう設計されておりますが、金属製のため、口腔内を傷つけないようご注意ください。
7. 本品に異常(コーティング剥離、表面傷、破損、ゆがみ、変色等)を認めた際は使用しないでください。
8. ご使用に際して本品を体温程度に暖めておくことで曇り防止になります。

一般医療機器 医療機器届出番号:09B2X00010000334



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

営業部矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風ESTビル

TEL:03-3832-1824

FAX:03-3832-7682