



双眼ルーペ
MiCDルーペ
汎用歯科用照明器
MiCDルーペライト

MiCDルーペは、より精密な術野の観察を可能にし歯科医療の質を向上させます。



すべては、患者様のために

MiCD—Minimally Invasive Cosmetic Dentistry
最小侵襲による審美歯科治療



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry

MiCDとは、

天然歯への侵襲を最小限に抑えつつ審美的結果を導きだす患者様のニーズを汲み取った歯科治療です。
また、より良い笑顔を追求すべく、患者様の心理面、健康面、そして審美的要望を十分考慮に入れた、
予防やメンテナンスを含む総合的な治療法です。

松風は、MiCDに基づいた治療を推奨し、このコンセプトに沿った製品開発に努めて参ります。



MiCD Loupe
MiCD Loupe Light

テレスコープを導入されることで...

- ▶ 裸眼では確認しにくかった細部まで見えますので、歯科医療の質を向上させることができます。
- ▶ 形成やセメント除去、メンテナンスなど作業精度が向上します。
- ▶ 適切な作業距離を保った姿勢で診療ができますので、腰痛など身体に対する疲労が軽減します。

歯科医療従事者ならどなたにでもご使用いただけます。



Dr




DH




DT

MiCDルーペ


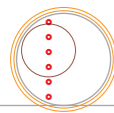


初めてテレスコープを採用される方に

2.5倍に設定された倍率と広い視野(視野径130mm)は初めてテレスコープを採用された方でも快適にご使用いただけます。

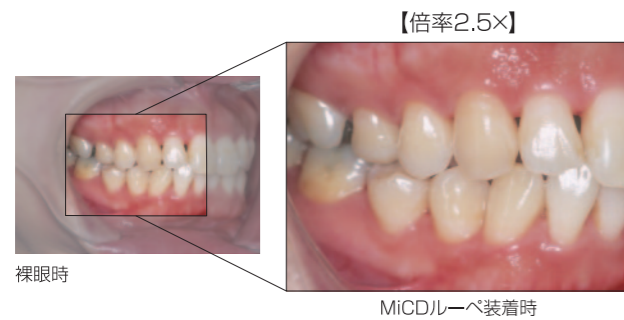

Telescope

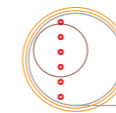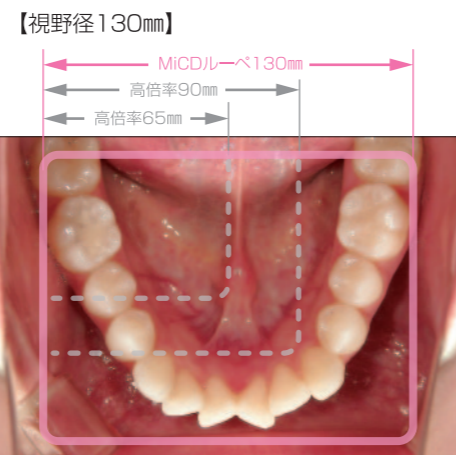

2種類のテレスコープ

choice


レンズ間の距離を使用される方の瞳の間隔に調整できるフリップアップタイプと、よりクリアな視野が得られるTTLタイプの2種類をご用意しています。

<フレーム色>

フリップアップタイプはスレートとワインの2色から選べます。TTLタイプはスレートの1色のみです。



*印刷物のため実際の色調とは異なる場合がございます。

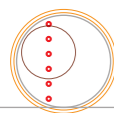


負担の少ない軽いフレームとレンズ

Frame and Lens Design

チタン製のフレームと光学プラスチックレンズを採用し、質量を54gと軽くいたしましたので、長時間の装着に対して負担を軽減します。

*フリップアップタイプはプラスチックレンズを採用しています。TTLタイプはガラスレンズを採用しています。

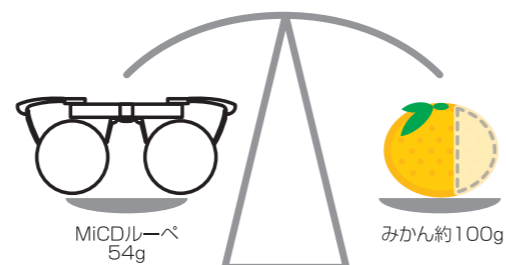

MiCDルーペライト

Light

MiCDルーペとMiCDルーペライトをセットで使用することで、さらに細部までよく観察できるようになります。

ライトは左右のレンズ間にあるため対象物を確実に照射できますので、ほとんど影を作らず、治療する部分を明るく照らします。



■白色LEDの採用

光源に白色LEDを採用しているため、小型・軽量・長寿命です。

■リチウムイオン電池

ヘッドライトの電源はリチウムイオン電池を採用。

1回の充電で使用可能時間は約7時間と十分な容量があります。(1回の充電時間は約3時間です)

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
MiCDルーペ	双眼ルーペ	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000218

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
MiCDルーペライト	汎用歯科用照明器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000219

包装



双眼ルーペ MiCDルーペ フリップアップタイプ

【フレーム色】2種類：スレート、ワイン

【内容】本体1、サイドシールド(左右)各1、レンズキャップ2、ヘッドストラップ1、フリップレバー1、ドライバー1、レンズクロス1、保管ケース1

レンズの種類	倍率	作業距離(mm)	焦点深度(mm)	視野径(mm)	質量(g)
ショート(S)	2.5×	250~400	150	130	54
レギュラー(R)	2.5×	360~510	150	130	54



双眼ルーペ MiCDルーペ TTLタイプ

【フレーム色】1種類：スレート

【内容】本体1、サイドシールド(左右)各1、レンズキャップ2、ヘッドストラップ1、ドライバー1、レンズクロス1、保管ケース1

レンズの種類	倍率	作業距離(mm)	焦点深度(mm)	視野径(mm)	質量(g)
近日発売 エクストラショート(XS)	2.5×	200~330	130	130	54
ショート(S)	2.5×	260~390	130	130	54
レギュラー(R)	2.5×	300~430	130	130	54

【瞳間距離】

種類	(mm)
ナロー	56
レギュラー	60
ワイド	64



汎用歯科用照明器 MiCDルーペライト

【内容】本体1、ベルトクリップ、アームバンド、アクセサリキット(7点)

【ヘッドランプ】

形式名	LL-LED
電源	専用バッテリーパック
光源	白色LED
照明	40,000lx
寸法	φ22.4×L41(mm)
質量	約18g

【バッテリーパック】

形式名	LL-BAT
種類	リチウムイオン電池
公称電圧	DC7.4V
定格容量	2400mAh
寸法	W55×D52×H103(mm)
質量	約200g

【充電器】

形式名	LL-CHG
電源	AC100~240V
電源入力	30VA
寸法	W46×D39×H103(mm)
質量	約200g

※MiCDルーペ、MiCDルーペライトの別売品につきましては歯科商店様にお問い合わせください。

関連商品

ジョンソン&ジョンソン



プロリン(非吸収性縫合糸、逆三角針3/8)

8696G プライム(11mm/7-0)*
8697G プライム(11mm/6-0)
8695G プライム(13mm/6-0)
8698G プライム(13mm/5-0)
8681G プライム(16mm/5-0)*



モノクリル(吸収性縫合糸)

Y463G 逆三角針3/8 プライム(13mm/5-0)
Y464G 逆三角針3/8 プライム(13mm/4-0)
Y303H 丸針1/2(17mm/5-0)
Y304H 丸針1/2(17mm/4-0)*
Y305H 丸針1/2(17mm/3-0)*

*を付した製品は常時在庫しておりません。



松風ダイヤモンドポイントFG MiCDダイヤモンドセット

6本セット

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp