

RESIGLASS PASTE

Resin Reinforced Glass Ionomer Cement

低臭気・低刺激・HEMAフリー



歯科合着用ガラスポリアルケネエート系レジンセメント

レジグラス ペースト

レジグラス ペーストはHEMAフリーの
グラスアイオノマー系レジンセメントです。
酸性臭や刺激など、患者様や術者の不快感を抑えました。




Q HEMAフリーってどういうメリット？

A レジン系材料に含有されているHEMA(親水性モノマー)に、
過敏に反応される患者様にもご使用いただけます。
また、吸水による材料劣化を軽減させることができます。


Q 操作性は？

A 抵抗感が少なく、簡単に
練和ができます。
また、2色のペーストを
練和しますので、視覚的
に練和の状態が確認で
きます。

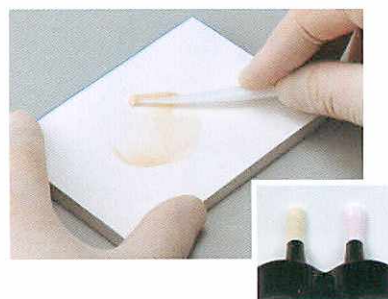

Q 操作可能時間は？

A 操作可能時間は約2分10秒です。

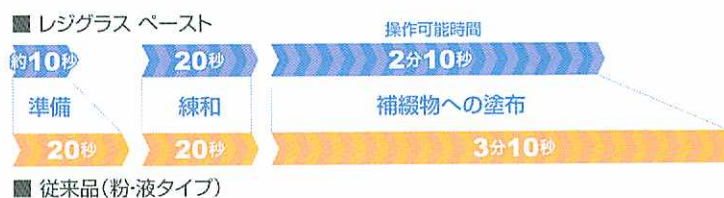

低臭気

低刺激

HEMAフリー

Q 補綴物の浮き上がりは？

A 薄いセメント層(被膜厚さ12 μ m)を形成します。
操作可能時間の、どのタイミングで圧接しても、被膜厚さはほとんど変わりません。

※ 物性値は JIS T6609-2:2005 に基づいた自社試験方法による参考値。

Q 余剰セメントの除去はしやすい？

A ベタつき感が少なく、表面硬化にすぐれていますので、硬化後の余剰セメントは探針などで簡単に一括除去が可能です。

<練和開始から1分後に装着した場合>



Q シリンジ1本で何回使用できる？

A クラウン合着で約135回分使用できます。(1歯合着:約60円)
歯科用合着・接着材料Iの点数を請求することができます。



RESIGLASS PASTE
Resin Reinforced Glass Ionomer Cement

諸 特 性

X線造影性	フッ素徐放性	練和時間	硬化時間	被膜厚さ(μm)	酸溶解性(mm)	曲げ強さ(MPa)
○	○	20秒	7分	12	0.01	38

物性値はJIS T6609-2:2005に基づいた自社試験方法による参考値。
※レジグラス ペーストは室温(1~25℃)で保管してください。

■ 販売名・一般名称

販売名	一般名称	承認・認証・届出番号
レジグラス ペースト	歯科合適用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 222AK6ZX001C1000

包装・価格



レジグラス ペースト …… ¥8,000

<内容>

W シリンジ 10mL (15g) : 1 / スパチュラ : 1 / 紙練板 : 1

別売品

セメント紙練板 60枚綴 6冊1箱 …… ¥1,900

関連商品



ハイボンド テンポラリーセメント ソフト

ハイボンド テンポラリーセメント

(ソフト) 1-1セット …… 各色 ¥6,100

[用途] 1週間程度の短期間の仮着・仮封用

[色調] ホワイト・ピンク

ハイボンド テンポラリーセメント

(ハード) 1-1セット …… 各色 ¥6,100

[用途] 3週間程度の長期間の仮着・仮封用

[色調] ホワイト・ピンク

取扱い店

カタログに記載の価格は2011年3月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>