



歯肉圧排糸/滲出液抑制ジェル

SU パックコード

SU スタットジェル/SU スタットジェル クリア

SU PAK CORD  
SU STAT GEL  
SU STAT GEL CLEAR



支台歯形成、印象採得に大切な  
歯肉圧排キットを松風が取り扱います。

**SHOFU INC.**

## Retraction cord

歯肉圧排 圧排コード

## SUパックコード

無数のループを鎖状に編みこんだ、弾力性ある100%木綿タイプの圧排コードです。  
二重圧排の下部糸にご使用いただける000から1まで4種類の太さをラインナップしています。  
SUスタットジェルなどとともにシステムとしてご使用いただくと、さらに効果を発揮します。



拡大

バーなどに巻きついたり、圧接しても抜けたりすることがなく、歯肉溝にピタッと留まりやすい設計です。

## 【圧排コード ラインナップ】

サイズ/色調	直径(mm)	全長(cm)	用途
000(黒色) 	0.89	244	前歯部用 二重圧排する場合の歯肉溝底部の一次圧排用
00(黄色) 	1.04		下顎前歯部用、歯肉辺縁用 歯肉の薄い前歯部などの二次圧排用
0(紫色) 	1.14		下顎前歯部用、歯肉辺縁用 歯肉の厚い前歯部などの二次圧排用
1(青色) 	1.25		臼歯用、歯肉が厚い部位用 歯肉の厚い部位の二次圧排用

# Sulcular fluid control

歯肉圧排 滲出液抑制ジェル

## SUスタットジェル／SUスタットジェル クリア

印象採得に影響を与えやすい、歯肉からの滲出液を抑制します。

### SUスタットジェル

黄褐色で粘性が高い硫酸第二鉄20%配合の滲出液抑制ジェルです。  
滲出液抑制効果が高いため、チェアタイムが短縮できます。



※若干、歯肉が変色することもあります。数日で消失します。

### SUスタットジェル クリア

透明で粘性が高い塩化アルミニウム25%配合の滲出液抑制ジェルです。  
滲出液抑制ジェル使用後の歯肉変色が気になる部位や、審美性を重視する前歯部にお勧めです。



## Related products for tissue management

### 歯肉圧排 アクセサリー

#### SUパッカー

柄の角度が45°の歯肉圧排用インスツルメントです。

その先端は、厚みが薄く緩やかなギザギザが付いています。

歯肉溝内に圧排コードが留まり、インスツルメントとの接触による歯肉への損傷が少ない設計です。



コード圧接の時、円を描くような動きでもパッカーをひるがえさず操作ができます。

#### SUスタットチップ

創面に擦りこめるブラシを先端につけたSUスタットジェル、SUスタットジェル クリア専用チップです。

歯肉を傷つけず滲出液抑制ジェルを擦りこむことができます。



#### SUシリンジカバー

器具による交叉感染を予防するためのSUスタットジェル、SUスタットジェル クリア専用シリンジカバーです。



# Operating procedure

## 〈SUシリーズ 使用ステップ〉

支台歯形成や印象採得時の歯肉圧排に、SUシリーズをシステムとしてご使用ください。



支台歯の一次プレパレーション終了



滲出液を抑制

支台歯の一次プレパレーション終了後、滲出液などを抑制する場合、SU スタットジェルもしくはSUスタットジェル クリアを創傷部に塗布します。その際、SUスタットチップ先端で円を描くように擦り込みながら、創傷部全体を覆うように塗布します。



水洗・エアブロー



滲出液の流出が止まったらジェルを十分に洗い流します。  
ジェルの残留は印象材の硬化阻害の原因になることがあります。強圧エア下で完全に洗い流してください。



歯肉圧排

圧排部を十分に乾燥させたうえで、圧排コードを湿潤させてから圧排してください。

※圧排コードをSUスタットジェルなどで湿らせた機械・薬物的歯肉圧排は、圧排コードを除去する際に血餅も剥がす恐れがあり、再び滲出液が出てくる可能性が高くなります。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
SUパックコード	歯肉圧排糸	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086SU0003
SUスタットジェル SUスタットジェル シングル	歯肉圧排キット	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086SU0001
SUスタットジェル クリア SUスタットジェル クリア シングル	歯肉圧排キット	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086SU0002

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
SUパッカー	歯科用圧入充填器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086SU0004
SUスタットチップ	歯科用注入器具	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086SU0005

## 包装・価格



**SUパックコード**  
各1個 ¥1,800

### 【種類】

サイズ	色調	直径(mm)	全長(cm)
000(黒色)		0.89	244
00(黄色)		1.04	
0(紫色)		1.14	
1(青色)		1.25	



**SUパッカー**  
¥3,800



**SUスタットジェル  
1セット ¥3,000**

### 【内容】

- ・SUスタットジェルシリンジ6本(1.2mL/本)
- ・SUスタットチップ 18個



**SUスタットジェル  
シングル**

¥500

### 【内容】

- ・SUスタットジェルシリンジ1本(1.2mL/本)
- ・SUスタットチップ1個



**SUスタットジェル クリア  
1セット ¥3,000**

### 【内容】

- ・SUスタットジェル クリアシリンジ  
6本(1.2mL/本)
- ・SUスタットチップ 18個



**SUスタットジェル クリア  
シングル**

¥500

### 【内容】

- ・SUスタットジェル クリアシリンジ  
1本(1.2mL/本)
- ・SUスタットチップ1個



**SUスタットチップ**  
¥1,800

【内容】20個入



**SUシリンジカバー**  
各1個 ¥1,500

【内容】100枚入

## 関連商品



**ジルデフィット  
ウォッシュタイプ**  
¥6,000

### 【内容】

- カートリッジ 48mL(61g)2本
- 松風ミキシングチップSS 8本



**ジルデフィット  
ウォッシュXSタイプ**  
¥4,000

### 【内容】

- シリンジ 4mL(6g)5本
- 松風ミキシングチップXS 15本
- 松風イントラオーラルチップXS 20本



**ジルデフィット  
レギュラー&デンチャータイプ**  
¥6,000

### 【内容】

- カートリッジ 48mL(67g)2本
- 松風ミキシングチップS 6本



**ジルデフィット パテタイプ**  
¥6,000

### 【内容】

- ベース 294mL(500g)
- キャタリスト 294mL(500g)
- 計量器各1

カタログに記載の価格は2012年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>