



歯科咬合スプリント用材料

キャプチャーシート ハード **円型**

# より多くの成型器に対応する 円型の硬質シートを追加発売

オーラルアプライアンス  
松風のOAシステムにラインナップ



## 円型シートの追加

- 流通している成型器をほとんど網羅できるシートサイズ(φ120mm、φ125mm)。

## 透明なPET(ポリエチレンテレフタレート)素材

- スプリント製作に求められる常温重合レジンとの接着性があり、筆積みに適しています。
- お茶や水の容器(ペットボトル)と同じ、溶出性の少ない安全なPET樹脂です。

*ORAL APPLIANCE*



SHOFU INC.

## 仕様・用途

| 用途   | 厚さ (mm) |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
|  | 0.5     | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 矯正治療<br>(アライナー、リテーナーなど)                        | ●       | ●   | ●   |     |     |
| スプリント<br>(オクルーザルスプリント、ブラキシズムスプリント)<br>動揺歯の固定など |         |     |     | ●   | ●   |

## 販売名・一般的名称

| 販売名           | 一般的名称        | 承認・認証・届出番号                          |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| キャプチャーシート ハード | 歯科咬合スプリント用材料 | 一般医療機器<br>医療機器届出番号 26B1X00004000223 |

## 包装・価格

### キャプチャーシート ハード (円型)

歯科咬合スプリント用材料

- 寸法 円型・2種 (φ120mm、φ125mm)
- 成分 PET (ポリエチレンテレフタレート)
- 色調 クリア
- 厚さ 0.5mm 20枚入  
0.8mm 20枚入  
1.0mm 20枚入  
1.5mm 10枚入  
2.0mm 10枚入



## 製作方法

### ① スプリントカーバ(SP1、SP2)

石こう模型からの取外し  
石こうにラインを入れるようにシートを切り出します。



### ② 技工用カーバイドバー(7N、7B、7NF)

外形調整  
バリ除去やレジンを築盛した咬合面を調整します。



### ③ ビッグシリコンポイントHP(紅)

中仕上げ研磨  
発熱して変形しないように低速でソフトタッチで研磨してください。



必要に応じてビッグシリコンポイントR3  
またはバフ研磨で仕上げてください。  
発熱に注意して、できるだけソフトタッチで研磨してください。




## 関連製品

リーズナブルな正方形仕様

### キャプチャーシート ハード

- 寸法 正方形 127mm
- 厚さ  
0.5mm 20枚入  
0.8mm 20枚入  
1.0mm 20枚入  
1.5mm 10枚入  
2.0mm 10枚入

成分と色調は、キャプチャーシートハード(円型)と同じです。

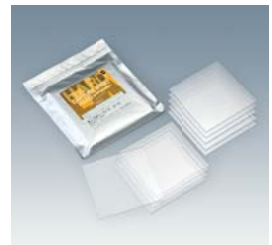

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2012年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>