

包装・価格

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号	販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
ビューティコアキット EX	歯科用支台築造材料キット	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00149000	ビューティデュアルボンド EX	歯科用象牙質接着剤	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00148000
ビューティコア	歯科用支台築造材料	管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00213000	ビューティコア ファイバーポスト	歯科根管用ポスト成形品	管理医療機器 医療機器認証番号 226AKBZX00088000



ビューティコアキット EX

[キット内容] ビューティコア LC インジェクタブル(Dentin) 2.5g  
 ビューティコア LC ポストペースト 2.1g  
 ビューティデュアルボンド EX ボンドA 3.0mL  
 ビューティデュアルボンド EX ボンドB 2.5mL  
 松風ニードルチップ(太) 5  
 松風ニードルチップ 5  
 ディスポブラシ ファイン(ピンク) 50  
 松風Vディッシュ 25



ビューティコア ファイバーポスト

10入 / 20入

■1.0mm ■1.2mm ■1.4mm ■1.6mm

[種類(直径)] 4種



ファイバーポストの前処理に  
**松風ポーセレンプライマー**  
 5mL



単品

ビューティコア LC インジェクタブル

2.5g  
 (松風ニードルチップ(太)5個付)  
 [色調] 2色  
 Dentin White

ビューティコア LC ペースト


4.6g  
 [色調] 2色  
 Dentin White

ビューティコア LC ポストペースト

2.1g  
 (松風ニードルチップ 5個付)

ビューティコア フローペースト

9g  
 [付属品]  
 松風ミキシングセット ミキサー 20  
 松風ミキシングセット ノズル(細) 20

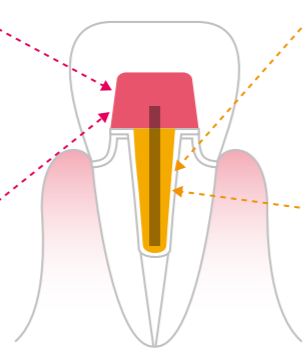


関連製品



松風ビューティボンド ユニバーサル

1セット  
 [セット内容] ビューティボンド ユニバーサル 6.0mL 1  
 ディスポブラシファイン(ピンク) 50  
 松風Vディッシュ 25

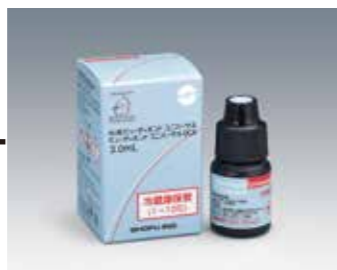

レジンセメントやレジンコア材との併用時に使用  
**ビューティボンド  
 ユニバーサル DCA**

3.0mL


ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



レジン支台築造システム

ビューティコア システム **保険適用**

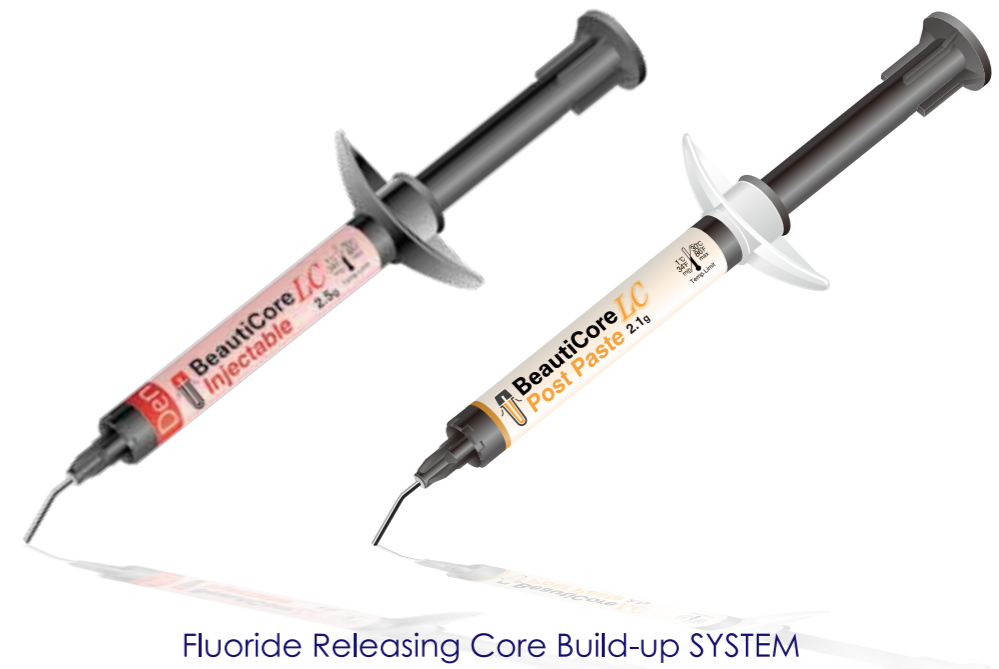

Fluoride Releasing Core Build-up SYSTEM

# BeautiCore SYSTEM

“Wペースト”を採用したのには理由があります

「人生100年時代」  
 自分の歯を残したい

**保険適用**

松風が考案した  
 コアシステム

**光重合タイプ**






# 03 変色を軽減

支台歯の変色を抑え、  
審美修復を長期的にサポート



アミン類未配合の為、硬化後の変色を抑えることができます

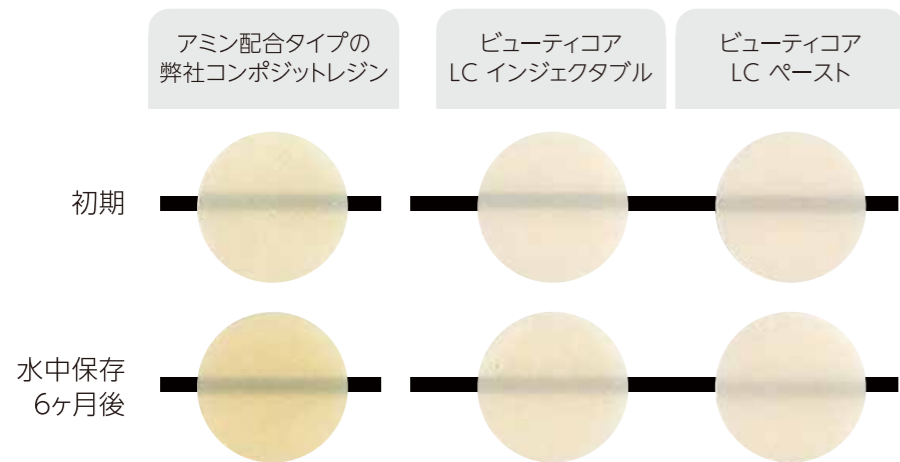

# 04 根管填入時の不安を軽減

硬化深度は深く設定

試験により得られた硬化体の長さから2で除した値が硬化深度です。  
(JIS T 6514:2015規格、ISO4049:2009規格)



LCポストペーストの  
硬化深度は  
**6.0mm**  
※LED照射器20秒の場合  
(代表値)



●試験方法

金属リング内にペーストを充填後、上部からLED照射器にて所定の時間光照射を行い、金型から硬化体を外して未重合を除去し、硬化体の長さを測定する




# 05 無駄を軽減

光重合タイプだからこそ、  
ペーストの無駄を軽減可能



ミキサーとノズル内には1回使用するごとにペーストが約0.3g残存します。  
ビューティコアLCシリーズは、ミキサーとノズルが不要でニードルチップのみでお使いいただけるため、残存するペースト量を軽減できます。

●1回あたりの残存ペースト量

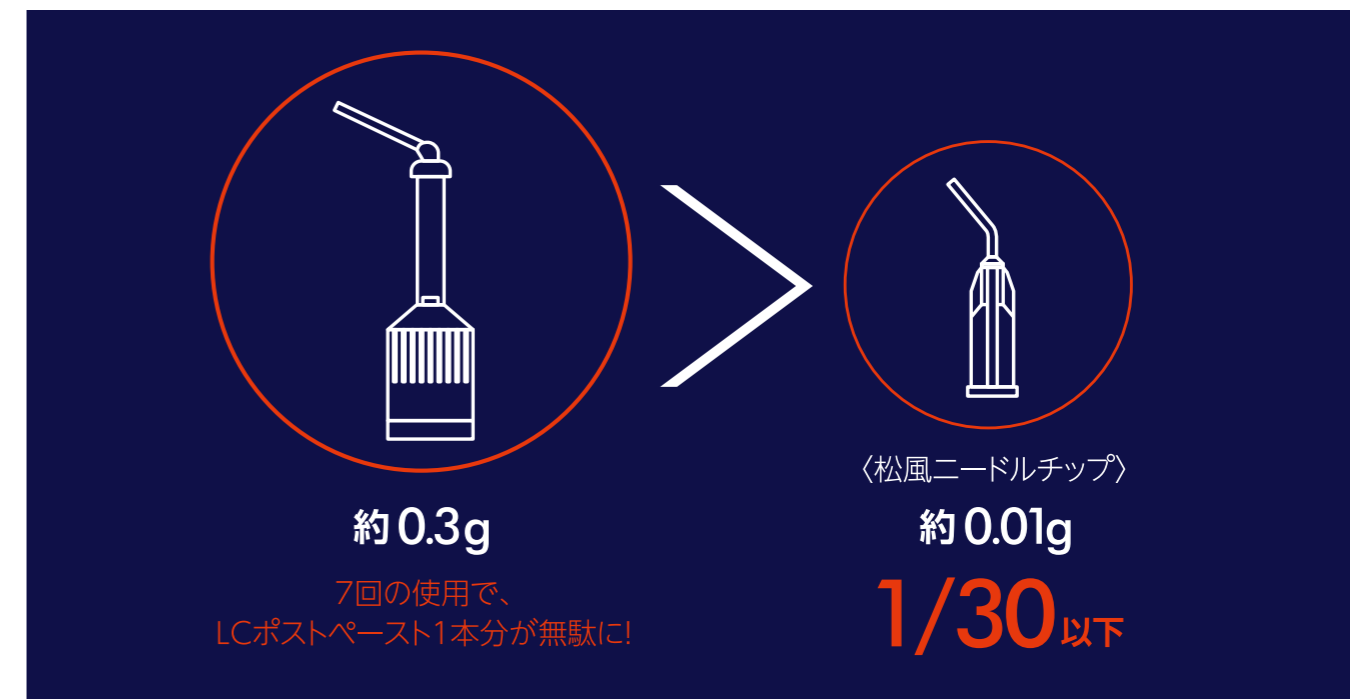

填入・築盛操作も容易

当社フロアブルレジンと同じシリンジを採用していますので、同じような感覚でお使いいただけます。



距離が  
短かく口腔内で  
築盛しやすい