



ナイロン筆

ユニブラシ オーバルタイプ



「丸型毛先」「ダブルW筆先」という新発想！

二刀流



2タイプの筆先を同時にお試しいただける

ユニブラシオーバルタイプ 限定セット
Sタイプ筆先 5本、
Lタイプ筆先 5本、
柄 1本

標準医院価格
¥1,200

SHOFU INC.


1 柄の両端が使用できる「W筆先仕様」^{ダブル}



柄の両端に筆先が装着できる「W筆先仕様」のため、柄を逆にすれば素早く異なる太さの筆先が使用できます。
また柄の「Sタイプ」を装着する部分は「ユニブラシ No.4」の筆先も装着することが可能です。
使用用途に応じて「Sタイプ」と「No.4」の使い分けも可能です。

ユニブラシ No.4とオーバル「S」タイプが装着可能

オーバル「L」タイプのみ装着可能

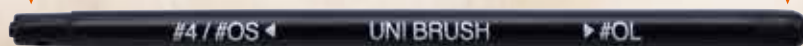

(ユニブラシ オーバルタイプの柄)

2 新発想! 塗りムラ低減、丸型毛先

平筆の毛先を水平にカットせず、丸型に調整しました。筆先が必要以上に広がらず、筆の辺縁にペーストが広がるのを抑えるため、スムーズな塗布性を実現しました。

弊社従来品 ユニブラシ No.4 と 新製品ユニブラシ オーバルタイプ「S」の筆先の広がり比較



ユニブラシ No.4



ユニブラシ オーバルタイプ「S」

3 広い面の塗布に便利な「Lタイプ」の筆先

表面滑沢硬化材や広範囲へのオパーク塗布など広い面への塗布には「Lタイプ」の使用が効果的です。



ユニブラシ No.4 使用



ユニブラシ オーバルタイプ「L」使用

■ 使用材料：レジングレース リキッドタイプ [歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材]

4 使用例



オーバルタイプ「L」使用
表面滑沢硬化材「レジングレース」を広範囲に塗布。



オーバルタイプ「L」使用
セラマージュ デュオ オパーク GUM-O を広範囲に塗布。



オーバルタイプ「S」使用
ソリデックス ハーデュラ オパーク を塗布。筆の側面を使用することで隣接部などの細部にも対応できます。

包装・価格

ユニブラシ オーバルタイプ

Lタイプ

内容: 柄 1本 筆先/10本 (Lタイプ筆先)

Sタイプ

内容: 柄 1本 筆先/10本 (Sタイプ筆先)

※Lタイプまたは、Sタイプのみでは「W筆先」での使用はできません。



写真はSタイプです。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595