



# CAD/CAM用セミシッタージルコニアディスク 松風ディスク ZR-SS



## 幅広い症例に適応可能な セミシッタージルコニアディスク

### 幅広い症例に適応可能な高い適合性

均一に成形されているため、焼結時も均一に収縮します。  
また、14mm、18mm、26mm と厚みの異なる3種類のディスクをラインナップしているため、幅広い症例に適応可能です。陶材築盛やステイニングも可能です。  
※ロングスパンブリッジの場合、変形防止のための加工を推奨します。



陶材築盛に  
ヴァンテージ ZR



プレス成形に  
ヴァンテージ ZR  
プレスオーバー




ステイニングに  
ヴァンテージ アート

### 高い透過性

ジルコニア材料としてトップクラスの光透過性を有しています。

※印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

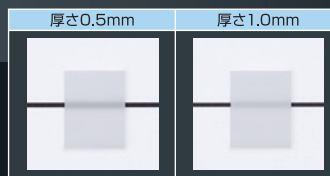

厚さ0.5mm  
コントラスト比  
0.69

厚さ1.0mm  
コントラスト比  
0.79


### 物性

曲げ強さ (MPa)	熱膨張係数 (25-500°C)( $\times 10^{-6}/K^{-1}$ )	溶解量 ( $\mu g/cm^2$ )	密度 ( $g/cm^3$ )
1456	10.9	3	6.06

※全て松風独自試験による

### 推奨焼結スケジュール

	開始温度	昇温速度 (°C/分)	焼結温度 (°C)	係留時間 (分)	降温
単冠	室温	10	1450	120	放冷
ブリッジ	室温	5	1450	120	放冷

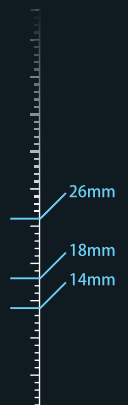

### 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR-SS	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号226AFBZX00027000

### 包装・価格



### 松風ディスク ZR-SS

サイズ：3種 /  $\phi 98 \times$  厚み14、18、26mm  
色調：1色 / HT ホワイト

このカタログに記載の価格は2014年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

# 株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>