



コンポジットレジン研削・研磨用

松風 スーパースナップ<sup>®</sup> リボーン



# SUPER-SNAP

## Reborn

より艶<sup>つや</sup>やかに

より効率的に

より使いやすく


SHOFU INC.

# 松風スーパースナップ リボーンは 前歯部 コンポジットレジン修復に



## より艶やかに


黒や紫で形態修整後、緑、赤の順に使用することで、研磨ペーストなしでもコンポジットレジンに光沢を与えることが可能です。ホワイトポイント後に緑を使用するだけでも、十分な研磨性が得られます。

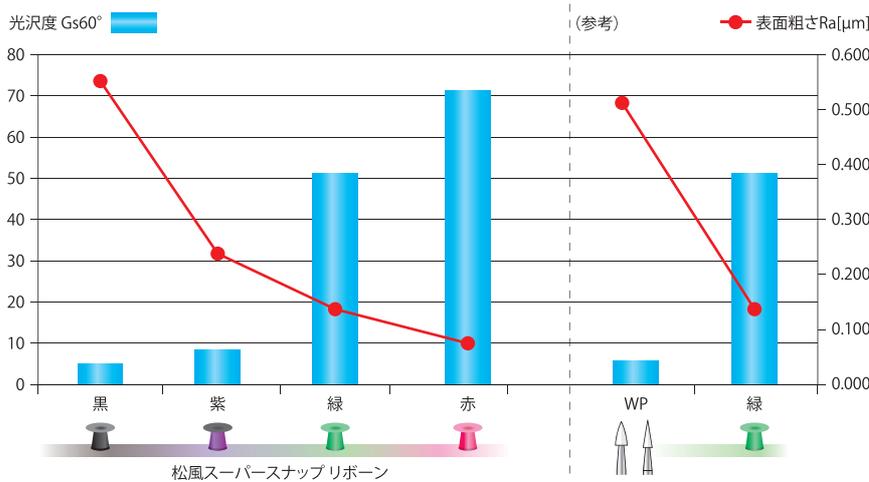

WP: 松風ホワイトポイント  
【試験方法】ビューティフィルⅡを #600 の研磨紙で整えた後、下記の条件で研磨  
回転数: 10,000min<sup>-1</sup>、荷重: 1N、研磨時間: 30 秒間

### ディスクタイプの特長

松風ホワイトポイントと紫の比較  
(粒度はほぼ同じ)

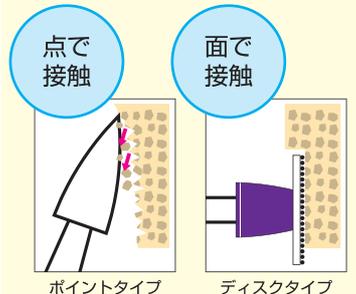


ディスクタイプは面で接触する為、均一かつ容易に研磨することができ、ポイントタイプよりも高い研磨性を発現します。



### 特殊な砥粒コーティングを採用し、研磨性が向上

最終研磨用の赤は、特殊な砥粒コーティングを採用し、弊社従来品よりも研磨時に発生する熱や研磨屑が逃げやすくなりました。これにより、研磨屑による二次的傷や、目詰まりによる研磨効率の低下が発生しにくくなり、研磨性が向上しました。

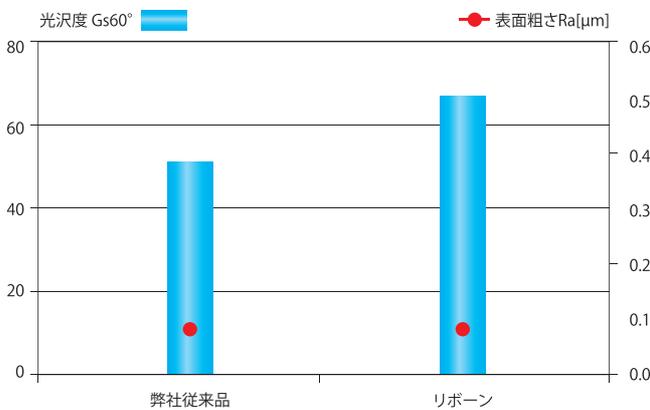

【試験方法】ビューティフィルⅡを #600 の研磨紙で整えた後、下記の条件で研磨  
回転数: 10,000min<sup>-1</sup>、荷重: 1N、研磨時間: 30 秒間

### 高い研磨性

#### 弊社従来品

シート基材  
コンポジットレジン

熱や研磨屑が逃げにくい

#### リボーン



シート基材  
コンポジットレジン

熱や研磨屑が逃げやすい

突起状に砥粒をコーティング

研磨部顕微鏡拡大図

研磨部顕微鏡拡大図

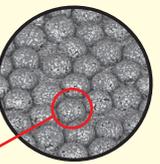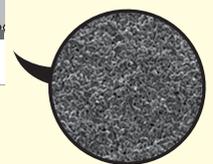

の

# 適したディスクタイプの研削・研磨材です。



## より効率的に



### 粗修整用の黒を追加

粗修整用として、黒を追加しました。

紫よりも研削能力が高く、CRの余剰分をスムーズに削除することが可能です。




### 両面砥粒タイプを採用※

4級窩洞のように唇面から切端・隣接面にかかった窩洞も、1つのディスクで研磨することが可能です。

※黒 12S、黒 8S、紫 12Sは片面仕様です。



唇面(天面使用)

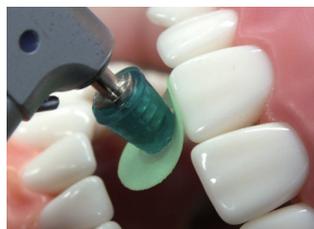

切端(天面使用)



隣接面(裏面使用)




## より使いやすく




### 付け替えに便利なスナップオンタイプ

ヘッドから軸を取り外す手間が不要なため、チェアタイムの短縮が可能です。

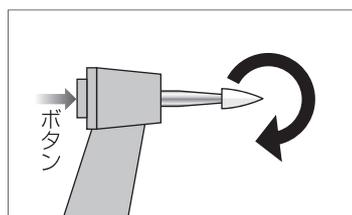

<通常タイプの付け替え>  
コントラからポイントを付け替える必要がある

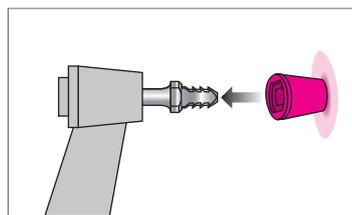

<スナップオンタイプの付け替え>  
マンドレルを一度差し込めば、あとはディスクの付け替えだけ



「ディスクがマンドレルから外れそうで心配」という方にも!



弊社従来品  
マンドレル



リボーン専用  
マンドレル

マンドレルからディスクが抜けにくくなるよう、先端形状を工夫しました。

# SUPER-SNAP

Reborn

販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風スーパースナップ	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000068

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風マンドレル	歯科用マンドレル	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000093

包装



【種類】

品番	用途	形状	数量	使用部位	
ディスク・ミニディスク	黒12S	粗修整用		5	隣接・先端部
	黒8S	粗修整用		5	歯頸部
	紫12S	修整用		5	隣接・先端部
	紫8W	修整用		5	歯頸部
	緑12W	中研磨用		5	隣接・先端部
	緑8W	中研磨用		5	歯頸部
	赤12W	最終仕上げ用		5	隣接・先端部
	赤8W	最終仕上げ用		5	歯頸部

松風スーパースナップ リボーン  
50個入  
(ディスク・ミニディスク)

松風マンドレル スーパースナップ リボーン専用 CA  
6本入

※ディスク・ミニディスクはディスポーザブル仕様のため、滅菌はできません。

関連製品



管理医療機器 認証番号 229AFBZX00047000  
歯科充填用コンポジットレジン  
ビューティフィル フロー プラス X  
2.2g  
2.2g×3本入(A2、A3のみ)  
色調/F00:11色、F03:12色




管理医療機器 認証番号 302AKBZX00097000  
歯科充填用コンポジットレジン  
ビューティフィル ユニシェード  
2.1mL(4.5g)



一般医療機器 届出番号 26B1X00004000023  
歯科用ダイヤモンドバー  
松風ダイヤモンドポイントFG  
MiCDダイヤモンドセット  
6本セット



一般医療機器 届出番号 26B1X00004000238  
歯科用研磨器材  
ダイヤインブラシ  
2本入り

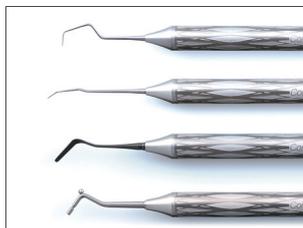

一般医療機器 製造販売届出番号 11B1X1000665D624  
歯科用充填器  
MiCDインストルメント  
1キット

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店