



LED光照射器

ブルーショット II

“カチッ”と硬める高性能LED照射器

BlueShot II

ターボモード
追加搭載



LED CURING LIGHT

目的に応じた照射モードで確実な重合が可能です

SHOFU INC.

B


ブルーショットⅡはハイパワーのみならず、症例に応じたモード選択が容易に行える歯科用LED光照射器です。さまざまなシチュエーションに応じた照射モードを搭載し、確実な重合が可能です。

ブルーショットⅡは新しく「ターボモード」を搭載

ターボモード

ハイモードより高い光強度が必要な場合に最適です。白歯部遠心側等の照射しづらい部分に距離を離してご使用いただけます。

光強度 : 約1,400mW/cm²
照射時間 : 5秒、10秒、20秒の選択が可能です。

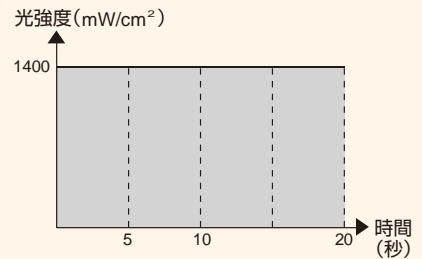


多彩な照射モードを搭載

電源起動時には、前回使用したモードを記憶しています。


ハイモード

速やかに高いパワーの光強度が必要な場合に最適です。
光強度 : 約1,000mW/cm²
照射時間 : 10秒、20秒、30秒の選択が可能です。

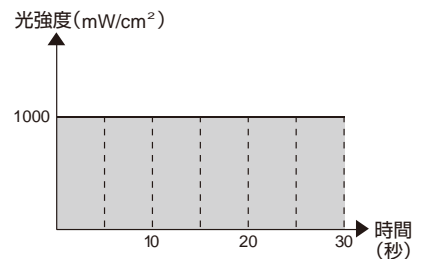


ソフトスタートモード (重合時のストレスに配慮)

スタート時のパワーを抑えることにより、重合時のストレスに配慮したモードです。
最初の5秒間で、光強度が0⇒650mW/cm²となり、次の15秒間は約1,000mW/cm²となります。
照射時間: 20秒固定。

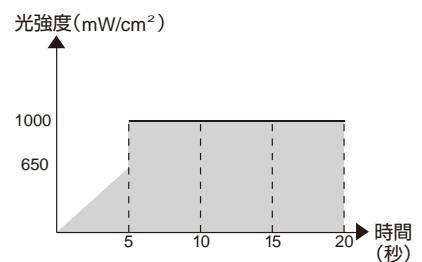


パルスモード (歯髄に対する不安を軽減)

発熱を抑え、歯髄に対する不安を軽減するモードです。
約1,000mW/cm²の光強度を0.1秒間照射し、その後0.05秒間出力を停止。このサイクルを照射時間内、繰り返します。
照射時間: 20秒、30秒、CON(最大3分)の選択が可能です。

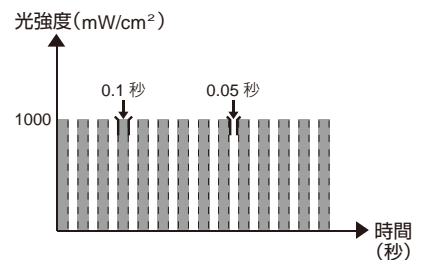

ノーマルモード (歯面漂白材の加熱に使用)

歯面漂白用加熱の場合は、CONで照射してください。
光強度 : 約650mW/cm²
照射時間 : 20秒、30秒、CON(最大3分)の選択が可能です。

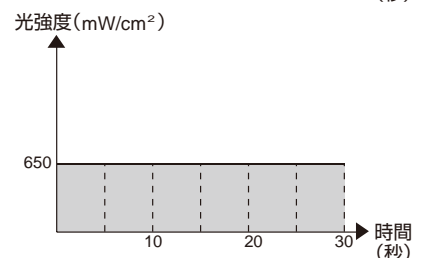

t

LED CURING LIGHT

Five modes are available.

▶ ライトガイドは135°C以下のオートクレーブ滅菌が可能

〈但し、ハンドピース、ライトプロテクターは滅菌不可〉

▶ 省エネルギー対応


ハンドピースの電源がONの状態でも5分間ボタン操作を行わない場合は、自動的に電源がOFFになります。
(スタートボタンを長押しすると強制的に電源を切ることもできます)

▶ 持ちやすく手になじむ ハンドピース

▶ リチウムイオン電池採用

短い継ぎ足し充電でも電池の性能を100%発揮します。


▶ ハイモード時 約100回の10秒照射が可能

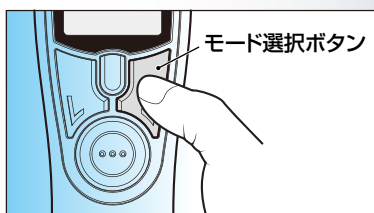

ハンドピースのボタン操作ラベル

※ 必要に応じて、『ボタン操作ラベル』をハンドピースまたは充電ベースの空きスペースに貼り付けてください。

ラベル(シール)は本品に1枚ついています。
必要に応じて付属のラベルをご使用ください。

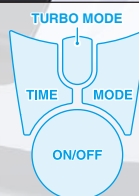

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ブルーショット II	歯科重合用光照射器 歯面漂白用加熱装置	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000253 特定保守管理医療機器

適用材料

■ハイモード時	商品名	照射時間
充填用コンポジットレジン(厚さ2mm)	ビューティフィル II	10秒間
	ビューティフィル フロー、フロープラス	10秒間
	ビューティフィル Eポステリア	10秒間
充填用コンポジットレジン(厚さ4mm)	ビューティフィル バルク	10秒間
	ビューティフィル バルクフロー	Universal 10秒間 Dentin 20秒間
コンポジットレジン用ボンディング材	フルオロボンド II	10秒間
	ビューティボンド マルチ	5秒間*
シーラント	ビューティシーラント	10秒間
自己接着性レジンセメント	ビューティセム SA	10秒間
	レジセム	10秒間

*本機の照射時間設定は「10秒」が最短です。照射時、5秒毎に鳴る「ビツ」音を目安にしてください。

包装・価格



歯科重合用光照射器

ブルーショット II

【内容】

ハンドピース、ライトガイド(φ8mm)、充電ベース、バッテリーパック、ライトプロテクター、ACアダプター 各1

【別売品】

バッテリーパック ライトガイド
ライトプロテクター ACアダプター

仕様

ハンドピース	型 式	BS2-01
	作動電圧	DC3.7V
	寸 法	L217×W97×H38(mm)
	質 量	約180g(バッテリーパック含む)
充電ベース	型 式	BS2-02
	作動電圧	DC5V
	寸 法	D179×W176×H138(mm)
	質 量	約240g

バッテリーパック	型 式	BS-BP
	種 類	リチウムイオン電池
	公称電圧	DC3.7V
	定格容量	2,600mAh
	寸 法	L108×H34(mm)
ACアダプター	電 源	AC100V-240V
	出 力	DC5V
光学特性	発光波長	455~475nm
	光 強 度	ターボモード:約1,400mW/cm ² ハイモード:約1,000mW/cm ² ノーマルモード:約650mW/cm ² ソフトスタートモード: 0⇒650mW/cm ² ⇒約1,000mW/cm ² パルスモード:約1,000mW/cm ² (間欠)

関連商品



ビューティフィル バルク

4.5g
色調:2色
■Universal
透明感があり周囲の色調を取り込みやすいシェード
■A
歯冠色(A系統)の色調



ビューティフィル バルク フロー

2.4g(松風コードルチップ(太)5個付)
色調:2色
■Universal
透明感があり周囲の色調を取り込みやすいシェード
■Dentin
象牙質類似の色調



フッ素徐放性インジェクタブルハイブリッドレジン ビューティフィル フロー プラス

2.2g
2.2g×3本入*(A2, A3のみ)
F00(超低流動タイプ)色調:11色
F03(低流動タイプ)色調:12色
付属品:ニードルチップ5個(3本入は25個)



光重合型一液性ワンステップボンド ビューティボンド マルチ

セット
ダブルパック



ビューティセム SA

色調:3色(ハンドミキシング、オートミキシング共通)
クリア、アイボリー、オパール
ハンドミキシング
【内容】ビューティセム SA ペースト 9mL、紙練板 1、
スパチュラ 1、ステップカード 1

オートミキシング

【内容】ビューティセム SA ペースト 5mL、
ミキサーチップ 10、ステップカード 1



審美修復用レジンセメントシステム(デュアルキュア型) レジセム **ベーシックセット**

ペースト(クリア)5mL×2
プライマー-A 3.0mL
プライマー-B 2.5mL 他一式

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。