

包装・価格

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号	販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
ビューティコアキット EX	歯科用支台築造材料キット	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00149000	ビューティデュアルボンド EX	歯科用象牙質接着剤	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00148000
ビューティコア	歯科用支台築造材料	管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00213000	ビューティコア ファイバーポスト	歯科根管用ポスト成形品	管理医療機器 医療機器認証番号 226AKBZX00088000



ビューティコアキット EX

〔キット内容〕
ビューティコア LC インジェクタブル(Dentin) 2.5g
ビューティコア LC ポストペースト 2.1g
ビューティデュアルボンド EX ボンドA 3.0mL
ビューティデュアルボンド EX ボンドB 2.5mL
松風ニードルチップ(太) 5
松風ニードルチップ 5
デスポブラシ ファイン(ピンク) 50
松風Vディッシュ 25



保険適用

ビューティコア ファイバーポスト

10入 / 20入

〔種類(直径)〕 4種

■1.0mm ■1.2mm ■1.4mm ■1.6mm

ファイバーポストの前処理に
松風ポーセレンプライマー
5mL



単品

ビューティコア LC インジェクタブル

2.5g
(松風ニードルチップ(太) 5個付)
〔色調〕 2色
Dentin White

ビューティコア LC ペースト


4.6g
〔色調〕 2色
Dentin White

ビューティコア LC ポストペースト

2.1g
(松風ニードルチップ 5個付)
Dentin White

ビューティコア フローペースト

9g
〔付属品〕
松風ミキシングセット ミキサー 20
松風ミキシングセット ノズル(細) 20

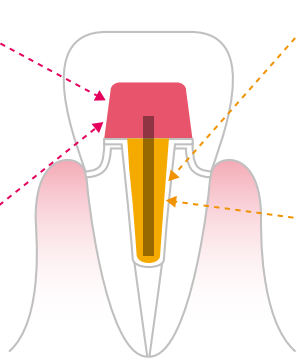


関連製品



松風ビューティボンド ユニバーサル

1セット

〔セット内容〕ビューティボンド ユニバーサル 6.0mL 1
デスポブラシファイン(ピンク) 50
松風Vディッシュ 25

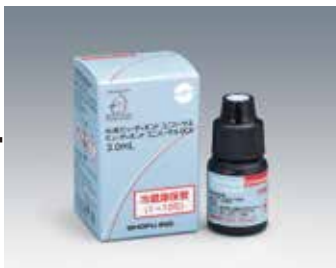

レジンセメントやレジンコア材との併用時に使用

ビューティボンド ユニバーサル DCA

3.0mL


ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



レジン支台築造システム

ビューティコア システム 保険適用

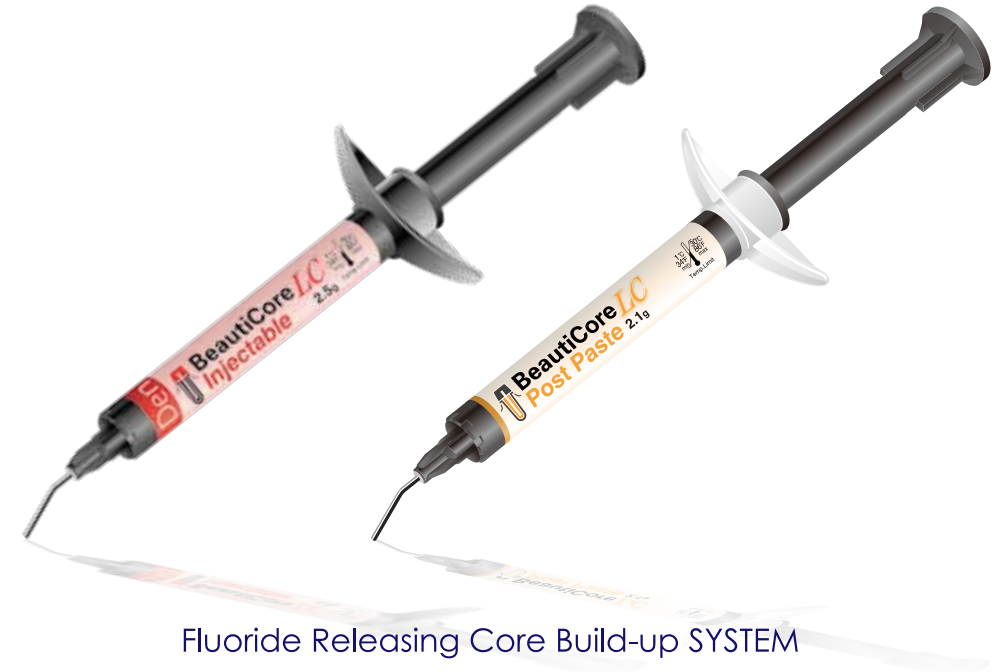

Fluoride Releasing Core Build-up SYSTEM

BeautiCore SYSTEM

“Wペースト”を採用したのには理由があります

「人生100年時代」
自分の歯を残したい

保険適用

松風が考案した
コアシステム

光重合タイプ



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京 (03)3832-4366 ●営業所:札幌 (011)232-1114/仙台 (022)713-9301/名古屋 (052)709-7688/京都 (075)757-6968/大阪 (06)6330-4182/福岡 (092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

2002DJJSW


SHOFU INC.

使用時のストレスを軽減 (Wペースト採用の理由)

各ペーストがそれぞれ、各部位に適した物性を備えています

硬くて強い!


咬合圧に耐える強さ

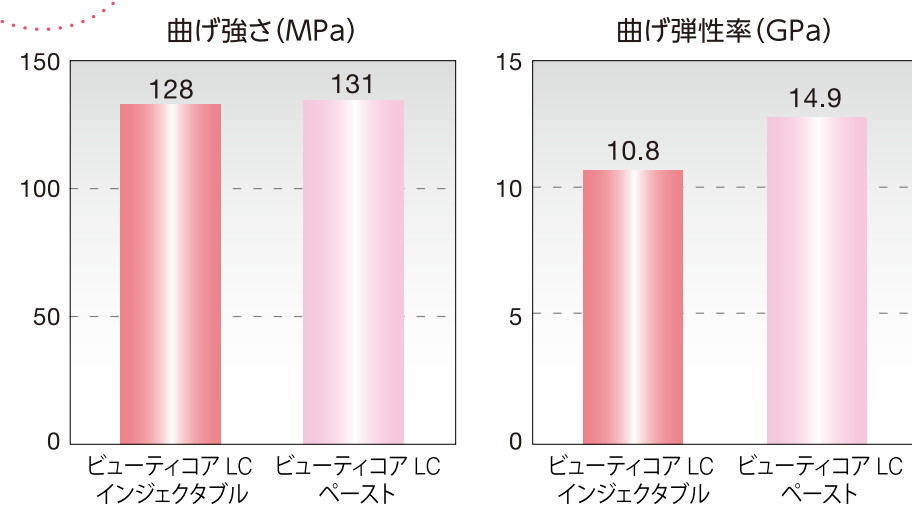

【自社試験による】
(37℃水中保存24時間後) [代表値]

しなやかで、脆弱化した根管歯質に
ダメージを与えにくい

しなやか!

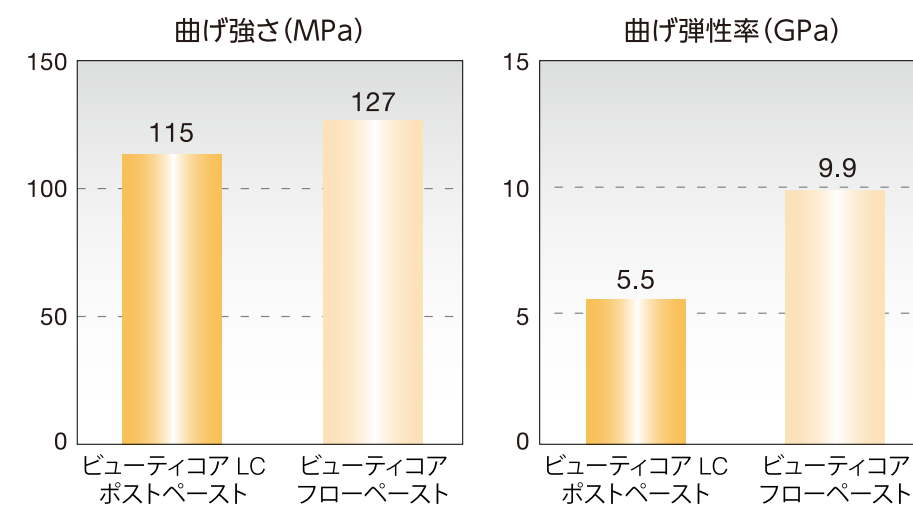

【自社試験による】
(37℃水中保存24時間後) [代表値]

築盛・填入に適した2種類のペーストをご用意


こんな経験
ありませんか?

築盛時、垂れてくるため急いで盛り上げて
光重合しなければならなかった

築盛には

垂れずにピタッと築盛が可能な

ビューティコア LC インジェクタブル

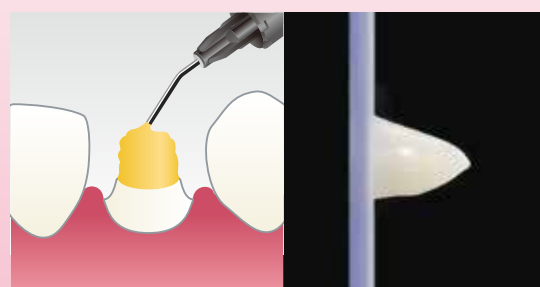

排出したペーストを
垂直にした状態




こんな経験
ありませんか?

ファイバーポスト植立時、ペーストの流動性が悪く
気泡を巻き込んでしまった

流し込みには

根管の隅々まで填入可能な

ビューティコア LC ポストペースト

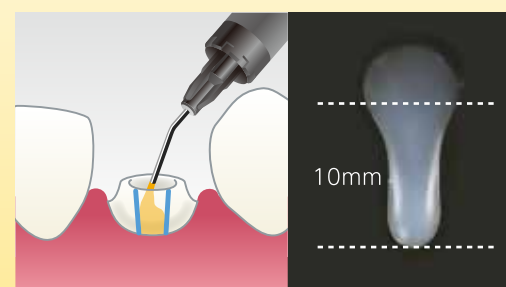

ガラス板に採取
したペーストを1
分間垂直に立て
た状態



根管に填入する“ハイレフローペースト”


脆弱化した根管歯質にダメージを与えにくい“しなやか”な弾性。
曲げ弾性率が適度に低く、弾性があります。

※フローペーストの曲げ弾性率について
根管部に高すぎる機械特性を有するレジンコアを適用すると、根管歯
質にダメージを与えやすいため、適度にしなやかな弾性が必要です

S-PRGフィラーを配合した理由


支台歯形成後のことも考えたいから

ビューティコアシリーズのペーストには S-PRGフィラーを配合

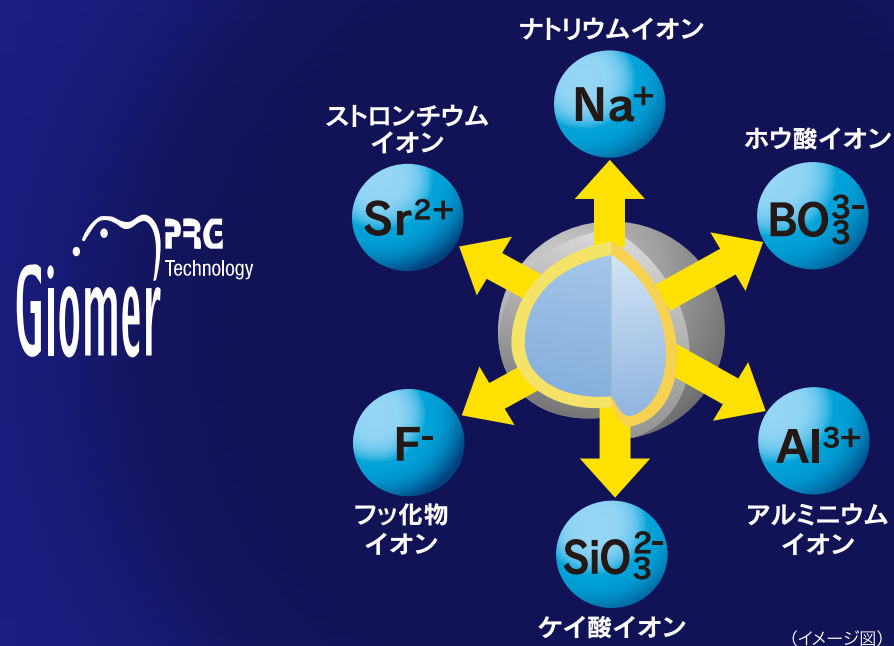


抗プラーク付着性(学会報告) 日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

●口腔内におけるプラーク形成状況の観察(24時間ブラッシングなし)

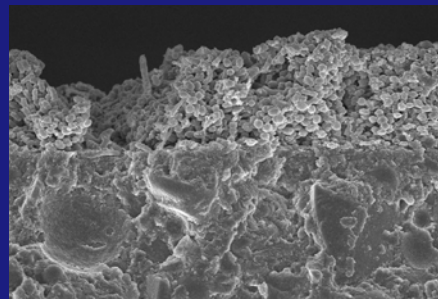

S-PRGフィラー未配合自社コンポジットレジン

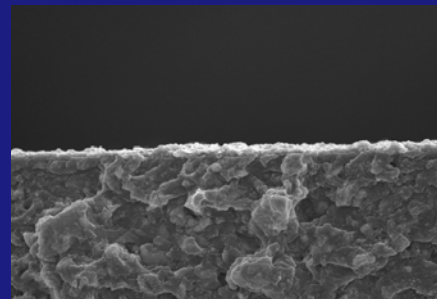


ビューティコアII (S-PRGフィラー配合)

S-PRG フィラー配合コンポジットレジン (ビューティコアII等) の表面はだ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液との接触によって再形成され、持続的にプラーク形成を抑制するといわれています。

(参考:朝日大学 歯学部歯科保存学分野 / 第117~123日本歯科保存学会報告)

再根管治療

(S-PRGフィラー未配合の
コア材で支台築造体を作製) (**ビューティコア**で
支台築造体を作製)

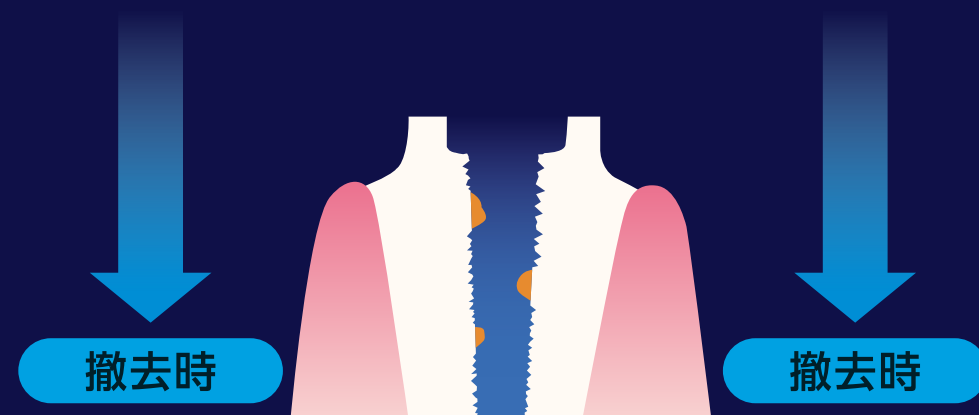

万が一、コア材が残存してしまった場合、コア材が接着阻害因子となりテクニカルエラーの原因となる可能性がある


万が一、コア材が残存してしまった場合でもコア材も歯質も**ビューティデュアルボンド**で接着処理できるためテクニカルエラーの原因となりにくい

POINT

ビューティデュアルボンドに含まれる酸性モノマーがビューティコア中の S-PRG フィラーに結合するため、ビューティデュアルボンドはビューティコア硬化体にもプライマーなしで接着します。

操作の流れ


- ① 歯質および残存するコア材にビューティデュアルボンドを塗布し、光照射
- ② ビューティコアを填入

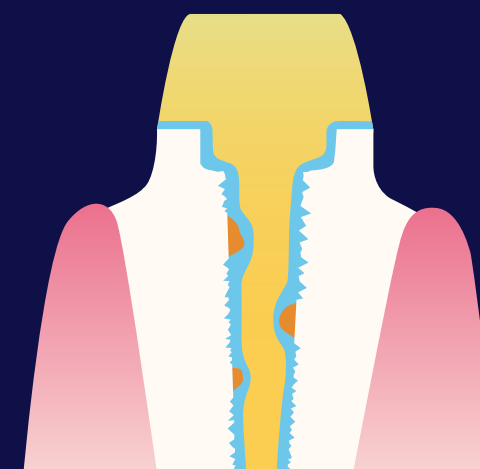

03 変色を軽減

支台歯の変色を抑え、
審美修復を長期的にサポート


アミン類未配合の為、硬化後の変色を抑えることができます

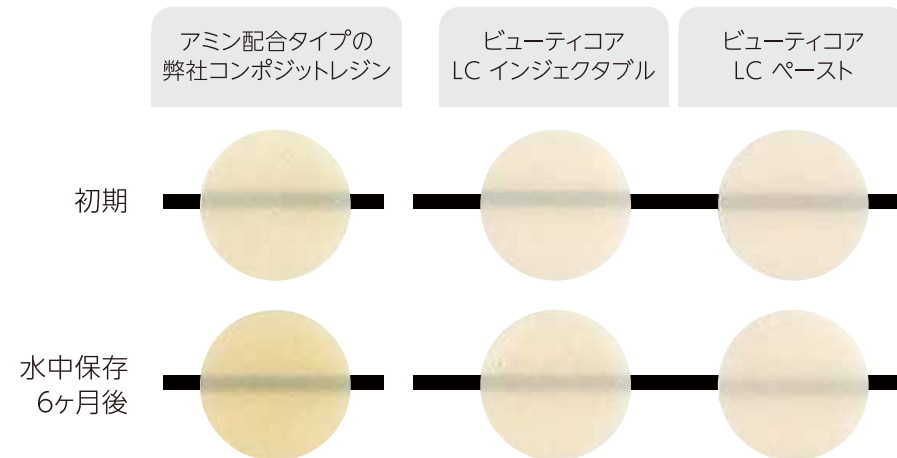

04 根管填入時の不安を軽減

硬化深度は深く設定

試験により得られた硬化体の長さを2で除した値が硬化深度です。
(JIS T 6514:2015規格、ISO4049:2009規格)

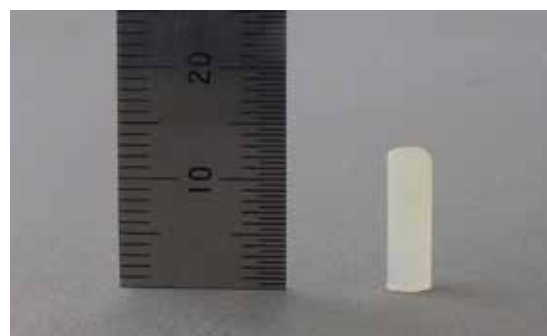

LCポストペーストの
硬化深度は

6.0mm

※LED照射器20秒の場合
(代表値)

▶動画をご覧に
なりたい方は
コチラ



●試験方法

金属リング内にペーストを充填後、上部からLED照射器にて所定の時間光照射を行い、金型から硬化体を外して未重合を除去し、硬化体の長さを測定する




05 無駄を軽減

光重合タイプだからこそ、
ペーストの無駄を軽減可能



ミキサーとノズル内には1回使用するごとにペーストが約0.3g残存します。
ビューティコアLCシリーズは、ミキサーとノズルが不要でニードルチップのみでお使いいただけるため、残存するペースト量を軽減できます。

●1回あたりの残存ペースト量

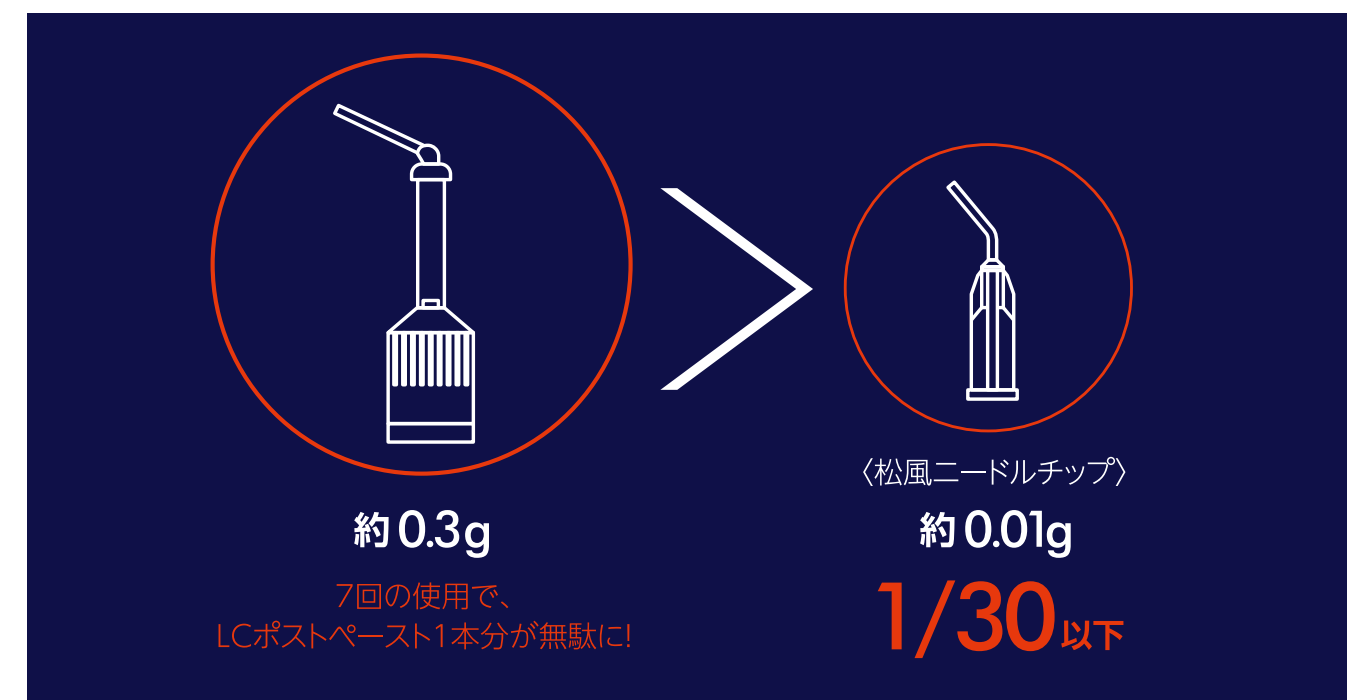

填入・築盛操作も容易

当社フロアブルレジンと同じシリンジを採用していますので、同じような感覚でお使いいただけます。



距離が
短かく口腔内で
築盛しやすい