



歯科用ゴム製研磨材
シルコシャイン

ZIRCOSHINE CA

シルコシャイン



ダイヤモンド
砥粒含有

口腔内装着後のジルコニアや二ケイ酸リチウムの研磨に
ジルコニアを鏡面研磨し、表面を整えることが対合歯摩擦リスクの
軽減につながると、近年、学会等で数多く報告されています。




NEW 3ステップ研磨 コース→ミディアム→ファインの順にジルコニアを研磨

試験条件:
使用ポイント/#11
回転速度/10,000min⁻¹
荷重/1N
研磨時間/各1分(トータル3分)

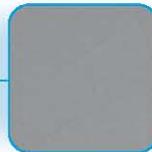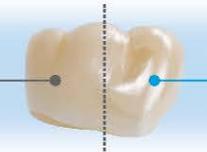

傷を少なく仕上げることで
対合歯摩擦リスクの
軽減につながります

試験条件:
使用ポイント/#11
回転速度/10,000min⁻¹
荷重/1N
研磨時間/コース1分、ファイン2分
(トータル3分)

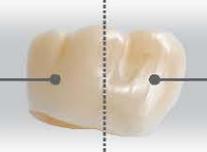

ツヤは出ているものの
拡大してみると
研磨傷が残っています

従来 2ステップ研磨 コース→ファインの順にジルコニアを研磨

※自社試験による


包装・価格

まずはお求め
やすいキットで
お試しください



シルコシャイン セレクトキット CA

1キット ¥5,600
【キット内容】
松風ビトリファイドダイヤ (28, 29) 各1
シルコシャイン コース (28) 2
シルコシャイン ミディアム (28) 1
シルコシャイン ファイン (28) 1
パーステーションII (ブルー、イエロー) 各1
【最高許容回転速度】
シルコシャイン: 20,000min⁻¹
松風ビトリファイドダイヤ: 30,000min⁻¹

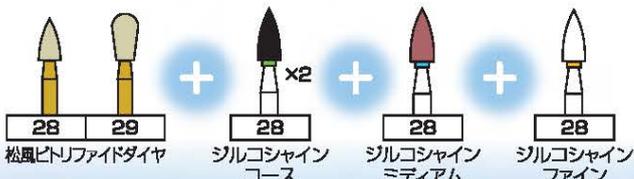

スムーズに
形態修整が
可能




シルコシャイン CA

[28] 4本入 ¥3,300 [Cup] 3本入 ¥3,300
【形態】各種2形態
【最高許容回転速度】20,000min⁻¹
【種類】3種
■ コース
■ ミディアム
■ ファイン
▨ 研磨材の色
▨ チューブの色



松風ビトリファイドダイヤ CA

3本入 ¥2,900
【形態】3形態
【最高許容回転速度】30,000min⁻¹

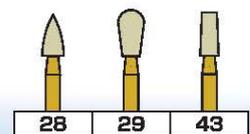

NEW


ZIRCOSHINE HP

ジルコシャイン

ダイヤモンド
砥粒含有

硬度の高いジルコニアや二ケイ酸リチウムも艶やかに

ジルコニアの研磨
— 大白歯クラウン —

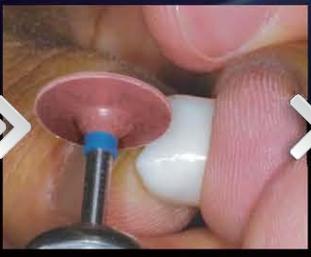

● コース ● 中仕上げ研磨

● ミディアム ● 仕上げ研磨

○ ファイン ● 最終仕上げ研磨

二ケイ酸リチウムの研磨
(ヴィンテージLD プレスなど)
— 小白歯クラウン —

二ケイ酸リチウムを研磨する場合、コースの工程は省略いただけます。




包装・価格



ジルコシャイン HP
 10,11 3本入 ¥3,300
 28 4本入 ¥3,300
 ホイール5 1枚入 ¥2,150
 【最高許容回転速度】
 20,000min⁻¹ (ホイール5は15,000min⁻¹)
 【種類】3種
 ● コース ● ミディアム
 ● ファイン ● 研磨材の色
 ▨ チューブの色


【形態】各種4形態

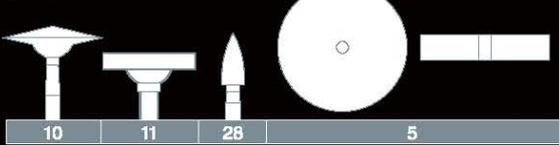

スムーズに
形態修整が
可能

松風ビトリファイドダイヤ HP
 28,29,42,43 3本入 ¥2,900
 20 3本入 ¥4,500
 11 2本入 ¥2,900
 10,70 2本入 ¥4,500
 【最高許容回転速度】30,000min⁻¹

【形態】8形態

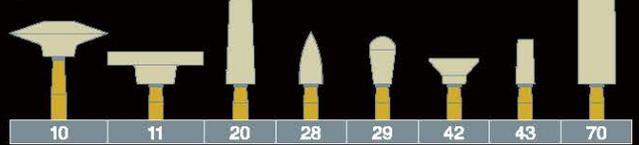

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ジルコシャイン セレクトキット	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000258
ジルコシャイン	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000017

取扱い店

カタログに記載の価格は2015年8月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。