



前歯暫間クラウン用

松風シェルクラウン SA

松風シェルクラウンがリニューアル!

FOR TEMPORARY RESTORATION

SHELL CROWN SA



当社人工歯ベラシアSA形態の採用により

審美性が向上!



弊社従来品  
(松風シェルクラウン)

NEW




松風シェルクラウン SA

SHOFU INC.




# 松風シェルクラウン SAを活用してみませんか？


あらかじめ唇側面の形態が出来ているのでカンタンに製作可能です

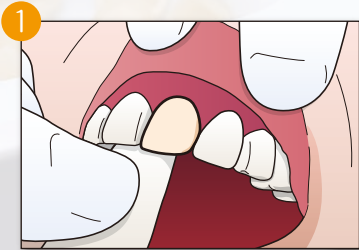


1 試適して、シェルクラウンの歯頸部を削合して長さを調整する

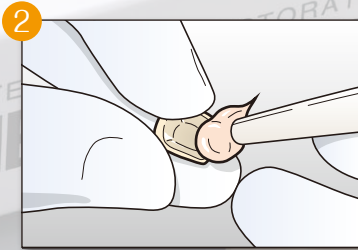


2 常温重合レジンを経練後、シェルクラウンの内側に盛り上げる

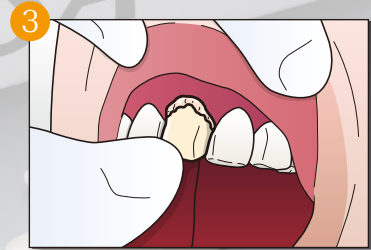


3 分離材を塗布した支台歯に圧接し、唇面の位置を定めた後、レジンで舌側面歯頸部に向かって伸ばしながら圧接する

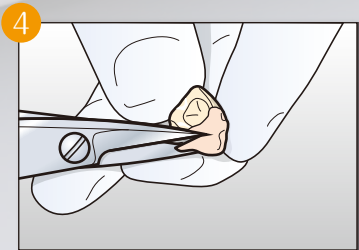

4 レジンが完全硬化する前に取り出し、アンダーカットや余剰部をハサミ等で切除する

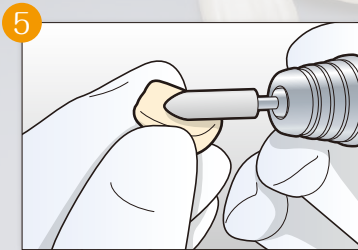

5 硬化後、口腔外に取り出し、各部を研磨調整する ※試適して確かめながら行うこと

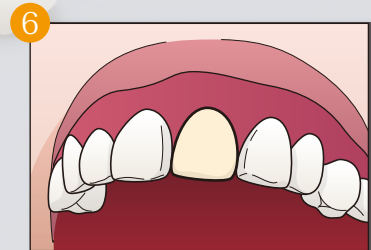

6 仮着セメント等で口腔内に装着する

## 包装



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風シェルクラウン SA	歯科用暫間被覆冠成形品	管理医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00115000

### 松風シェルクラウン SA

フルセット 180歯

【内容】

左側/中切歯 S.M.L 各15歯、側切歯 S.M.L 各10歯、犬歯 S.M.L 各5歯  
右側/中切歯 S.M.L 各15歯、側切歯 S.M.L 各10歯、犬歯 S.M.L 各5歯



20歯(形態・サイズ別)

■18種

上下	形態	左右	部位
上顎	S M L	左側 右側	中切歯 側切歯 犬歯

### 寸法表示の読み方(mm)

中切歯 (A)長径 (B)幅径  
側切歯 (A)長径 (B)幅径  
犬歯 (A)長径 (B)幅径

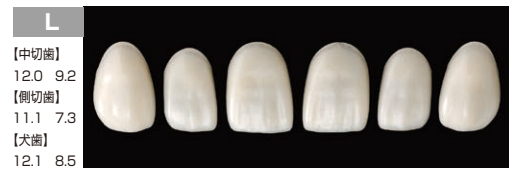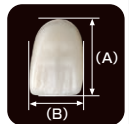

## 関連製品



ハイボンド テンポラリーセメント ソフト  
ハイボンド テンポラリーセメント ハード  
1-1セット



常温重合レジン  
プロビナイス ファスト  
粉50g 250g  
液100mL 250mL

【色調】 A2、A3とマッチ



このカタログに記載の価格は2017年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)  
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>